

	UOC PATOLOGIA CLINICA URBINO ELENCO PRESTAZIONI	ALL03GdSlaboU001_ORG	Pag. 1 di 112
		Verifica Dr. E. Berselli-RAQ	Rev 06 del 18/04/2025
		Approvazione Dr. S. Barocci- Direttore UOC	

DENPREPARAZIONE, MODALITÀ DI PRELIEVO, CONSERVAZIONE E TRASPORTO DEI MATERIALI BIOLOGICI

INDICAZIONI GENERALI

Tali indicazioni hanno lo scopo di favorire l'esecuzione del prelievo nelle condizioni più standardizzate possibili, onde evitare interferenze nelle analisi, per ridurre al minimo la variabilità pre-analitica. Per l'esecuzione di alcuni test e/o per raccolta di urine, feci od altri materiali sono richieste particolari modalità comportamentali o di raccolta e trasporto, queste verranno descritte di volta in volta nell'elenco prestazioni.

- Nei giorni che precedono il prelievo non deve essere effettuata intensa attività fisica;
- È prescritto il digiuno di almeno 8-10 ore, evitando anche caffè, the, latte o altre bevande ad esclusione dell'acqua naturale in quantità moderata al mattino e l'ora del prelievo deve essere il più possibile standardizzata;
- Non modificare le abitudini alimentari i giorni prima del prelievo
- Non assumere alcool nelle 12 ore precedenti il prelievo
- Durante il digiuno va evitato il fumo e deve essere sospesa l'assunzione di farmaci
- Nella sala di attesa il paziente deve rimanere seduto, non deve interrompere il digiuno né fumare; qualora fosse avvertita una sensazione di malessere avvisare il personale (non assumere caramelle o analoghi);
- Per monitoraggio terapeutico farmaci la raccolta del campione deve avvenire in un momento temporale appropriato rispetto all'assunzione dei medicinali.

MODALITA' DI RACCOLTA E TRASPORTO DI ALCUNI CAMPIONI BIOLOGICI

1. ESPETTORATO

MODALITA' DI PRELIEVO:

- ✓ eseguire la raccolta il mattino,
- ✓ effettuare una pulizia adeguata del cavo orale facendo gargarismi con acqua
- ✓ raccogliere l'espettorato dopo un colpo di tosse, in un contenitore sterile a bocca larga con tappo a vite; l'espettorato deve provenire dalle basse vie e non essere contaminato da saliva
- ✓ se il paziente ha difficoltà ad espettorare si ricorre all'induzione con aerosol: far inspirare al paziente lentamente e con profondità un aerosol di soluzione salina tiepida per una decina di volte; il paziente deve poi espettorare nel contenitore sterile
- ✓ per la diagnosi di polmoniti batteriche è sufficiente un solo campione, mentre per la diagnosi di infezioni tubercolari o micotiche sono necessari 3 campioni raccolti in mattine successive
- ✓ Altri materiali delle vie aeree provengono da prelievi praticati da operatori sanitari (liquidi di lavaggio bronchiali, BAL, ecc.)

2. TAMPONE FARINGEO

MODALITA' DI PRELIEVO:

- ✓ il tampone va eseguito prima dell'antibiotico terapia
- ✓ con l'utilizzo di un abbassalingua spingere la lingua verso il basso e strisciare il tampone da tonsilla a tonsilla toccando la volta palatina.

TRASPORTO: il tampone viene inserito nell'involucro contenente il terreno di trasporto; e può essere conservato al massimo fino 24 ore purché a 4°C.

3. URINE STANDARD

	UOC PATOLOGIA CLINICA URBINO ELENCO PRESTAZIONI	ALL03GdSlaboU001_ORG	Pag. 2 di 112
		Verifica Dr. E. Berselli-RAQ	Rev 06 del 18/04/2025
		Approvazione Dr. S. Barocci- Direttore UOC	

- ✓ Raccogliere il campione delle prime urine del mattino (mitto intermedio) eliminando la parte iniziale e finale della minzione. Contenitore: provetta tappo rosso monouso da 20 mL - N.B.: I contenitori monouso si possono ritirare presso il Laboratorio Analisi.

MODALITA' DI RACCOLTA: dopo accurata pulizia dei genitali esterni eliminare la porzione iniziale e raccogliere la porzione intermedia della prima minzione del mattino, ricordarsi di non fare sforzi fisici, di astenersi dai rapporti sessuali nelle 12 ore antecedenti la raccolta e per le donne, in età fertile, evitare la raccolta nel periodo mestruale.

È importante non assumere VITAMINA C nei giorni precedenti l'esecuzione dell'esame perché un'alta concentrazione di Acido Ascorbico (> 40 mg/dl) inibisce la determinazione dell'emoglobina e del glucosio.

4. URINOCOLTURA

RACCOLTA DEL MITTO INTERMEDIO – URINE DA SACCHETTO – URINE DA CATETERE PERMANENTE

MODALITA' DI RACCOLTA: Contenitore sterile con tappo a vite, deve essere effettuata prima della terapia antibiotica; è preferibile la prima urina del mattino.

DONNE E UOMO

- ✓ lavare con cura le mani
- ✓ eseguire un'accurata pulizia dei genitali esterni con acqua e sapone (no antisettici) e poi asciugare.
- ✓ raccogliere l'urina del getto intermedio nel contenitore tenendolo dall'esterno
- ✓ riavvitare il tappo nel contenitore e portarlo subito in laboratorio o conservarlo a 4°C per non più di 6 ore.

BAMBINI:

MATERIALE PER LA RACCOLTA: sacchetto di plastica adesivo sterile

MODALITA' DI RACCOLTA:

Per i bambini, nei primi mesi di vita, si possono utilizzare gli appositi sacchetti sterili. Dopo la raccolta il sacchetto va ripiegato e posto all'interno del contenitore sterile, senza versarlo. I campioni devono pervenire in Laboratorio entro 1 ore dalla raccolta se tenuti a temperatura ambiente, non oltre le 6 ore se conservati in frigorifero. - N.B.: I contenitori monouso si possono ritirare presso il Laboratorio Analisi

- ✓ detergere accuratamente la regione sovra pubica e perianale ed i genitali esterni con acqua e sapone, risciacquare ed asciugare
- ✓ applicare il sacchetto facendolo aderire al perineo ed alla regione sovra pubica
- ✓ avvenuta la minzione rimuovere il sacchetto e chiuderlo ermeticamente
- ✓ non lasciare adesivo il sacchetto per più di 45 minuti. Se necessario procedere alla sostituzione ripetendo la pulizia.
- ✓ inviare entro 1 ora in laboratorio o conservarlo a 4°C per non più di 6 ore.

URINE DA CATETERE PERMANENTE

- ✓ Non sconnettere mai il catetere per raccogliere le urine
- ✓ lavarsi accuratamente le mani, asciugarle con cura e indossare guanti non sterili
- ✓ disinfettare dispositivo del catetere predisposto per il prelievo
- ✓ clampare il catetere subito a valle del dispositivo di prelievo
- ✓ raccordare sterilmente alla siringa sterile monouso da 5 ml l'ago sottile.

5. TAMPONE URETRALE

PREPARAZIONE DEL PAZIENTE: il prelievo deve essere eseguito prima dell'inizio di qualsiasi terapia antimicrobica

DONNE: dopo l'accettazione in Laboratorio il prelievo viene eseguito da personale di Ostetricia.

UOMINI: ritirare i Tamponi e/o Vetrino in Laboratorio. Il prelievo deve essere eseguito al mattino prima della minzione. Non devono essere effettuati lavaggi esterni il mattino prima dell'esame. Se c'è secrezione purulenta prelevare il materiale con un Tampone e strisciare sul Vetrino, quindi l'altro Tampone inserirlo per alcuni cm nel meato uretrale e compiere delle piccole rotazioni. Reinsere il Tampone nel terreno di trasporto.

	UOC PATOLOGIA CLINICA URBINO ELENCO PRESTAZIONI	ALL03GdSlaboU001_ORG	Pag. 3 di 112
		Verifica Dr. E. Berselli-RAQ	Rev 06 del 18/04/2025
		Approvazione Dr. S. Barocci- Direttore UOC	

CONSERVAZIONE E TRASPORTO: dopo il prelievo, il tampone viene inserito nell'apposito contenitore fornito dal Laboratorio e consegnato quanto prima agli operatori.

6. TAMPONE VAGINALE

Il prelievo viene eseguito dal Personale di Ostetricia nei giorni stabiliti (vedi tabella Prestazioni Eseguite) poi viene effettuata l'accettazione in Laboratorio.

7. TAMPONE AURICOLARE, TAMPONE OCULARE E TAMPONE DEI SENI PARANASALI

Sono eseguiti dai Medici delle branche specialistiche in oggetto o presso il punto prelievo del laboratorio analisi.

8. RACCOLTA URINE DELLE 24 ORE

Alle ore 7.00 del mattino precedente la consegna delle urine alla Segreteria del Laboratorio, svuotare la vescica e gettare le urine. Da questo momento raccogliere in un contenitore pulito tutte le urine emesse, comprese quelle delle ore 7.00 del mattino successivo. Prima dell'inizio della raccolta contattare il laboratorio per modalità particolari di raccolta.

Durante il periodo della raccolta le urine devono essere **conservate in frigorifero**.

Al termine della raccolta, agitare il contenitore e riempire la provetta, su cui vanno scritti **nome cognome del paziente e volume delle urine emesse nelle 24 ore**.

Le singole analisi sono riportate in tabelle, le tabelle sono organizzate in colonne che comprendono:

Colonna 1	Codice Nazionale
Colonna 2	Codice CUP
Colonna 3	Codice di accettazione interno (UOC Patologia Clinica)
Colonna 4	Denominazione dell'esame, compresi eventuali sinonimi. Gli esami sono posti in ordine alfabetico
Colonna 5	Materiale biologico su cui si effettua l'esame
Colonna 6	Provetta/Contenitore da usare
Colonna 7	Indicazioni particolari su preparazione del paziente, modalità di prelievo, conservazione e trasporto del materiale biologico.
Colonna 8	Laboratorio di esecuzione/Giorni di spedizione
Colonna 9	Giorni di esecuzione: lu=lunedì, ma=martedì, me=mercoledì, gi=giovedì, ve=venerdì, sa=sabato
Colonna 10	Giorni di attesa del referto riferita al Laboratorio che effettua l'esame

La maschera grigia evidenzia gli esami inviati in "Service" (Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, Ast Pesaro Urbino, sede di Pesaro e Fano e Ast Ancona sede di Loreto.)

La maschera grigia chiaro evidenzia gli allergeni che è possibile testare nel Laboratorio del U.O.C di Patologia Clinica di Urbino; per quelli evidenziati in bianco il paziente dovrà recarsi personalmente presso i laboratori che li eseguono previo appuntamento (es. Laboratorio Analisi di Fano).

PRESTAZIONI ESEGUITE

(Evidenziate in grigio scuro le prestazioni inviate in altre strutture in service)

Per alcune prestazioni il catalogo prevede le diverse tipologie di campione sul quale effettuare l'accertamento:

/U = urine campione spontanee

/S = siero

/dU = urine 24 ore

LIQUIDI = dosaggio su altri liquidi biologici

COD. NAZIONALE	COD CUP	COD. LAB.	ANALISI	MATERIALE BIOLOGICO	CONTENITORE PER IL PRELIEVO	PRELIEVO CONSERVAZIONE TRASPORTO	LUOGO DI ESECUZIONE GIORNI DI SPEDIZIONE	GIORNI DI ESECUZIONE	GIORNI ATTESA REFERITO
			ACE			VEDI Angiotensin Converting Enzyme			
90.01.5	700513	182	Acidi Biliari Metodo: Enzimatico Colorimetrico	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
91.5R.3	700676	99998	Acidi organici su urine	URINE	Provetta URINE	Se le urine non vengono inviate il giorno della raccolta, vanno congelate.	VILLA MARIA Malattie Metaboliche c/o Salesi		30
			Acido Folico Metodo: Immunoenzimatico ChLIA			VEDI FOLATO			
			Acido 5-Idrossi 3-Indolacetico (5HIA)	URINE 24 h Acidificate		VEDI SEROTONINE/dU			
90.02.5	700517	142	ACIDO LATTICO (Lattato) Metodo: Test Colorimetrico enzimatico	PLASMA SANGUE EPARINATO (per Pergola e Fossombrone)	Provetta tappo GRIGIA Provetta tappo VERDE (per Pergola e Fossombrone)	Prelievo eseguibile solo presso i punti prelievo dell'Ospedale di URBINO, PERGOLA e FOSSOMBRONE	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.17.C	721826	4903	Acido Micofenolico (MICOFEN) Metodo: Cedia	PLASMA	Provetta tappo ROSA	Eseguire il prelievo in paziente a riposo da almeno 30'. Il campione deve essere immerso in ghiaccio e portato subito in laboratorio. <u>Centrifugare e separare.</u> <u>Conservare a 4 ° - 8°C</u>	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma IMMUNOMETRIA		15
90.38.4	501243	4311	Acido omovanillico /dU Metodo: HPLC	URINE 24 h	Contenitore per raccolta URINE 24 h	Raccolta urine 24 ore secondo modalità standard. Ad inizio raccolta versare nel contenitore 10 ml di Acido Cloridrico 6N. Conservazione: 4° - 8°C	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma TOSSICOLOGIA		14
90.17.C	721780	417	Acido Valproico Metodo: Immunoenzimatico	SIERO	Provetta tappo GIALLO	Eseguire il prelievo a digiuno prima dell'assunzione del farmaco.	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
			ACTH			VEDI CORTICOTROPINA			

9047323	614877	4952	ADAMTS-13 attività Metodo: Elisa	PLASMA	Provetta tappo CELESTE	Conservazione: centrifugare, separare, congelare richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma IMMUNOLO GIA		25
9047323	614896	99500	ADAMTS-13 anticorpo inibitore Metodo: Elisa	PLASMA	Provetta tappo CELESTE	Conservazione: 4°- 8°C richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma IMMUNOLO GIA		25
91.12.B	701422	60289	Adeno DNA sangue intero (qualitativo) Metodo: PCR	SANGUE INTERO	Provetta tappo VIOLA GRANDE	Compilare scheda richiesta per infezioni respiratorie di sospetta natura virale. Prelevare il giorno prima dell'invio.	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma VIROLOGIA		7
91.12.B	711001	602892	Adeno DNA tampono faringeo Metodo: PCR	TAMPONE FARINGEO	TAMPONE DEDICATO (kit usato per covid-19)	Compilare scheda richiesta per infezioni respiratorie di sospetta natura virale. Prelevare il giorno prima dell'invio.	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma VIROLOGIA		7
91.12.B	7014266	602898	Adeno DNA feci (qualitativo)	FECI	Contenitore per Coprocoltura	Compilare scheda richiesta per infezioni respiratorie di sospetta natura virale. Prelevare il giorno prima dell'invio.	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma VIROLOGIA		7
			ADENOVIRUS FECI			VIRUS ADENOVIRUS ANTIGENI IMMUNOCROMATOGRAFIA FECI			

91.12.B	701427	602897	Adeno DNA tampone oculare Metodo: PCR	TAMPONE OCULARE	TAMPONE DEDICATO (kit usato per covid-19)	Compilare scheda richiesta per infezioni respiratorie di sospetta natura virale. Prelevare il giorno prima dell'invio.	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma VIROLOGIA		7
91.12.B	701437	602891	Adeno DNA urine Metodo: PCR	URINE	Contenitore per urine	Compilare scheda richiesta per infezioni respiratorie di sospetta natura virale. Prelevare il giorno prima dell'invio.	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma VIROLOGIA		7
90.04.1	700771	9141	ADIURETINA (ADH) (Provasopressina) Metodo: Trace	SIERO	Provetta tappo GIALLO		Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma IMMUNOMETRIA		15
90.03.6	500091	434	ADRENALINA NORADRENALINA /dU (Catecolamine urinarie) Metodo: HPLC-FLUOR	URINE 24 h	Contenitore per raccolta URINE 24 h	Raccolta urine 24 ore secondo modalità standard. Ad inizio raccolta versare nel contenitore 10 ml di Acido Cloridrico 6N . La raccolta va eseguita entro due giorni dalla partenza del campione ESEGUIRE DIETA INDICATA NELLA SCHEDA INFORMATIVA	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma TOSSICOLOGIA		15
90.03.6	500077	93201	ADRENALINA NORADRENALINA /P CLINO (Catecolamine Plasmatiche) Metodo: HPLC-FLUOR	PLASMA	Provetta tappo ROSA	prima del prelievo il paziente deve stare disteso 30 minuti Conservazione: congelare dopo separazione	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma TOSSICOLOGIA		25

90.03.6	500076	93202	ADRENALINA NORADRENALINA /P ORTO (Catecolamine Plasmatiche) Metodo: HPLC-FLUOR	PLASMA	Provetta tappo ROSA	prelevare il campione in ORTOSTATISMO senza fare camminare il paziente. Conservazione: congelare dopo separazione	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma TOSSICOLO GIA		25
			Agglutinine a freddo			Esame eseguibile presso il laboratorio analisi di Muraglia, previo appuntamento. Vista la modalità di prelievo dell'esame, non è possibile inviare il campione tramite corriere.			
90.04.5	700519	032	Alanina aminotran sferasi (ALT/GPT) Metodo: uv cinetico	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
			ALT/GPT			VEDI Alanina aminotran- sferasi			
90.33.4	701263	079	Albumina/dU Metodo: Test Immunoturbidimetrico	URINE	Contenitore per raccolta URINE 24 h	Raccolta urine 24 ore secondo modalità standard	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.05.1	700520	007	Albumina/S Metodo: Bromocresolo porpora	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.33.4	701264	110	Albumina/U Creatinina/U (microalbuminuria) Metodo: Test Immunoturbidimetrico	URINE	Provetta Urine	Urine del mattino.	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.05.3	700774	227	ALDOSTERONE CLINO /S	PLASMA	Provetta tappo ROSA	Il paziente deve seguire una dieta senza sale aggiunto per i 5 giorni che precedono l'esame. Effettuare il prelievo dopo aver tenuto il paziente disteso per almeno 2 ore. Eseguire il prelievo a temperatura ambiente. Le provette, devono essere portate in laboratorio il più velocemente possibile. In laboratorio <u>separare e congelare</u>	AST PESARO URBINO Sede Pesaro ma ve da Pergola lu me ve		30

90.05.3	700773	228	ALDOSTERONE ORTO /S	PLASMA	Provetta tappo ROSA	Il paziente deve seguire una dieta senza sale aggiunto per i 5 giorni che precedono l'esame . Eseguire il prelievo a <u>paziente in ortostatismo da almeno 20 min</u> . Eseguire il prelievo a temperatura ambiente. Le provette, devono essere portate in laboratorio il più velocemente possibile. In laboratorio <u>separare e congelare</u>	AST PESARO URBINO Sede Pesaro ma ve da Pergola lu me ve		30
90.05.3	700775	226	ALDOSTERONE URINARIO /dU Metodo: Chemiluminescenza	URINE 24 h	Contenitore per raccolta URINE 24 h	Il paziente deve seguire una dieta senza sale aggiunto per i 5 giorni che precedono l'esame . Raccolta urine 24 ore secondo modalità standard. CONGELARE	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma IMMUNOMETRIA		12
90.06.5	500205	9191	ALFA AMILASI ISOENZIMI. (Frazione pancreatica) Metodo: Colorimetrico	SIERO	Provetta tappo GIALLO	L'esame comprende: Alfa amilasi Amilasi pancreatica Amilasi salivare richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma BIOCHIMICA CLINICA		12
90.05.5	700777	162	Alfa Fetoproteina Metodo: Immunoenzimatico ChLIA	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.05.4	701249	884	Alfa 1 Antitripsina Metodo: Immunoturbidimetrico	SIERO	Provetta tappo GIALLO		Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma		10
90.06.1	701250	208	Alfa 1 Glicoproteina Acida /S Metodo: Immunoturbidimetrico	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.06.3	701253	9216	Alfa 2 Macroglobulina/s Metodo: Nefelometrico	SIERO	Provetta tappo GIALLO		Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma Lab. Analisi PROTEINE		10

			AMA			VEDI anticorpi anti Mitocondrio			
			AMH			VEDI ORMONE ANTIMULLERIANO			
90.06.4	700523	044	Amilasi/dU Metodo: colorimetrico cinetico	URINE 24 h	Contenitore per raccolta URINE 24 h	Raccolta urine 24 ore secondo modalità standard.	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.06.4	700526	042	Amilasi/S Metodo: Etildidene substrato protetto	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.06.5	500205	1304	Amilasi pancreatica Metodo: Colorimetrico	SIERO	Provetta tappo GIALLO		Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma BIOCHIMICA CLINICA		15
90.06.5	500210	1303	Amilasi salivare Metodo: Indiretta ami tot ami panc	SIERO	Provetta tappo GIALLO		Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma BIOCHIMICA CLINICA		15
90.07.3	700425	99996	AMINOACIDI TOTALI /dU	URINE 24h	Contenitore per raccolta URINE 24 h	IL CAMPIONE VA INVIATO AL CENTRO SCREENING Dott. Ciatti Per i bambini l'esame può essere eseguito su urine spontanee. Le urine vanno congelate e inviate in ghiaccio secco. Le urine spontanee se vengono raccolte prima della partenza del corriere, non vanno congelate.	AST PESARO URBINO Sede Fano ma ve da Pergola lu ma me gi ve sa		10
90.07.5	700528	098	Ammonio /P Metodo: Enzimatico GLDH	SANGUE INTERO	Provetta tappo ROSA	Paziente a digiuno dalla sera precedente e senza fumare nelle 8 ore precedenti l'esame. Il campione deve essere immerso in ghiaccio e portato subito in laboratorio.	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
			ANA			VEDI Anticorpi Anti Nucleo			

G8.03	721709	71076	ANAL.GEN. PER ALTRE NEOPLASIE MIELOPROLIFERATIVE (MDS/MPN) - SOSP. DIAGNOSTICO	SANGUE INTERO	2 Provetta tappo VIOLA GRANDE	Eseguire il prelievo il Lunedì. Conservazione: 4-8° C. Allegare copia impegnativa + MOD 26	AST PESARO URBINO Sede Pesaro ma da Pergola lu me		30
G1.01	720506	772006	ANAL.GEN. X Artrite Giovanile	SANGUE INTERO	Provetta tappo ROSA	Eseguire il prelievo il Lunedì. Conservazione: 4-8° C. ALLEGARE COPIA IMPEGNATIVA	AST PESARO URBINO Sede Pesaro ma ve da Pergola lu me ve		40
G1.01	720507	772007	ANAL.GEN. X Artrite in corso di malattie croniche intestinali	SANGUE INTERO	Provetta tappo ROSA	Eseguire il prelievo il Lunedì. Conservazione: 4-8° C. ALLEGARE COPIA IMPEGNATIVA	AST PESARO URBINO Sede Pesaro ma ve da Pergola lu me ve		40
G1.0210	721214	772014	ANAL.GEN. X Artrite psoriasica	SANGUE INTERO	Provetta tappo ROSA	Eseguire il prelievo il Lunedì. Conservazione: 4-8° C. ALLEGARE COPIA IMPEGNATIVA	AST PESARO URBINO Sede Pesaro ma ve da Pergola lu me ve		40
G1.01	720508	772008	ANAL.GEN. X Artrite reattiva	SANGUE INTERO	Provetta tappo ROSA	Eseguire il prelievo il Lunedì. Conservazione: 4-8° C. ALLEGARE COPIA IMPEGNATIVA	AST PESARO URBINO Sede Pesaro ma ve da Pergola lu me ve		40
G1.01	720509	772009	ANAL.GEN. X Artrite Reumatoide	SANGUE INTERO	Provetta tappo ROSA	Eseguire il prelievo il Lunedì. Conservazione: 4-8° C. ALLEGARE COPIA IMPEGNATIVA	AST PESARO URBINO Sede Pesaro ma ve da Pergola lu me ve		40
G1.01	720510	772010	ANAL.GEN. X Bechet, Malattia di	SANGUE INTERO	Provetta tappo ROSA	Eseguire il prelievo il Lunedì. Conservazione: 4-8° C. ALLEGARE COPIA IMPEGNATIVA	AST PESARO URBINO Sede Pesaro ma ve da Pergola lu me ve		40

G1.01	720511	772011	ANAL.GEN. X Corioretinopatia tipo Birdshot	SANGUE INTERO	Provetta tappo ROSA	Eeguire il prelievo il Lunedì. Conservazione: 4-8° C. ALLEGARE COPIA IMPEGNATIVA	AST PESARO URBINO Sede Pesaro ma ve da Pergola lu me ve		40
G1.0210	721515	772015	ANAL.GEN. X Diabete Mellito Tipo 1	SANGUE INTERO	Provetta tappo ROSA	Eeguire il prelievo il Lunedì. Conservazione: 4-8° C. ALLEGARE COPIA IMPEGNATIVA	AST PESARO URBINO Sede Pesaro ma ve da Pergola lu me ve		40
G1.01	720631	71080	ANAL.GEN. X EMOCROMATOSI EREDITARIA	SANGUE INTERO	Provetta tappo ROSA	Eeguire il prelievo il Lunedì. Conservazione: 4-8° C. Allegare copia impegnativa + MOD 26	AST PESARO URBINO Sede Pesaro ma da Pergola lu me		30
G1.0210	721501	71079	ANAL.GEN. X EMOGLOBINOPATIE	SANGUE INTERO	Provetta tappo ROSA	Eeguire il prelievo il Lunedì. Conservazione: 4-8° C. Allegare copia impegnativa + MOD 26	AST PESARO URBINO Sede Pesaro ma ve da Pergola lu me ve		30
G8.02	721689	71073	ANAL.GEN. PER ERITROCITOSI - SOSP. DIAGNOSTICO	SANGUE INTERO	2 Provetta tappo VIOLA GRANDE	Eeguire il prelievo il Lunedì. Conservazione: 4-8° C. Allegare copia impegnativa + MOD 26	AST PESARO URBINO Sede Pesaro ma da Pergola lu me		30
G8.01	721670	71077	ANAL.GEN. X LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA - SOSP. DIAGNOSTICO	SANGUE INTERO	Provetta tappo ROSA	Eeguire il prelievo il Lunedì. Conservazione: 4-8° C. Allegare copia impegnativa + MOD 26	AST PESARO URBINO Sede Pesaro ma da Pergola lu me		30
G8.03	721728	71071	ANAL.GEN. PER LINFOMI A CELLULE T/NK - SOSP. DIAGNOSTICO	SANGUE INTERO	Provetta tappo ROSA	Eeguire il prelievo il Lunedì. Conservazione: 4-8° C. Allegare copia impegnativa + MOD 26	AST PESARO URBINO Sede Pesaro ma da Pergola lu me		30

G8.03	721726	71072	ANAL.GEN. PER LINFOMI A CELLULE T PERIFERICHE - SOSP. DIAGNOSTICO	SANGUE INTERO	Provetta tappo ROSA	Eeguire il prelievo il Lunedì. Conservazione: 4-8° C Allegare copia impegnativa + MOD 26	AST PESARO URBINO Sede Pesaro ma da Pergola lu me		30
G8.03	721721	71081	ANAL.GEN. PER LINFOMA MANTELLARE - SOSP. DIAGNOSTICO	SANGUE INTERO	Provetta tappo ROSA	Eeguire il prelievo il Lunedì. Conservazione: 4-8° C. Allegare copia impegnativa + MOD 26	AST PESARO URBINO Sede Pesaro ma da Pergola lu me		30
G8.03	721723	71082	ANAL.GEN. PER LINFOMI FOLLICOLARI - SOSP. DIAGNOSTICO	SANGUE INTERO	Provetta tappo ROSA	Eeguire il prelievo il Lunedì. Conservazione: 4-8° C. Allegare copia impegnativa + MOD 26	AST PESARO URBINO Sede Pesaro ma da Pergola lu me		30
G1.0210	721216	774030	ANAL.GEN. X Malattia Celiachia	SANGUE INTERO	Provetta tappo ROSA	Eeguire il prelievo il Lunedì. Conservazione: 4-8° C. ALLEGARE COPIA IMPEGNATIVA	AST PESARO URBINO Sede Pesaro ma ve da Pergola lu me ve		40
G8.03	721711	71083	ANAL.GEN. PER MIELOMA MULTIPLO E GAMMOPATIE MONOCLONALI -SOSP. DIAGNOSTICO	SANGUE INTERO	Provetta tappo ROSA	Eeguire il prelievo il Lunedì. Conservazione: 4-8° C. Allegare copia impegnativa + MOD 26	AST PESARO URBINO Sede Pesaro ma da Pergola lu me		30
G1.01	720512	772012	ANAL.GEN. X Narcolessia	SANGUE INTERO	Provetta tappo ROSA	Eeguire il prelievo il Lunedì. Conservazione: 4-8° C. ALLEGARE COPIA IMPEGNATIVA	AST PESARO URBINO Sede Pesaro ma ve da Pergola lu me ve		40
G8.01	721672	71074	ANAL.GEN. X POLICITEMIA VERA - SOSP. DIAGNOSTICO	SANGUE INTERO	2 Provetta tappo VIOLA GRANDE	Eeguire il prelievo il Lunedì. Conservazione: 4-8° C. Allegare copia impegnativa + MOD 26	AST PESARO URBINO Sede Pesaro ma da Pergola lu me		30

G1.01	7205123	772013	ANAL.GEN. X Reiter, Sindrome di	SANGUE INTERO	Provetta tappo ROSA	Eeguire il prelievo il Lunedì. Conservazione: 4-8° C. ALLEGARE COPIA IMPEGNATIVA	AST PESARO URBINO Sede Pesaro ma ve da Pergola lu me ve		40
G1.01	720514	772018	ANAL.GEN. X Sacroileite	SANGUE INTERO	Provetta tappo ROSA	Eeguire il prelievo il Lunedì. Conservazione: 4-8° C. ALLEGARE COPIA IMPEGNATIVA	AST PESARO URBINO Sede Pesaro ma ve da Pergola lu me ve		40
G1.01	720516	772016	ANAL.GEN. X Spondilite Anchilosante	SANGUE INTERO	Provetta tappo ROSA	Eeguire il prelievo il Lunedì. Conservazione: 4-8° C. ALLEGARE COPIA IMPEGNATIVA	AST PESARO URBINO Sede Pesaro ma ve da Pergola lu me ve		40
G1.01	720517	772017	ANAL.GEN. X Uveite	SANGUE INTERO	Provetta tappo ROSA	Eeguire il prelievo il Lunedì. Conservazione: 4-8° C. ALLEGARE COPIA IMPEGNATIVA	AST PESARO URBINO Sede Pesaro ma ve da Pergola lu me ve		40
G1.01	720515	772019	ANAL.GEN. X Sclerosi multipla	SANGUE INTERO	Provetta tappo ROSA	Eeguire il prelievo il Lunedì. Conservazione: 4-8° C. ALLEGARE COPIA IMPEGNATIVA	AST PESARO URBINO Sede Pesaro ma ve da Pergola lu me ve		40
G8.02	721696	71075	ANAL.GEN. PER TROMBOCITEMIA ESSENZIALE - SOSP. DIAGNOSTICO	SANGUE INTERO	2 Provetta tappo VIOLA GRANDE	Eeguire il prelievo il Lunedì. Conservazione: 4-8° C. Allegare copia impegnativa + MOD 26	AST PESARO URBINO Sede Pesaro ma da Pergola lu me		30
9129241	29181	1943	ANALISI QUALITATIVA PER L'IDENTIFICAZIONE DELLA MUTAZIONE V617F DEL GENE JAK2	SANGUE INTERO	2 Provette tappo VIOLA GRANDE	Eeguire il prelievo il Lunedì. Conservazione: 4-8° C. Allegare sempre copia impegnativa + modello 26 richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	AST PESARO URBINO Sede Pesaro ma da Pergola lu me		40
			c-ANCA/PR3 c-ANCA/MPO			VEDI Anticorpi anti citoplasma dei neutrofili			

90.17.E	700853	500	Angiotensin Converting Enzime (ACE)	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Pesaro ma ve da Pergola lu me ve		12
			Anticorpi Anti Amoeba			VEDI ENTAMOEBIA HISTOLYTICA ANTICORPI			
91.12.2	701389	33335	ANTICORPI ANTI ASPERGILLO Metodo: Elisa	SIERO	Provetta tappo GIALLO		Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma MICROBIOLOGIA	ma ve	15
90.49.6	501696	564	ANTICORPI ANTI B2 GLICOPROTEINA I (GPI) IgG e IgM Metodo: CLIA	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		30
90.47.5	700463	563	ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA IgG + IgM Metodo: Feia	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		30
90.48.1	700465	412	ANTICORPI ANTI CELLULE PARIETALI GASTRICHE (APCA)	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		30
			Anticorpi Anti Chlamydia			VEDI CHLAMYDIA ANTICORPI			
			Anticorpi Anti Citomegalovirus			VEDI VIRUS CITOMEGALOVIRUS ANTICORPI			
90.48.2	700466	3115	Anticorpi Anti Citoplasma dei Neutrofili (c-ANCA /PR3) Metodo: FEIA	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		30
90.48.2	700467	3116	Anticorpi Anti Citoplasma dei Neutrofili (p-ANCA /MPO) Metodo: FEIA	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		30
			Anticorpi Anti Coxiella Burneti			COXIELLA BURNETI ANTICORPI Ig e IgM			

90.52.5	700480	994906	ANTICORPI ANTI CUORE Metodo: Immunofluorescenza indiretta	SIERO	Provetta tappo GIALLO		Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma IMMUNOLOGIA		25
91.40.g	509074	33336	Anticorpi Anti Cute quantit. (Desmogleine + BP) Metodo: Immunofluorescenza indiretta	SIERO	Provetta tappo GIALLO		Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma IMMUNOLOGIA		25
90.48.3	700468	411	ANTICORPI ANTI DNA NATIVO Metodo: IFI	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		30
90.47.E	700492	4381	ANTICORPI ANTI ENDOMISIO (IgA) IMMUNOFLUORESCENZA /S Metodo: IFI	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		30
			Anticorpi Anti Epatite Delta Metodo: EIA competitiva			VEDI VIRUS EPATITE DELTA. La Virologia di Ancona esegue l'esame solo se Hbsag risulta positivo			
90.49.3	701319	906	ANTICORPI ANTI ERITROCITI [Test di Coombs indiretto]	PLASMA	Provetta tappo VIOLA GRANDE		CENTRO TRASFUSIONALE URBINO		2
90.49.3	701320	9061	ANTICORPI ANTI ERITROCITI [Test di Coombs indiretto]	PLASMA	Provetta tappo VIOLA GRANDE	CODICE UTILIZZATO PER I DONATORI	CENTRO TRASFUSIONALE FANO		2
91.10.7	701226	4911	ANTICORPI ANTI FILARIA Metodo: Immunocromatografico	SIERO	Provetta tappo GIALLO		Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma SIEROLOGIA		15

			Anticorpi Anti GAD			VEDI anticorpi anti GLUTAMMICARBOS-SILASI			
			Anticorpi Anti gangliosimi			VEDI ANTICORPI ANTI GM1			
90.49.5	701321	436	ANTICORPI ANTI GLIADINA IgA Metodo: FEIA	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		30
90.49.5	701322	4360	ANTICORPI ANTI GLIADINA IgG Metodo: FEIA	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		30
90.49.7	700493	360	ANTICORPI ANTI GLUTAMMICARBOSSI LASI /S (ANTI-GAD) Metodo: Chemiluminescenza	SIERO	Provetta tappo GIALLO		Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma IMMUNOMETRIA		15
90.47.G	700495	33333	ANTICORPI ANTI GM1 (MONOSIALOGLIANGLIO SIDE) Metodo: DOT-BLOT	SIERO	Provetta tappo GIALLO		Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma SIEROLOGIA		25
			Anticorpi Anti HEV			VEDI VIRUS EPATITE E ANTICORPI	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma VIROLOGIA		
			Anticorpi Anti HTLV			VEDI VIRUS HTLV 1-2 ANTICORPI ANTI HTLV 1-2			
90.51.1	700497	33334	ANTICORPI ANTI IA2 (antigeni solubili citoplasmatici beta cellule pancreatiche) Metodo: Chemiluminescenza	SIERO	Provetta tappo GIALLO		Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma IMMUNOMETRIA		21

90.16.6	700857	9372	ANTICORPI ANTI INFLIXIMAB Metodo: Elisa	SIERO	Provetta tappo GIALLO		Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma IMMUNOMETRIA		20
90.50.5	700469	363	ANTICORPI ANTI INSULA PANCREATICA (ICA) Metodo: Chemiluminescenza	SIERO	Provetta tappo GIALLO		Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma IMMUNOMETRIA		15
90.51.1	700470	869	ANTICORPI ANTI INSULINA (AIAA) Metodo: Chemiluminescenza	SIERO	Provetta tappo GIALLO		Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma IMMUNOMETRIA		15
90.95.2	503976	4842	ANTICORPI ANTI LEGIONELLA IgG Metodo: Elisa	SIERO	Provetta tappo GIALLO	richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma SIEROLOGIA		15
90.95.2	503975	4843	ANTICORPI ANTI LEGIONELLA IgM Metodo: Elisa	SIERO	Provetta tappo GIALLO	richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma SIEROLOGIA		15
			Anticorpi Anti Leptospira			VEDI LEPTOSPIRA ANTICORPI			
			Anticorpi Anti LESHMANIA			VEDI LEISHMANIA ANTICORPI			

90.51.3	700473	3601	Anticorpi Anti MAG /S (Myelin Associated Glycoprotein) Metodo: IFI	SIERO	Provetta Tappo GIALLO		Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma SIEROLOGIA		15
90.51.5	700475	580	ANTICORPI ANTI MICROSOMI EPATICI E RENALI (LKMA) Metodo: IFI	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		30
90.52.1	700476	409	Anticorpi anti Mitocondrio (AMA) Metodo: IFI	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		30
9047305		36003	Anticorpi Anti MOG (glicoproteina mielinica oligodendrocitaria) Metodo: Immunofluorescenza	SIERO	Provetta Tappo GIALLO	richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma SIEROLOGIA		15
90.52.2	700477	410	Anticorpi Anti Muscolo Liscio (ASMA)	SIERO	Provetta Tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		30
90.52.5	700490	9370	MUSK RECETTORE CHINASICO Metodo: IFI	SIERO	Provetta Tappo GIALLO		Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola la malMMUNOMETRIA		15
90.52.4	700479	408	Anticorpi Anti Nucleo (ANA) Metodo: IFI	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		30
			Anticorpi Anti Parotite			VEDI VIRUS PAROTITE ANTICORPI			
			Anticorpi Anti Parvovirus B19			VEDI VIRUS PARVOVIRUS ANTICORPI			
			Anticorpi Anti Peptide Citrullinato			VEDI CITRULLINA			

90.53.3	701324	9228	ANTICORPI ANTI PIASTRINE IDENTIFICAZIONE	SANGUE	1 Provette tappo VIOLA GRANDE 1 Provetta tappo ROSA	Conservazione 4°- 8°C <u>PRELEVARE IL GIORNO DELLA PARTENZA SOLO A URBINO</u> (sangue fresco)	CENTRO TRASFUSIO NALE PESARO gi		15
			Anticorpi Anti Plasmodium Falciparum			VEDI PLASMODIO FALCIPARUM ANTICORPI			
90.53.9	700499	905	Anticorpi anti-recettori Acetilcolina /S RIA (Acetilcolina) Metodo: Elisa	SIERO	Provetta tappo GIALLO	Conservazione: <u>centrifugare,</u> <u>separare, congelare</u>	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma IMMUNOME TRIA		25
90.53.5	501775	814	ANTICORPI ANTI RECETTORI TSH	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Fano ma ve da Pergola lu me ve		40
90.52.5	700839	81054	ANTICORPI ANTI SURRENE (ANTI-21 IDROSSILASI) Metodo: Elisa	SIERO	Provetta tappo GIALLO		Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma IMMUNOME TRIA		20
			Anticorpi Anti Rosolia			VEDI VIRUS ROSOLIA			
90.53.D	700003	5011	ANTICORPI ANTI- SACCHAROMYCES CEREVISIAE (ASCA) Ig G Metodo: FEIA	SIERO	Provetta tappo GIALLO		Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma SIEROLOGIA	ma ve	15
90.53.D	700004	5012	ANTICORPI ANTI- SACCHAROMYCES CEREVISIAE (ASCA) IgA Metodo: FEIA	SIERO	Provetta tappo GIALLO		Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma SIEROLOGIA	ma ve	15

			Anticorpi Anti Shigella			VEDI SHIGELLA ANTICORPI			
91.09.3	701244	25614	ANTICORPI ANTI STRONGYLOIDES IgG Metodo: Elisa	SIERO	Provetta tappo GIALLO		Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma SIEROLOGIA		15
90.54.4	700486	514	ANTICORPI ANTI-TIREOGLOBULINA Metodo: Immunoenzimatico ChLIA)	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.51.4	700474	513	ANTICORPI ANTI TIREOPEROSSIDASI (Ab TPO) Metodo: Immunoenzimatico ChLIA	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
			Anticorpi Anti Tossina Tetano			VEDI CLOSTRIDIUM TETANI ANTICORPI ANTITOSSINA IgG (TETANO)			
91.09.3	701243	9738	ANTICORPI TOXOCARA CANIS IgG EIA Metodo: Elisa+WB	SIERO	Provetta tappo GIALLO		Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma SIEROLOGIA		15
			Anticorpi Anti Toxoplasmosi			VEDI TOXOPLASMA ANTICORPI			
90.53.D	700505	562	ANTICORPI ANTI TRANSGLUTAMINASI IMMUNOMETRICO IgA Metodo: Feia	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		30
90.53.D	700506	5622	ANTICORPI ANTI TRANSGLUTAMINASI IMMUNOMETRICO IgG Metodo: Feia	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		30
90.53.D	501786	5623	ANTICORPI ANTI TRANSGLUTAMINASI (IgG, IgA). Per ciascuna determinazione	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		30
			Anticorpi Anti Trichinella Spiralis			VEDI TRICHINELLA SPIRALIS ANTICORPI			

91.09.3	701242	9359	Anticorpi anti TRYPANOSOMA CRUZI IgG Metodo: Elisa	SIERO	Provetta tappo GIALLO		Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma IMMUNOME TRIA		10
---------	--------	------	--	-------	---------------------------------	--	--	--	----

91.13.1	701377	9538	Anticorpi Anti Virus Dengue IgG Metodo: EIA indiretta	SIERO	Provetta tappo GIALLO	ALLEGARE SCHEDA ANAGRAFICA E CLINICA PER I SOSPETTI CASI DI DENGUE	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma VIROLOGIA		7
---------	--------	------	---	-------	---------------------------------	---	--	--	---

91.13.11	701376	9539	Anticorpi Anti Virus Dengue IgM Metodo: EIA indiretta	SIERO	Provetta tappo GIALLO	ALLEGARE SCHEDA ANAGRAFICA E CLINICA PER I SOSPETTI CASI DI DENGUE	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma VIROLOGIA		7
----------	--------	------	---	-------	---------------------------------	---	--	--	---

			Anticorpi Anti Yersinia			VEDI YERSINIA			
--	--	--	--------------------------------	--	--	----------------------	--	--	--

91.21.B	701549	3974	Anti HHV 8 IgG (HHV8) Metodo: Immunofluorescenza indiretta	SIERO	Provetta tappo GIALLO		Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma VIROLOGIA		12
---------	--------	------	---	-------	---------------------------------	--	--	--	----

9054403	505210	9373	ANTICORPI NEURONALI ANTI-HU (ANNA -1) Immunofluorescenza indiretta Metodo: IFI	SIERO	Provetta Tappo GIALLO	richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma SIEROLOGIA		15
---------	--------	------	--	-------	---------------------------------	--	---	--	----

9054402	505205	36004	ANTICORPI NEURONALI ANTI-RI (ANNA -2) Immunofluorescenza indiretta Metodo: IFI	SIERO	Provetta Tappo GIALLO	richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	AO Ancona ma ve da Pergola ma SIEROLOGIA		15
---------	--------	-------	--	-------	---------------------------------	--	---	--	----

90.52.1	700507	9374	ANTICORPI NEURONALI ANTI-YO Immunofluorescenza indiretta Metodo: IFI	SIERO	Provetta Tappo GIALLO		Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma SIEROLOGIA		15
			Anti PLA2 R			VEDI ANTICORPI RECETTORI FOSFOLIPAS			

9047305	505041	4909	ANTICORPI RECETTORI FOSFOLIPASI Metodo: IFI	SIERO	Provetta tappo GIALLO	richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma SIEROLOGIA		15
9113 COV2	507864	608153	ANTICORPI SARS-CoV-2 IgG anti-Spike trimerica Metodo: chemiluminescenza	SIERO	PROVETTA TAPPO GIALLO	TEST QUANTITATIVO in CHEMILUMINESCENZA (CLIA) Centrifugare Conservazione: 2-8° C fino a 4 giorni, oltre conservare a -20°C. Evitare congelamenti e scongelamenti ripetuti ESAME MOMENTANEAMENTE SOSPESO	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa do	2
90.55.1	700840	163	ANTIGENE CARBOIDRATICO 125 (CA 125) Metodo: Immuenzimatico ChLIA	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.55.2	700841	165	ANTIGENE CARBOIDRATICO 15.3 (CA 15.3) Metodo: Immuenzimatico ChLIA	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.55.3	700842	164	ANTIGENE CARBOIDRATICO 19.9 (CA 19.9) Metodo: Immuenzimatico ChLIA	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.56.3	700844	161	ANTIGENE CARCINO EMBRIONARIO (CEA) Metodo: Immuenzimatico ChLIA	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2

90.56.9	700845	190	ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO (PSA) Metodo: Immunoenzimatico ChLIA	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.56.9	700855	192	ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO (PSA) LIBERO Metodo: Immunoenzimatico ChLIA	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.56.9	710895	1900	ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO (PSA) - test riflesso Metodo: Immunoenzimatico ChLIA	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.47.3	700462	440	ANTICORPI ANTI ANTIGENI NUCLEARI ESTRAIBILI (ENA screening) Metodo: Immunoenzimatico	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		30
			Antigene Polipeptidico Tissutale			VEDI TPA			
			Antigene virus Respiratorio Sincinziale			VEDI VIRUS RESPIRATORIO SINCINZIALE (ANTIGENE)			
90.57.5	700642	240	Antitrombina III Metodo: Cromogenico	PLASMA	Provetta tappo CELESTE			lu ma me gi ve sa	2
90.08.4	701254	94181	APOLIPOPROTEINA ALTRA Metodo: Turbidimetrico	SIERO	Provetta tappo GIALLO		Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma BIOCHIMICA CLINICA		15
90.08.4	701255	94182	APOLIPOPROTEINA B Metodo: Turbidimetrico	SIERO	Provetta tappo GIALLO		Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma BIOCHIMICA CLINICA		15

			APCA			VEDI ANTICORPI ANTI CELLULE PARIETALI GASTRICHE			
			APCR			VEDI TEST DI RESISTENZA ALLA PROTEINA C ATTIVATA			
90.09.1	701256	239	Aptoglobina Metodo: Immuno- turbidimetrico	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		3
91.04.8	701228	999565	ASCARIS LUMBRICOIDES ANTICORPI Metodo: Elisa	SIERO	Provetta tappo GIALLO		Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma SIEROLOGIA		15
			ASMA			VEDI anticorpi anti Muscolo Liscio			
90.09.2	700529	030	Aspartato aminotran sferasi (AST/GOT) Metodo: Uv Cinetico	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
9083322	507470	4907	Aspergillo Antigene Diretto/S Metodo: Elisa	SIERO	Provetta tappo GIALLO	richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma MICROBIOLO GIA	ma ve	15
9083322	507471	3985	Aspergillo Antigene su BAL Metodo:Elisa	BAL	CONTENITORE URINOCOLTU RA	richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma MICROBIOLO GIA	ma ve	7
90.58.1	501865	823	ATTIVATORE TISSUTALE DEL PLASMINOGENO (tPA)	SIERO	Provetta tappo GIALLO	richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	AST PESARO URBINO Sede Pesaro ma ve da Pergola lu me ve		15

90.58.2	701326	9103	AUTOANTICORPI ANTI ERITROCITI [Test di Coombs diretto]	PLASMA	Provetta tappo VIOLA GRANDE	CODICE UTILIZZATO PER I DONATORI	CENTRO TRASFUSIONALE FANO		2
90.58.2	701326	910	AUTOANTICORPI ANTI ERITROCITI [Test di Coombs diretto]	PLASMA	Provetta tappo VIOLA GRANDE		CENTRO TRASFUSIONALE URBINO		2
			AST/GOT			VEDI aspartato aminotransferasi			
			AZOTO Metodo: Cinetico UV ureasi			VEDI UREA/S			
			AZOTO/dU			VEDI UREA/du			
9087402	507580	8031	BARTONELLA RICERCA ANTICORPI IgG e IgM Metodo: IFI	SIERO	Provetta tappo GIALLO		Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma SIEROLOGIA		15
			BETA CROSS-LAPS			VEDI TELOPEPTIDE C TERMINALE			

90.97.2	504019	92011	BETA-D-GLUCANO /S Metodo: CLIA	SIERO	Provetta tappo GIALLO	Prima di eseguire il prelievo accordarsi con la microbiologia di Torrette; è consigliato prelevare il campione il giorno prima della partenza. richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma MICROBIOLOGIA	ve	10
			BETA HCG			VEDI Gonadotropina corionica /S			
90.10.1	700780	013	Beta2-Microglobulina /S Metodo: Immuno-turbidimetrico	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu me ve	2
90.10.1	700781	894	Beta2-Microglobulina /U	URINE	Provetta Urine	CONGELARE.	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona		10

							ma ve da Pergola ma IMMUNOME TRIA		
90.10.7	500383	0081	Bilirubina Diretta Metodo: Colorimetrico fotometrico	SIERO	Provetta tappo GIALLO	non richiedibile con la totale	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.10.5	700531	008	Bilirubina Totale Metodo: Colorimetrico	SIERO	Provetta tappo GIALLO	non richiedibile con la diretta	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.10.5	700532	0083	BILIRUBINA REFLEX (cut-off >1 mg/dL salvo definizione di cut-off pi restrittivi a livello regionale.	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
			BNP			VEDI Peptide natriuretico cerebrale BNP immunometrico			
90.87.S	701018	35510	BORDETELLA ANTICORPI IgG (PERTOSSE) Metodo: Ag.Tox-FHA ELISA	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		15
90.87.4	503155	999561	BORDETELLA ANTICORPI IgM (PERTOSSE) Metodo: chemiluminescenza	SIERO	Provetta tappo GIALLO	ESAME NON PIU' ESEGUIBILE DAL 01/03/21	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma SIEROLOGIA		15
90.87.T	701021	5691	BORRELIA BURGDORFERI ANTICORPI IgG Metodo: EIA	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		15
90.87.T	701020	5692	BORRELIA BURGDORFERI ANTICORPI IgM Metodo: EIA	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		15
503201	90.87.T	5693	BORRELIA ANTICORPI IgG e IgM. Incluso: eventuale Immunoblotting	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		15
9120101	509610	660	BORRELIA BURGDORFERI ANTICORPI WESTERN BLOT Metodo: Elisa+WB	SIERO	Provetta tappo GIALLO	richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma SIEROLOGIA		15

90.87.T	503201	5693	BORRELIA ANTICORPI IgG e IgM. Incluso: eventuale Immunoblotting	SIERO	Provetta tappo GIALLO		Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma SIEROLOGIA		15
9087404	701150	36001	BRUCELLA ANTICORPI IgM IMMUNOMETRICO	SIERO	Provetta tappo GIALLO		Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma SIEROLOGIA	ma ve	10
90.88.2	701149	36002	BRUCELLA ANTICORPI IgG IMMUNOMETRICO	SIERO	Provetta tappo GIALLO		Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma SIEROLOGIA	ma ve	10
91.09.B	701632	9088	BK DNA VIRUS Metodo: Real Time PCR	SANGUE INTERO	Provetta tappo ROSA	<u>Prelevare il giorno della partenza</u>	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma VIROLOGIA		15
90.11.7	500438	069	CALCIO IONIZZATO determinazione diretta (su campione EGA)	SANGUE Eparinato	SIRINGA DEDICATA	Eseguire l'esame subito dopo il prelievo Il campione è prelevabile solo presso i punti prelievo di URBINO, PERGOLA e FOSSOMBRONE	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.11.4	700533	078	Calcio totale /dU Metodo: Colorimetrico-fotometrico	URINE 24 h	Contenitore per raccolta URINE 24 h	Raccolta urine 24 ore secondo modalità standard. Ad inizio raccolta versare nel contenitore 10 ml di Acido Cloridrico 6N.	AST PESARO URBINO Sede Urbino		
90.11.4	700534	780	Calcio totale/U Metodo: Colorimetrico-fotometrico	URINE	Provetta urine		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.11.4	700535	068	Calcio totale /S Metodo: colorimetrico fotometrico	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.11.5	711523	217	Calcitonina Metodo: Chemiluminescenza	SIERO	Provetta tappo GIALLO	Eseguire il test entro 2 ore oppure separare e congelare. TRASPORTO IN GHIACCIO	AST PESARO URBINO Sede Urbino	ma gi sa	10

90.12.1	700426	346	CALCOLI E CONCREZIONI	CALCOLI	Provetta Urine		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve	4
90.12.A	700883	581	CALPROTECTINA IMMUNOMETRICO /F (diagnosi precoce in M. Chron e Colite ulcerosa) Metodo: Chemiluminescenza	FECI	Contenitore per Coprocoltura	Emettere le feci su una superficie asciutta e ben pulita. Raccoglierne una modesta quantità con il cucchiaino dell'apposito contenitore.	AST PESARO URBINO Sede Urbino		15
9087414	507645	571	CAMPYLOBACTER JEJUNI ANTICORPI FC Metodo: RFC	SIERO	Provetta tappo GIALLO	richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma SIEROLOGIA		12
90.17.C	700717	421	Carbamazepina (Tegretol) Metodo: Immunodosaggio enzimatico	SIERO	Provetta tappo GIALLO	Eeguire il prelievo a digiuno prima dell'assunzione del farmaco.	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
			CD TECT			VEDI TRF % DEFICITARIA CARBOIDRATI			
			CELLULE PARIETALI GASTRICHE (APCA)			VEDI APCA			
90.12.5	701257	7406	Ceruloplasmina Metodo: Nefelometrico	SIERO	Provetta tappo GIALLO		Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma BIOCHIMICA CLINICA		15
90.88.G	503222	5705	CHLAMYDIA PNEUMONIAE ANTICORPI IgG e IgM. Incluso: IgA se IgM negative	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		15
90.89.1	503240	5702	CHLAMYDIE PNEUMONIAE ANTICORPI (E. I. A.) IgA Metodo: Chemiluminescenza CLIA	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		15

90.89.1	503245	5703	CHLAMYDIE PNEUMONIAE ANTICORPI (E. I. A.) IgG Metodo: Chemiluminescenza CLIA	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		15
90.89.1	503250	5704	CHLAMYDIE PNEUMONIAE ANTICORPI (E. I. A.) IgM Metodo: Chemiluminescenza CLIA	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		15
90.88.J	503224	97164	CHLAMYDIA TRACHOMATIS ANTICORPI IgG e IgM. Incluso: IgA se IgM negative	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		15
90.89.1	503255	97161	CHLAMYDIE TRACHOMATIS ANTICORPI (E. I. A.) IgA Metodo: Chemiluminescenza CLIA	SIERO	Provetta tappo GIALLO	richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	AST PESARO URBINO Sede Urbino		15
90.89.1	503260	97162	CHLAMYDIE TRACHOMATIS ANTICORPI (E. I. A.) IgG Metodo: Chemiluminescenza CLIA	SIERO	Provetta tappo GIALLO	richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	AST PESARO URBINO Sede Urbino		15
90.89.1	503250	97163	CHLAMYDIE TRACHOMATIS ANTICORPI (E. I. A.) IgM Metodo: Chemiluminescenza CLIA	SIERO	Provetta tappo GIALLO	richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	AST PESARO URBINO Sede Urbino		15
90.89.6	503374	169	CHLAMYDIE RICERCA DIRETTA. Non associabile a 90.93.C e 90.93.D (TAMPONE) Metodo: immunocromatografico	Materiale CERVICALE	TAMPONE apposito da ritirare in Laboratorio	Eeguire nelle donne il prelievo endocervicale previa rimozione di muco cervicale.	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	3
91.12.2	701413	3950	CHLAMYDIA TRACHOMATIS /U Metodo: PCR	URINE	Contenitore per URINOCOLTURA	Raccogliere il campione il giorno prima della partenza. Conservazione 4° C Se il campione non viene prelevato nei giorni indicati deve essere congelato.	AST PESARO URBINO Sede Pesaro ma ve da Pergola lu me ve esaro		15
			CIANOBALAMINA			VEDI VITAMINA B12			

90.17.C	700718	953	Ciclosporina Metodo: CMIA	SANGUE INTERO	Provetta tappo ROSA	Eseguire il prelievo subito prima della dose successiva. Prelevare il giorno prima della partenza. Conservazione: 4-8 °C	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma LAB. ANALISI FARMACI		5
90.13.A	700854	33340	CISTATINA C Metodo: Nefelometrico	SIERO	Provetta tappo GIALLO		Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma BIOCHIMICA CLINICA		10
91.39.4	509007	9199	CITOLOGICO URINE PER RICERCA CELLULE NEOPLASTICHE.	URINE	Kit composto da 3 provettoni contenuti CYTOSPIN (fissativo cellulare)	Per la raccolta attenersi alle istruzioni allegate al kit da ritirare presso i punti prelievo	AST Ancona Sede Loreto ve		20
91.39.4	509007	9199	CITOLOGICO URINE PER RICERCA CELLULE NEOPLASTICHE. Per pazienti di <u>PERGOLA</u> e <u>FOSSOMBRONE</u>	URINE	3 Provette da Urina	Tre campioni effettuati a giorni alterni come da richiesta del medico. Raccogliere in una provetta da 10 ml l'urina della seconda minzione del mattino. Contrassegnare con nome e cognome la provetta, consegnando al laboratorio un campione al giorno (è preferibile l'invio immediato in laboratorio per evitare processi degenerativi). I giorni dedicati al ritiro sono: LUN- MER-VEN entro le 8:00.	AST PESARO URBINO Sede Pesaro lu me ve		20
			CITOLOGICO VERSAMENTI CAVITARI			VEDI ESAME CITOLOGICO DEI VERSAMENTI			
90.39.4	501266	4313	Citrato Urinario Metodo: Colorimetrico	URINE 24 h	Contenitore per raccolta URINE 24 h	Raccolta urine 24 ore secondo modalità standard. Congelare richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma BIOCHIMICA CLINICA		45

90.47.D	700487	9537	CITRULLINA PEPTIDE ANTICORPI Metodo: FEIA	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		30
90.17.C	700702	4314	Clobazam Metodo: HPLC	PLASMA	Provetta tappo VERDE	CENTRIFUGARE, SEPARARE E CONGELARE	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma TOSSICOLOGIA		15
90.17.C	700694	451	Clonazepam Metodo: HPLC	SIERO	Provetta tappo VERDE	CENTRIFUGARE, SEPARARE E CONGELARE	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma TOSSICOLOGIA		15
90.13.3	700538	9552	Cloro/dU Metodo: ISE indiretta	URINE 24 h	Contenitore per raccolta URINE 24 h	Raccolta urine 24 ore secondo modalità standard.	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.13.3	700536	062	Cloro/S Metodo: ISE indiretta	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.13.3	700537	95521	Cloro/U Metodo: ISE indiretta	URINE	Provetta Urine		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.91.1	503326	380	CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOSSINA NELLE FECI	FECI	Contenitore per Coprocoltura	Emettere le feci su una superficie asciutta e ben pulita. Raccoglierne una modesta quantità con il cucchiaino dell'apposito contenitore.	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	4
91.08.B	508396	5881	CLOSTRIDIUM TETANI ANTICORPI ANTITOSSINA IgG (TETANO) Metodo: Chemiluminescenza CLIA	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		15
90.17.C	700716	4905	CLOZAPINA Metodo: HPLC	PLASMA	Provetta tappo VERDE	CENTRIFUGARE, SEPARARE E CONGELARE	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma TOSSICOLOGIA		15

90.13.5	700785	188	COBALAMINA (VIT B12) /S Metodo: Immunoenzimatico ChLIA	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.14.1	700541	022	Colesterolo HDL Metodo: Test colorimetrico Enzimatico	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.13.C	504195	023	COLESTEROLO LDL /S Metodo: Test colorimetrico Enzimatico	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.14.3	700542	020	Colesterolo Totale Metodo: Test colorimetrico Enzimatico	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.09.2	700543	036	COLINESTERASI (PSEUDO-CHE) Metodo: Colorimetrico cinetico	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
			Colturale bile			VEDI ESAME CULTURALE BILE			
90.93.7	701138	9618	COLTURALE BRONCOLAVAGGIO (BAL) Metodo: Colturale	Broncoaspirato	Contenitore per Urinocoltura		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	6
			COLTURALE CAPELLO			VEDI COLTURALE DERMATOFITI. Ricerca completa batteri e lieviti patogeni. Se positivo, incluso: identificazione e antibiogramma			
90.93.3	701083	349	COLTURALE DERMATOFITI. Ricerca completa batteri e lieviti patogeni. Se positivo, incluso: identificazione e antibiogramma Metodo: Colturale	Capello	PIASTRA DI SABOURAUD	Il prelievo, eseguito dallo Specialista, viene consegnato direttamente dal paziente al Punto Prelievi. NOTA DI SEGRETERIA CAPELLO	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	15
90.93.3	701083	3101	COLTURALE DERMATOFITI. Ricerca completa batteri e lieviti patogeni. Se positivo, incluso: identificazione e antibiogramma Metodo: Colturale	Tampone Cavo Orale	TAMPONE con terreno di trasporto	NOTA DI SEGRETERIA CAVO ORALE	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	4
90.93.3	701083	3100	COLTURALE DERMATOFITI. Ricerca completa batteri e lieviti patogeni. Se positivo, incluso: identificazione e antibiogramma Metodo: Colturale	FECI	Contenitore per Coprocultura	Emettere le feci su una superficie asciutta e ben pulita. Raccoglierne una modesta quantità con il cucchiaino dell'apposito contenitore NOTA DI SEGRETERIA FECI	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	4

90.93.3	701080	347	COLTURALE ESSUDATO. Ricerca completa batteri e lieviti patogeni. Se positivo, incluso: identificazione e antibiogramma s (colturale pus) Metodo: Colturale	PUS	TAMPONE con terreno di trasporto	Nella scheda di richiesta indicare la sede di raccolta	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	6
90.93.3	701100	364	COLTURALE LIQUIDO ASCITICO Metodo: Colturale	Liquido ascitico	Siringa sterile + Contenitore per Urinocoltura	Prelevare con siringa sterile (circa 5 ml). Eliminare dalla siringa eventuali bolle d'aria. Trasferire il contenuto della siringa in un contenitore sterile con tappo a vite. Inviare subito in laboratorio.	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	6
90.93.L	503869	3661	COLTURALE LIQUIDO PERICARDICO	Liquido pericardico	Siringa sterile + Contenitore per Urinocoltura	Prelevare con siringa sterile (circa 5 ml). Eliminare dalla siringa eventuali bolle d'aria. Trasferire il contenuto della siringa in un contenitore sterile con tappo a vite. Inviare subito in laboratorio.	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	6
90.93.L	503869	341	COLTURALE LIQUIDO PERITONEALE Metodo: Colturale	Liquido peritoneale	Siringa/Tampone/Flaconi Emocoltura (per pazienti dializzati) Siringa sterile + Contenitore per Urinocoltura	Prelevare con siringa sterile (circa 5 ml). Eliminare dalla siringa eventuali bolle d'aria. Trasferire il contenuto della siringa in un contenitore sterile con tappo a vite. Inviare subito in laboratorio.	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	6
90.93.L	503869	368	COLTURALE LIQUIDO PLEURICO Metodo: Colturale	Liquido pleurico	Siringa sterile + Contenitore per Urinocoltura	Prelevare con siringa sterile (circa 5 ml). Eliminare dalla siringa eventuali bolle d'aria. Trasferire il contenuto della siringa in un contenitore sterile con tappo a vite. Inviare subito in laboratorio	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	4
90.93.4	701206	324	COLTURALE LIQUIDO SEMINALE Metodo: Colturale	SPERMA	Contenitore per Urinocoltura	Il liquido deve essere raccolto direttamente nel contenitore sterile. Inviare subito in Laboratorio.	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	4

90.93.3	701098	365	COLTURALE LIQUIDO SINOVIALE Metodo: Colturale	Liquido sinoviale	Siringa sterile + Contenitore per Urinocoltura	Prelevare con siringa sterile (circa 5 ml). Eliminare dalla siringa eventuali bolle d'aria. Trasferire il contenuto della siringa in un contenitore sterile con tappo a vite. Inviare immediatamente al laboratorio.	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	4
			Colturale PUS			VEDI COLTURALE ESSUDATO. Ricerca completa batteri e lieviti patogeni. Se positivo, incluso: identificazione e antibiogramma s			
90.93.3	507350	357	COLTURALE SCIACQUO CAVO ORALE Metodo: Colturale	Tampone Cavo Orale	TAMPONE con terreno di trasporto	richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	4
90.93.3	701066	320	COLTURALE TAMPONE AURICOLARE DX Metodo: colturale	Secreto MEATO ACUSTICO ESTERNO	TAMPONE con terreno di trasporto	Per otite media prelievo di competenza del medico specialista, salvo i casi con abbondante fuoriuscita di pus dal timpano perforato. Per otite esterna, prelevare il materiale dal condotto uditivo esterno.	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	4
90.93.3	701060	323	COLTURALE TAMPONE AURICOLARE SX Metodo: Colturale	Secreto MEATO ACUSTICO ESTERNO	TAMPONE con terreno di trasporto	Per otite media prelievo di competenza del medico specialista, salvo i casi con abbondante fuoriuscita di pus dal timpano perforato. Per otite esterna, prelevare il materiale dal condotto uditivo esterno.	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	4
90.93.3	503785	358	COLTURALE TAMPONE CERVICALE Metodo: Colturale	Secreto Cervicale	TAMPONE con terreno di trasporto	Inserire il tampone per circa 2 cm facendolo ruotare delicatamente. E' possibile conservare il tampone a T° ambiente per non più di 24 h. richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	4
90.93.3	701064	353	COLTURALE TAMPONE CONGIUNTIVALE DX Metodo: Colturale	Secreto Congiuntivale	TAMPONE con terreno di trasporto	Congiuntivite: raccogliere la secrezione della congiuntiva strofinando il tampone prima dell'instillazione di anestetici e/o antibiotici. Dacriocistite: se possibile, spremere dolcemente il sacco lacrimale e raccogliere con il tampone il materiale purulento.	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	4

90.93.3	701065	354	COLTURALE TAMPONE CONGIUNTIVALE SX Metodo: Colturale	Secreto Congiuntivale	TAMPONE con terreno di trasporto	Congiuntivite: raccogliere la secrezione della congiuntiva strofinando il tampone prima dell'instillazione di anestetici e/o antibiotici. Dacriocistite: se possibile, spremere dolcemente il sacco lacrimale e raccogliere con il tampone il materiale purulento.	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	4
90.93.3	701056	369	COLTURALE TAMPONE CUTANEO Metodo: Colturale	Tampone cute	TAMPONE con terreno di trasporto	E' possibile conservare il tampone, inserito nel suo terreno di trasporto, a T° Ambiente per non più di 24 h.	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	4
90.93.3	701119	314	TAMPONE TONSILLARE. ESAME COLTURALE ESSUDATO ORO-FARINGEO. Ricerca Streptococcus pyogenes [Streptococco beta emolitico g Metodo: Colturale	Secreto FARINGEO	TAMPONE con terreno di trasporto	E' possibile conservare il tampone, inserito nel suo terreno di trasporto, a T° Ambiente per non più di 24 h.	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	4
90.93..3	701096	610	COLTURALE TAMPONE FERITA CHIRURGICA Metodo: Colturale	Tampone ferita	TAMPONE con terreno di trasporto	E' possibile conservare il tampone, inserito nel suo terreno di trasporto, a T° Ambiente per non più di 24 h.	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	5
90.93.3	503845	356	COLTURALE TAMPONE LINGUALE Metodo: Colturale	Tampone lingua	TAMPONE con terreno di trasporto	E' possibile conservare il tampone, inserito nel suo terreno di trasporto, a T° Ambiente per non più di 24 h. richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	5
90.93.3	701059	322	COLTURALE TAMPONE NASALE Metodo: Colturale	Tampone nasale	TAMPONE con terreno di trasporto	E' possibile conservare il tampone, inserito nel suo terreno di trasporto, a T° Ambiente per non più di 24 h.	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	4
90.93.3	507330	3221	COLTURALE TAMPONE NASALE ASPERGILLUS Metodo: Colturale	Tampone nasale	TAMPONE con terreno di trasporto	E' possibile conservare il tampone, inserito nel suo terreno di trasporto, a T° Ambiente per non più di 24 h. richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024.	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	10
90.90.3	503645	633	COLTURALE TAMPONE NASALE per stafilococco aureo Metodo: Colturale	Tampone nasale	TAMPONE con terreno di trasporto	E' possibile conservare il tampone, inserito nel suo terreno di trasporto, a T° Ambiente per non più di 24 h. richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	4
90.93.3	701113	366	COLTURALE TAMPONE PREPUZIALE Metodo: Colturale	Tampone Prepuzio	TAMPONE con terreno di trasporto	Inserire il tampone per circa 2 cm facendolo ruotare delicatamente. E' possibile conservare il tampone a T° ambiente per non più di 24 h.	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	4
90.93.3	701057	318	COLTURALE TAMPONE RETTALE Metodo: Colturale	Tampone Rettale	TAMPONE con terreno di trasporto	Inserire il tampone per circa 2 cm facendolo ruotare delicatamente. E' possibile conservare il tampone a T° ambiente per non più di 24 h.	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	4

90.93.3	701057	315	COLTURALE TAMPONE RETTALE PER BIOPSIA Metodo: Colturale	Tampone Rettale	TAMPONE con terreno di trasporto	Inserire il tampone per circa 2 cm facendolo ruotare delicatamente. E' possibile conservare il tampone a T° ambiente per non più di 24 h.	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	4
90.86.3	507413	319	COLTURALE TAMPONE RETTALE PER CRE (Enterobatteri resistenti ai carbapenemi) Metodo: Colturale	Tampone Rettale	TAMPONE con terreno di trasporto	Inserire il tampone per circa 2 cm facendolo ruotare delicatamente. E' possibile conservare il tampone a T° ambiente per non più di 24 h. richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	4
90.93.3	701076	632	COLTURALE TAMPONE ULCERA Metodo: Colturale	Tampone Ferita	TAMPONE con terreno di trasporto	E' possibile conservare il tampone, inserito nel suo terreno di trasporto, a T° Ambiente per non più di 24 h.	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	4
90.93.3	701067	316	COLTURALE SECRETO URETRALE. Ricerca completa batteri e lieviti patogeni. Se positivo, incluso: identificazione e antibiogramma Metodo: Colturale	Secreto URETRALE	VETRINO e/o TAMPONI Appositi con terreno di trasporto	Ritirare i Tamponi e/o Vetrino in Laboratorio. Il prelievo deve essere eseguito prima dell'inizio di qualsiasi terapia e preferibilmente al mattino prima della minzione. Non devono essere effettuati lavaggi esterni il mattino prima dell'esame. Nell'uomo: se c'è secrezione purulenta prelevare il materiale con un Tampone e strisciare sul Vetrino, quindi con l'altro Tampone inserirlo per qualche cm nel meato uretrale e compiere delle piccole rotazioni. Reinserire il Tampone nel terreno di trasporto. Evitare shock termici nel trasporto.	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	4
90.93.3	701107	367	COLTURALE TAMPONE VULVARE Metodo: Colturale		TAMPONE con terreno di trasporto	Non effettuare lavaggi esterni ed interni prima dell'esame. Per il prelievo rivolgersi all'Ostetrica secondo il calendario esposto nei vari Punti Prelievo.	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	4
			Colturale Ungchie			VEDI MICETI ESAME COLTURALE UNGHIE			
90.93.3	503515	391	COLTURALE VERSAMENTO CAVITARIO Metodo: Colturale	VERSAMENTO	Contenitore per Urinocoltura	richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	4
90.60.2	701279	2371	COMPLEMENTO C3 Metodo: Immuno-turbidimetrico	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	3
90.60.2	701278	2372	COMPLEMENTO C4 Metodo: Immuno-turbidimetrico	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	3
90.60.1	505105	9086	COMPLEM. C1 INIBITORE FUNZIONALE (Metodo: Test cromogenico)	SANGUE INTERO	Provetta tappo CELESTE	DAL 20/12/24 IL CAMPIONE NON VIENE PIU' ESEGUITO	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma IMMUNOLOGIA		15

90.93.3	503720	99951	Controllo microbiologico ambiente	TAMPONE	TAMPONE	Esame utilizzato solo per monitoraggio banconi di lavoro	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	4
90.93.3	503720	999511	Controllo microbiologico ambiente INGRESSO VALVOLE	TAMPONE	TAMPONE	Esame ad uso esclusivo del U.O.S.D. Endoscopia Digestiva	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	12
90.93.3	503720	999512	Controllo microbiologico ambiente VALVOLE	TAMPONE	TAMPONE	Esame ad uso esclusivo del U.O.S.D. Endoscopia Digestiva	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	12
90.93.3	503720	999513	Controllo microbiologico ambiente ESTERNO ENDOSCOPIO E PUNTALE	TAMPONE	TAMPONE	Esame ad uso esclusivo del U.O.S.D. Endoscopia Digestiva	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	12
90.93.3	503720	999514	Controllo microbiologico ambiente LAVAGGIO CANALI INTERNI	LIQUIDO DI LAVAGGIO	LIQUIDO DI LAVAGGIO	Esame ad uso esclusivo del U.O.S.D. Endoscopia Digestiva	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	12
			Coprocultura			VEDI ESAME COLTURALE FECI			
91.08.A	508394	5891	CORYNEBACTERIUM DIFTERIAE IgG Metodo: Elisa	SIERO	Provetta tappo GIALLO	DIFTERITE	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma SIEROLOGIA		15
90.15.2	700786	214	CORTICOTROPINA /P (ACTH) (corticotropina/s)	PLASMA	Provetta tappo ROSA	Eseguire il prelievo in paziente a riposo da almeno 30'. Il campione deve essere immerso in ghiaccio e portato subito in laboratorio. <u>Separare e Congelare</u>	AST PESARO URBINO Sede Pesaro ma ve da Pergola lu me ve		15
90.15.3	700787	180	Cortisolo /S Metodo: Immunoenzimatico ChLIA	SIERO	Provetta tappo GIALLO	Sospendere terapie cortisoniche ed attività fisica 24 h prima del prelievo.	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.15.3	700789	99995	Cortisolo Salivare Metodo: chemiluminescenza	SALIVA	KIT DEDICATO	Prelevare il giorno prima della partenza del campione. Conservazione: 4-8°C IL KIT DEDICATO VA RITIRATO IN LABORATORIO Scaricare dal portale del Laboratorio, su documenti: modalità di raccolta del campione	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma IMMUNOMETRIA		10

90.15.3	700788	454	Cortisolo urine Metodo: Immunoenzimatico ChLIA	URINE 24 h	Contenitore per raccolta URINE 24 h	Raccolta urine 24 ore secondo modalità standard. Sospendere terapie cortisoniche ed attività fisica 24 h prima del prelievo.	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.90.G	701154	488	COXIELLA BURNETI ANTICORPI Ig e IgM Metodo: IFI	SIERO	Provetta tappo GIALLO		Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma SIEROLOGIA		15
			COXSACKIE			VEDI ENTEROVIRUS			
90.11.1	700783	221	C Peptide Metodo: Immunoenzimatico ChLIA	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	3
90.11.1	500395	2211	C Peptide DOPO COLAZIONE Metodo: Immunoenzimatico ChLIA	SIERO	Provetta tappo GIALLO	richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	3
90.15.4	700545	050	CREATINCHINASI (CPK o CK) Metodo: Test UV cinetico	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
			CPK			VEDI CREATINCHINASI			
90.16.4	700552	115	Creatinina Clearance Metodo: colorimetrico cinetico- metodo di Jaffé compensato	URINE 24 h + SIERO	Contenitore per raccolta URINE 24 h + Provetta tappo GIALLO	Raccolta urine 24 ore secondo modalità standard. Nelle ore precedenti l'inizio del periodo di raccolta, è opportuno far bere al paziente circa 500 ml di acqua. Eseguire sempre anche il prelievo ematico per dosaggio creatinina sierica.	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.16.3	700546	114	Creatinina/dU Metodo: Colorimetrico cinetico Jaffé	URINE 24 h	Contenitore per raccolta URINE 24 h	Raccolta urine 24 ore secondo modalità standard. Nelle ore precedenti l'inizio del periodo di raccolta, è opportuno far bere al paziente almeno 500 ml di acqua.	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.16.3	700550	014	Creatinina /S Metodo: Colorimetrico cinetico Jaffé	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.16.3	700548	1140	Creatinina/U Metodo: Colorimetrico cinetico Jaffé	URINE	Provetta URINE		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.61.1	701282	087	Crioglobuline TOT	SIERO	Provetta grande tappo ROSSO DEDICATA	Eseguire prelievo con provetta preriscaldata. Inviare subito in Laboratorio. Porre la provetta in termostato finchè coagula. Dopo centrifugazione separare il siero e conservarlo a 4° per 7 gg.	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	8

90.16.6	500621	650	CROMOGRANINA A /S Metodo: Trace	SIERO	Provetta tappo GIALLO		Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma IMMUNOME TRIA		15
			CTX			VEDI TELOPEPTIDE C-TERMINALE			
90.61.3	700847	831	CYFRA 21.1 Metodo: Eclia	SIERO	Provetta tappo GIALLO		Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma IMMUNOME TRIA		15
			DHEAS			VEDI DEIDROEPIANDROSTERO NE SOLFATO			
90.17.3	700791	198	DELTA 4 ANDROSTENE- DIONE Metodo: Chemiluminescenza	SIERO	Provetta tappo GIALLO		Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma IMMUNOME TRIA		12
90.17.C	700697	0941	DIAZEPAM Metodo: HPLC	PLASMA	Provetta tappo VERDE	CENTRIFUGARE, SEPARARE E CONGELARE	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma TOSSICOLO GIA		15
90.61.5	700643	285	D-Dimero Metodo: Test immunoturbidimetrico	PLASMA	Provetta tappo CELESTE		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.17.2	700790	197	DEIDROEPIANDRO STERONE SOLFATO (DEA-S) Metodo: Immunoenzimatico ChLIA	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2

90.17.C	700731	423	Digossina (Farmaci Digitalici) Metodo: Immunoenzimatico ChLIA	SIERO	Provetta tappo GIALLO	Eseguire prelievo preferibilmente 8-24 ore dopo l'assunzione del farmaco.	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
			Dintoina			VEDI FENITOINA			
91.47.C	720207	9013	DISORDINE LINFOPROLIFERATIVO CRONICO (SOSPETTO/ESORDIO) INSERIRE 3 MOLTEPLICITA'	SANGUE INTERO	Provetta tappo ROSA	Eseguire il prelievo il Lunedì e il Giovedì (per Pergola nei giorni di spedizione) Conservazione: 4°C approfondimento dell'esame PROFILO FENOTIPO LINFOCITARIO STANDAR da inserire in accettazione su richiesta del Laboratorio di Pesaro che esegue l'esame	AST PESARO URBINO Sede Pesaro ma ve da Pergola lu me ve		30
9128210	509700	9930	DNA ANALISI PER RICERCA APLOTIPO HLA II DQ2-DQ8 (ESTRAZIONE DNA, 2 PCR, PURIFICAZIONE, ELETTROFORESI IN GEL DI AGAROSIO) (TEST GENETICO PER LA CELIACHIA)	SANGUE INTERO	Provetta tappo ROSA	Eseguire il prelievo il Lunedì e il Giovedì. Conservazione: 4-8° C richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	AST PESARO URBINO Sede Pesaro ma ve da Pergola lu me ve		50
9129207	509745	71056	DNA ANALISI PER T CELL RECEPTOR delta (INCLUSA ESTRAZIONE, AMPLIFICAZIONE E RILEVAZIONE) (disordini linfoproliferativi)	SANGUE INTERO	Provetta tappo ROSA	Eseguire il prelievo il Lunedì. Conservazione: 4 °C Allegare sempre copia impegnativa + modello 26 richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	AST PESARO URBINO Sede Pesaro ma ve da Pergola lu me ve		15
9129262	29380	71006	DNA ANALISI PER RIARRANGIAMENTO GENICO DELLE CATENE PESANTI IMMUNOGLOBULINE (VDJ) (INCLUSA ESTRAZIONE, AMPLIFICAZIONE E RILEVAZIONE)	SANGUE INTERO	Provetta tappo ROSA	Eseguire il prelievo il Lunedì. Conservazione: 4 °C richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	AST PESARO URBINO Sede Pesaro ma ve da Pergola lu me ve		20
9129241	29180	71055	DNA ANALISI PER TRASLOCAZIONE 11;14 BCL1/JH (INCLUSA ESTRAZIONE, AMPLIFICAZIONE, RILEVAZIONE) (diagnosi e malattia minima residua dei Linfomi Non-Hodgkin Mantellari)	SANGUE INTERO	Provetta Tappo ROSA	Eseguire il prelievo il Lunedì. Conservazione 4° - 8°C Allegare sempre copia impegnativa + modello 26 richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	AST PESARO URBINO Sede Pesaro ma ve da Pergola lu me ve		40

9129242	509830	71005	DNA PCR PER BCL-2 MBR DNA ANALISI PER TRASLOCAZIONE 14;18 BCL2/JH TIPO MBR	SANGUE INTERO	Provetta Tappo ROSA	Eseguire il prelievo il Lunedì . Conservazione 4° - 8° Allegare sempre copia impegnativa + modello 26 richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	AST PESARO URBINO Sede Pesaro ma ve da Pergola lu me ve		40
9129263	509880	71054	DNA PCR PER BCL-2 MCR DNA ANALISI PER TRASLOCAZIONE 14;18 BCL2/JH TIPO MCR (INCLUSA ESTRAZIONE, RETROTRASCRIZIONE, AMPLIFICAZIONE, RILEVAZIONE) (diagnosi e malattia minima residua dei Linfomi Non-Hodgki	SANGUE INTERO	Provetta Tappo ROSA	Eseguire il prelievo il Lunedì . Conservazione 4° - 8°C Allegare sempre copia impegnativa + modello 26 richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	AST PESARO URBINO Sede Pesaro ma ve da Pergola lu me ve		40
9129209	509755	71093	<u>DNA ANALISI QUANTITATIVA PER TRASLOCAZIONE (9:22) BCR/ABL</u>	SANGUE INTERO	5 Provette Tappo ROSA	Eseguire il prelievo il Lunedì . Conservazione 4° - 8°C Allegare sempre copia impegnativa + modello 26 richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	AST PESARO URBINO Sede Pesaro ma ve da Pergola lu me ve		40
			DQ2-DQ8			VEDI ANAL.GEN. X Malattia Celiachia			
90.90.E	701051	99399	ECHINOCOCCO ANTICORPI IgG Metodo Elisa+ WB	SIERO	Provetta tappo GIALLO	Su indicazione del Laboratorio Analisi di Torrette insieme all' ECHINOCOCCO IgG va sempre accettato anche L'ECHINOCOCCO WESTERN BLOT	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma SIEROLOGIA		15
90.90.E	7011915	99400	ECHINOCOCCO ANTICORPI WESTERN BLOT Metodo: Elisa+WB	SIERO	Provetta tappo GIALLO	Accettare sempre insieme all'ECHINOCOCCO IgG	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma SIEROLOGIA		15
			ECHOVIRUS			VEDI ENTEROVIRUS			
90.17.D	700860	193	ELASTASI 1 PANCREATICA /F EIA Metodo: Elisa	FECI	Contenitore per Coprocultura		Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona		20

							ma ve da Pergola ma SIEROLOGIA		
90.62.2	711521	001	<p>EMOCROMO: ESAME EMOCROMOCITOMETRICO E CONTEGGIO LEUCOCITARIO DIFFERENZIALE Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV. Compreso eventuale controllo microscopico Metodo: Principio Coulter, Impedenziometrico</p>	SANGUE INTERO	Provetta tappo ROSA		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
			Emocromo in CPT	SANGUE INTERO	Provetta DEDICATA	<p>L'emocromo in CPT viene richiesto quando si sospetta una pseudotrombocitopenia.</p> <p>RITIRARE LA PROVETTA DEDICATA IN LABORATORIO, DA CONSERVARE IN FRIGO FINO AL MOMENTO DELL'UTILIZZO.</p> <p>In fase di accettazione inserire come codice di Laboratorio quello dell'emocromo (001) e attaccare l'etichetta prodotta nella provetta dedicata (provetta con polvere gialla)</p>	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.94.1	701121	3085	<p>EMOCOLTURA AEROBIOSI. ESAME CULTURALE DEL SANGUE [EMOCOLTURA]. Ricerca batteri aerobi, batteri anaerobi e lieviti. Per p Metodo: Colturale</p>	SANGUE INTERO	Flacone sottovuoto specifico TAPPO BLU	<p>Sgrassare la cute con alcool etilico 70% (o etere). Disinfettare la cute con Clorexina in soluzione alcolica per 2/4 min. Rimuovere l'eccesso di disinfettante con alcool. Preparare i flaconi per emocoltura rimuovendo il cappuccio e disinfettare con alcool. Prelevare 8 - 10 ml di sangue.</p>	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	8

90.94.1	701122	3086	EMOCOLTURA ANAEROBIOSI. ESAME COLTURALE DEL SANGUE [EMOCOLTURA]. Ricerca batteri aerobi, batteri anaerobi e lieviti. Per Metodo: Colturale	SANGUE INTERO	Flacone sottovuoto specifico TAPPO ORO	Sgrassare la cute con alcool etilico 70% (o etere). Disinfettare la cute con Clorexina in soluzione alcolica per 2/4 min. Rimuovere l'eccesso di disinfettante con alcool. Preparare i flaconi per emocoltura rimuovendo il cappuccio e disinfettare con alcool. Prelevare 8 - 10 ml di sangue.	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	8
90.94.1	503876	3084	EMOCOLTURA PEDIATRICA Pediatrica Ricerca completa microorganismi e lieviti patogeni Metodo: Colturale	SANGUE INTERO	Flacone UNICO sottovuoto specifico TAPPO ROSA	Sgrassare la cute con alcool etilico 70% (o etere). Disinfettare la cute con Clorexina in soluzione alcolica per 2/4 min. Rimuovere l'eccesso di disinfettante con alcool. Preparare i flaconi per emocoltura rimuovendo il cappuccio e disinfettare con alcool. Prelevare 1 - 3 ml di sangue. USO REPARTI	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	8
89.65.1	700509	141	EMOGASANALISI ARTERIOSA	SANGUE arterioso	Siringa Eparinata	PER PAZIENTI INTERNI Eeguire prelievo con apposita siringa, avendo cura di richiudere la stessa con il tappo in dotazione, spingere lo stantuffo fino a che il sangue viene a contatto con il filtro del tappo. PER PAZIENTI ESTERNI L'ESAME SI ESEGUE SU APPUNTAMENTO DA PRENDERE AL CUP	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	1
89.65.1	700510	1412	EMOGASANALISI CAPILLARE			PER PAZIENTI INTERNI	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	1
89.65.1	700511	1410	EMOGASANALISI VENOSA	SANGUE venoso	Provetta tappo VERDE	Per i pazienti esterni: il campione è prelevabile solo presso i punti prelievo dell'ospedale di Urbino, Pergola e Fossombrone	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	1
			ENA			VEDI ANTICORPI ANTI ANTIGENI NUCLEARI ESTRAIBILI			
90.18.4	700794	830	ENOLASI NEURONESPECIFICA (NSE) Metodo: Eclia	SIERO	Provetta tappo GIALLO		Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma IMMUNOME		15

							TRIA		
90.92.6	701053	4312	ENTAMOEBIA HISTOLYTICA ANTICORPI (EIA) Metodo: EIA	SIERO	Provetta tappo GIALLO		Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma SIEROLOGIA		14
90.93.2	721804	335	ENTEROBIUS VERMICULARIS (OSSIURI) ricerca microscopica su materiale perianale (SCOTCH TEST)		VETRINO	Applicare al mattino del nastro adesivo trasparente facendo pressione nella zona perianale non lavata e successivamente attaccarlo su un vetrino portaoggetti.	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	4
91.12.B	701464	60250	ENTEROVIRUS RNA sangue intero (compresi echovirus e coxsackie) Metodo: RT PCR	SANGUE INTERO	Provetta tappo ROSA	Compilare scheda richiesta per Infezioni respiratorie di sospetta natura virale. Prelevare il giorno prima della partenza. Conservazione 4° - 8° C	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma VIROLOGIA		3
91.12.B	509505	602501	ENTEROVIRUS RNA (compresi echovirus e coxsackie) Metodo: RT PCR	MATERIALI VARI	Contenitore sterile	Compilare scheda richiesta per Infezioni respiratorie di sospetta natura virale. Prelevare il giorno prima della partenza. Conservazione 4° - 8° C	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma VIROLOGIA		3
91.12.B	701497	602502	ENTEROVIRUS RNA PCR compresi echovirus e coxsackie) Metodo: RT PCR	LESIONI	Contenitore sterile	Compilare scheda richiesta per Infezioni respiratorie di sospetta natura virale. Prelevare il giorno prima della partenza. Conservazione 4° - 8° C	Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma VIROLOGIA		3
91.12.B	701458	602508	ENTEROVIRUS RNA feci (compresi echovirus e coxsackie) Metodo: RT PCR	FECI	Contenitore sterile	Compilare scheda richiesta per Infezioni respiratorie di sospetta natura virale. Prelevare il giorno prima della partenza. Conservazione 4° - 8° C	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma		3

							VIROLOGIA		
91.12.B	701457	602507	ENTEROVIRUS RNA liquido amniotico (compresi echovirus e coxsackie) Metodo: RT PCR	LIQUIDO AMNIOTICO	Contenitore sterile	Compilare scheda richiesta per Infezioni respiratorie di sospetta natura virale. Prelevare il giorno prima della partenza. Conservazione 4°- 8° C	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma VIROLOGIA		3
91.12.B	701459	602509	ENTEROVIRUS RNA liquido pleurico (compresi echovirus e coxsackie) Metodo: RT PCR	LIQUIDO PLEURICO	Contenitore sterile	Compilare scheda richiesta per Infezioni respiratorie di sospetta natura virale. Prelevare il giorno prima della partenza. Conservazione 4°- 8° C	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma VIROLOGIA		3
91.12.B	701478	602504	ENTEROVIRUS RNA tampone faringeo (compresi echovirus e coxsackie) Metodo: RT PCR	TAMPONE FARINGEO	TAMPONE	Compilare scheda richiesta per Infezioni respiratorie di sospetta natura virale. Prelevare il giorno prima della partenza. Conservazione 4°- 8° C	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma VIROLOGIA		3
90.63.2	701336	909	ERITROCITI: ANTIGENI NON ABO E NON RH. (Per ciascuno antigene)	PLASMA	Provetta tappo VIOLA GRANDE		C.T. URBINO lu ma me gi ve sa C.T. FANO da Pergola lu ma me gi ve sa		6
90.18.5	700795	886	Eritropoietina/S (EPO)	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Pesaro ma ve da Pergola lu me ve		15
91.39.D	720192	9198	ESAME CITOLOGICO DI VERSAMENTI	AGOASPIRATI, VERSAMENTI E LIQUOR CEFALORACHIDIANO	Contenitore per URINOCOLTURA	È preferibile prelevare i campioni il giorno prima della partenza. Conservazione in frigo: 2° - 8°C Allegare richiesta esame citodiagnostico per Anatomia Patologica Pesaro	Anatomia Patologica Pesaro ma ve da Pergola lu me ve		20
90.93.3	503510	340	ESAME CULTURALE BILE Metodo: Culturale	BILE	Contenitore per Urinocoltura	USO REPARTI	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	4

90.93.7	701138	9618	ESAME COLTURALE DEL BRONCOASPIRATO Metodo: Colturale	LIQUIDO	Contenitore per Urinocoltura		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	4
90.93.3	701086	345	ESAME COLTURALE CATETERE VASCOLARE Metodo: Colturale	CVC	Contenitore per Urinocoltura		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	6
90.94.3	701123	304	ESAME COLTURALE DELLE FECI [COPROCULTURA] Ricerca Salmonelle, Shigelle e Campylobacter Escluso: E. coli enteropatogeni, Yersinia, Vibrio cholerae Metodo: Colturale	FECI	Contenitore per Coprocotura	Emettere le feci su una superficie asciutta e ben pulita. Raccoglierne una modesta quantità con il cucchiaino dell'apposito contenitore.	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	6
90.94.2	503930	302	ESAME COLTURALE DELL' URINA [URINOCOLTURA]. Ricerca completa microrganismi e lieviti patogeni. Incluso: conta batterica Metodo: Colturale	URINE	Contenitore per Urinocoltura	Effettuare la raccolta prima di iniziare la terapia antibiotica. Utilizzare la prima urina del mattino o dopo 3-4 ore dall'ultima minzione. Lavare con acqua e sapone l'orifizio dell'uretra e la zona circostante e risciacquare con acqua. Raccogliere nel contenitore la seconda parte della minzione. Richiudere accuratamente il contenitore in modo che l'urina non fuoriesca.	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	4
90.93.3	701082	312	Esame colturale Escreato Metodo: Colturale	Espettorato	Contenitore per Urinocoltura	La quantità deve essere almeno di 2 mL. I campioni devono essere analizzati al più presto. E' possibile conservare a 4° C per non più di 2 ore dalla emissione.	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	6
90.93.3	503475	30298	ESAME COLTURALE FRAMMENTI CHIRURGICI	PEZZI ANATOMICI	Contenitore per Urinocoltura	USO REPARTI	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	4
90.93.3	503570	30299	ESAME COLTURALE MATERIALE VARIO	MATERIALE VARIO	Contenitore per Urinocoltura o TAMPONE	Indicare sempre nella nota di segreteria il tipo di materiale raccolto USO REPARTI	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	4
90.93.B	503862	338	ESAME MICROBIOLOGICO DEL SECRETO VAGINALE. Ricerca lieviti e Trichomonas. Non associabile a 91.10.A TRICHOMONAS VAGINALIS Metodo: Colturale	Secreto VAGINALE	TAMPONE con terreno di trasporto	Non effettuare lavaggi esterni ed interni prima dell'esame. Per il prelievo rivolgersi all'Ostetrica secondo il calendario esposto nei vari Punti Prelievo.	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	4
90.93.3	503515	391	ESAME COLTURALE VERSAMENTO CAVITARIO Metodo: Colturale	VERSAMENTO	Contenitore per Urinocoltura	USO REPARTI	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	4
90.19.2	700796	200	Estradiolo 17-Beta Metodo: Immunoenzimatico ChLIA	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2

90.20.1	701310	0151	ETANOLO Metodo: Enzimatico ADH	PLASMA	Provetta tappo VERDE	Test di screening a scopo clinico diagnostico da non usare ai fini medico-legali. Codice utilizzabile solo dai reparti.	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	1
90.17.C	700719	9353	Etosuccimide/S Metodo: Emit	PLASMA	Provetta tappo VERDE	CENTRIFUGARE E SEPARARE. Conservazione 4°- 8°C PRELEVARE IL LUN e GIOV se non inviati nei giorni dedicati CONGELARE	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma BIOCHIMICA CLINICA		15
90.17.C	700766	464	Everolimus/Sg Metodo: Turbidimetrico	SANGUE INTERO	Provetta tappo ROSA	Prelevare il giorno prima della partenza. Conservazione 4°- 8°C	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma LAB. ANALISI FARMACI		15
G1.91	721639	1940	FATTORE MTHFR ANALISI MUTAZIONE DNA CON PCR	SANGUE INTERO	Provetta tappo CELESTE	Effettuare il prelievo il Lunedì e il Giovedì (per Pergola nei giorni di spedizione). + foglio CONSENSO INFORMATO MOD.24 Conservazione 4°- 8°C	AST PESARO URBINO Sede Pesaro ma ve da Pergola lu me ve		25
G1.91	721840	20671	FATTORE ANALISI PER GENOTIPO MUTAZIONE MTHFR A1298 C	SANGUE INTERO	Provetta tappo CELESTE	Effettuare il prelievo il Lunedì e il Giovedì (per Pergola nei giorni di spedizione). + foglio CONSENSO INFORMATO MOD.24 Conservazione 4°- 8°C	AST PESARO URBINO Sede Pesaro ma ve da Pergola lu me ve		25
G1.91	721638	1942	FATTORE V (LEIDEN) ANALISI MUTAZIONE DNA CON PCR	SANGUE INTERO	Provetta tappo CELESTE	Effettuare il prelievo il Lunedì e il Giovedì (per Pergola nei giorni di spedizione). + foglio CONSENSO INFORMATO MOD.24 Conservazione 4°- 8°C	AST PESARO URBINO Sede Pesaro ma ve da Pergola lu me ve		25
G1.91	721842	1947	FATTORE V (APLOTIPO HR2) ANALISI MUTAZIONE DNA CON PCR	SANGUE INTERO	Provetta tappo CELESTE	Effettuare il prelievo il Lunedì e il Giovedì (per Pergola nei giorni di spedizione). + foglio CONSENSO INFORMATO MOD.24 Conservazione 4°- 8°C	AST PESARO URBINO Sede Pesaro ma ve da Pergola lu me ve		25
G1.91	721637	1941	FATTORE II ANALISI MUTAZIONE DNA CON PCR	SANGUE INTERO	Provetta tappo CELESTE	Effettuare il prelievo il Lunedì e il Giovedì (per Pergola nei giorni di spedizione). + foglio CONSENSO INFORMATO MOD.24 Conservazione 4°- 8°C	AST PESARO URBINO Sede Pesaro ma ve da Pergola lu me ve		25

90.64.3	700656	9202	FATTORE II (Dosaggio)	PLASMA	Provetta tappo CELESTE	Centrifugare e congelare. Plasma provetta dedicata	AST PESARO URBINO Sede Fano ma ve da Pergola lu ma me gi ve sa	50
90.64.3	700655	251	FATTORE IX (Dosaggio)	PLASMA	Provetta tappo CELESTE	Centrifugare e congelare. Plasma provetta dedicata	AST PESARO URBINO Sede Fano ma ve da Pergola lu ma me gi ve sa	50
90.64.3	700654	9235	FATTORE V (Dosaggio)	PLASMA	Provetta tappo CELESTE	Centrifugare e congelare. Plasma provetta dedicata	Lab. AST 1 Fano ma ve da Pergola lu ma me gi ve sa	50
90.64.3	700648	9203	FATTORE VII (Dosaggio)	PLASMA	Provetta tappo CELESTE	Centrifugare e congelare. Plasma provetta dedicata	AST PESARO URBINO Sede Fano ma ve da Pergola lu ma me gi ve sa	50
90.64.3	700653	250	FATTORE VIII (Dosaggio)	PLASMA	Provetta tappo CELESTE	Centrifugare e congelare. Plasma provetta dedicata	AST PESARO URBINO Sede Fano ma ve da Pergola lu ma me gi ve sa	50
90.64.3	700652	9026	FATTORE X (Dosaggio)	PLASMA	Provetta tappo CELESTE	Centrifugare e congelare. Plasma provetta dedicata	AST PESARO URBINO Sede Fano ma ve da Pergola lu ma me gi ve sa	50
			FATTORE DELLA COAGULAZIONE XA (attivato)	PLASMA		Esame eseguito presso il Laboratorio Analisi di Torrette. Il paz. deve recarsi personalmente a prelevare a Torrette in quanto il prelievo va analizzato nel più breve tempo possibile.	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona	
90.64.3	700651	9207	FATTORE XI (Dosaggio)	PLASMA	Provetta tappo CELESTE	Centrifugare e congelare. Plasma provetta dedicata	AST PESARO URBINO Sede Fano ma ve da Pergola lu ma me gi ve sa	50
90.64.3	700650	9208	FATTORE XII (Dosaggio)	PLASMA	Provetta tappo CELESTE	Centrifugare e congelare. Plasma provetta dedicata	AST PESARO URBINO Sede Fano ma ve da Pergola lu ma me gi ve sa	50
90.64.3	700649	9209	FATTORE XIII (Dosaggio)	PLASMA	Provetta tappo CELESTE	Centrifugare e congelare. Plasma provetta dedicata	AST PESARO URBINO Sede Fano ma ve da Pergola lu ma me gi ve sa	50
90.64.1	700647	9234	FATTORE VON WILLEBRAND	PLASMA	Provetta tappo CELESTE	Centrifugare e congelare. Plasma provetta dedicata	AST PESARO URBINO Sede Fano ma ve da Pergola lu ma me gi ve sa	50

90.64.2	502115	206	Fattore Reumatoide (Reuma Test) Metodo: Immunoturbidimetrico	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	4
90.17.C	700732	426	Fenitoina/S (Dintoina) Metodo: Chemiluminescenza	PLASMA	Provetta tappo VERDE	Eseguire il prelievo preferibilmente 2-4 ore dopo l'assunzione del farmaco. CENTRIFUGARE E SEPARARE Conservazione: 4-8 °C PRELEVARE IL LUN e GIOV se non inviati nei giorni dedicati CONGELARE	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma BIOCHIMICA CLINICA		15
90.17.C	700758	425	Fenobarbital (Luminale) Metodo: immunoenzimatico	SIERO	Provetta tappo GIALLO	Eseguire prelievo preferibilmente 6- 8 ore dopo l'assunzione del farmaco.	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.22.3	700799	177	Ferritina/S Metodo: Immunoenzimatico ChLIA	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.22.5	700566	018	Ferro (Sideremia) Metodo: Test colorimetrico)	SIERO	Provetta tappo GIALLO	Eseguire il prelievo al mattino a digiuno.	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.64.6	502147	2560	FIBRINOGENO CLAUSS Metodo: Test coagulativo	PLASMA	Provetta tappo CELESTE		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.17.C	700724	462	Flecainide Metodo: HPLC	PLASMA	Provetta tappo VERDE	CENTRIFUGARE, SEPARARE E CONGELARE	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma TOSSICOLO GIA		15
90.23.2	700800	189	FOLATO /S (ACIDO FOLICO) Metodo: Immunoenzimatico ChLIA	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.23.3	700802	178	FOLLITROPINA (FSH) /S Metodo: Immunoenzimatico ChLIA	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.23.5	700558	034	Fosfatasi Alcalina Metodo: Colorimetrico cinetico	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.24.1	700627	9021	FOSFATASI ALCALINA ISOENZIMI /S Metodo: Elettroforesi	SIERO	Provetta tappo GIALLO		Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma LAB. ANALISI PROTEINE		15

90.24.1	700803	9121	FOSFATASI ALCALINA ISOENZIMA OSSEO Metodo: Elettroforesi	SIERO	Provetta tappo GIALLO		Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma IMMUNOMETRIA		15
90.24.3	700564	080	Fosforo /dU Metodo: Fotometrico UV	URINE 24 h	Contenitore per raccolta URINE 24 h	Raccolta urine 24 ore secondo modalità standard. Ad inizio raccolta versare nel contenitore 10 ml di Acido Cloridrico 6N.	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.24.3	700562	070	Fosforo/S Metodo: Fotometrico UV	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.24.3	700563	081	Fosforo/U Metodo: Fotometrico UV	URINE	Provetta Urine		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.94.6	503971	3222	FRANCISELLA TULARENSIS [TULAREMIA] ANTICORPI	SIERO	Provetta tappo GIALLO		Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma SIEROLOGIA		10
			FSH			VEDI FOLLITROPINA			
			FT3			VEDI TRIODOTIRONINA LIBERA			
			FT4			VEDI TIROXINA LIBERA			
90.17.B	700760	9980	GABAPENTINA /P Metodo: HPLC	PLASMA	Provetta tappo VERDE	CENTRIFUGARE E SEPARARE. Conservare a 4°- 8°C PRELEVARE IL LUN e GIOV se non inviati nei giorni dedicati CONGELARE	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma BIOCHIMICA CLINICA		12
			GALATTOMANANO			VEDI Anticorpi anti ASPERGILLO			

9001118	22470	9358	GALATTOSIDASI ALFA LEUCOCITI Metodo: fluorimetrico	PLASMA	3 Provette tappo VERDE	Prelevare tre provette tappo verde il giorno della partenza del campione e conservare a temperatura ambiente. Per prestazioni esterne allegare fotocopia dell'impegnativa, apposito modulo per ricevere la risposta via mail e la scheda informativa per le indagini metaboliche. PER MAGGIORI CHIARIMENTI CONTATTARE LA SEGRETERIA DEL LAB. ANALISI. Esame eseguibile solo presso il punto prelievi di Urbino richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	VILLA MARIA Malattie Metaboliche c/o Salesi		15
90.25.5	700565	040	GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASI (gamma GT) /S Metodo: Colorimetrico cinetico	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
			GARDENELLA	TAMPONE VAGINALE	Tampone con terreno di trasporto	Dip. Lab. AV1 ESAME NON CODIFICATO, SCRIVERE SULL'ETICHETTA A PENNA. N.B. il germe non può essere ricercato su l'uomo.	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	4
90.26.1	700805	187	Gastrina/S Metodo: Chemiluminescenza	SIERO	Provetta tappo GIALLO		Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma IMMUNOMETRIA		15
90.17.C	700687	659	GENTAMICINA Metodo: Chemiluminescenza	PLASMA	Provetta tappo VERDE	CENTRIFUGARE E SEPARARE. Conservare a 4° - 8°C PRELEVARE IL LUN e GIOV	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma LAB. ANALISI FARMACI		7
			GH			VEDI ORMONE SOMATOTROPO			

90.94.7	503972	568	GIARDIA RICERCA ANTIGENI EIA Metodo: Immunocromaografico	FECI	Contenitore per Coprocultura	Emettere le feci su una superficie asciutta e ben pulita. Raccoglieme una modesta quantità con il cucchiaino dell'apposito contenitore. Portare subito in laboratorio	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	4
			GLICEMIA			VEDI GLUCOSIO			
90.26.3	700806	877	GLUCAGONE /S Metodo: Elisa	SIERO	Provetta tappo GIALLO	Conservazione: <u>centrifugare, separare, congelare</u>	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma IMMUNOMETRIA		15
90.26.5	700566	124	GLUCOSIO. (Curva da carico 3 determinazioni) 75 g - 3 prelievi) Metodo: Uv Enzimatico esochinasi	SIERO	Provetta tappo GRIGIO	Eeguire il prelievo basale e contemporaneamente i prelievi eventualmente richiesti per altri esami, poi fare bere al paziente la soluzione di glucosio. Il paziente deve bere tutto entro 5 min. Quando la glicemia basale è inferiore a 125 mg/dl, alle donne in gravidanza vanno somministrati 75 g/150 ml di glucosio in soluzione. Prelievi: basale, dopo 60' e 120'	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.26.5	700566	125	GLUCOSIO. (Curva da carico 2 determinazioni) 75 g - 2 prelievi) Metodo: G-6-PDH esochinasi	SIERO	Provetta tappo GRIGIO	Eeguire il prelievo basale e contemporaneamente i prelievi eventualmente richiesti per altri esami, poi fare bere al paziente la soluzione di glucosio. Il paziente deve bere tutto entro 5 min. Quando la glicemia basale è inferiore a 125 mg/dl, al paziente vanno somministrati 75 g/150 ml di glucosio in soluzione. Per i bambini la quantità di glucosio da somministrare è di 1,75 g per ogni Kg di peso corporeo Prelievi: basale e 120'	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
			G6PDH			VEDI GLUCOSIO-6-FOSFATO-DEIDROGENASI			
90.27.1	700573	260	Glucosio/ dU (Glicosuria) Metodo: U V enzimatico esochinasi	URINE 24 h	Contenitore per raccolta URINE 24 h	Raccolta urine 24 ore secondo modalità standard.	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2

90.27.2	700574	1000	GLUCOSIO-6-FOSFATO-DEIDROGENAS I ERITROCITARIA /Sg (G6PDH)	SANGUE INTERO	Provetta tappo ROSA	Prelevare il giorno prima della partenza. Conservazione: 4°- 8°C	AST PESARO URBINO Sede Fano ma ve da Pergola lu ma me gi ve sa		15
90.26.5	700568	1261	GLUCOSIO PROFILO (6 DET) Metodo: U V enzimatico esochinasi	SIERO	Provetta tappo GRIGIO	IL PROFILO VIENE ESEGUITO IN CONTEMPORANEA CON LA CURVA INSULINEMICA I prelievi per la determinazione glucosio vengono eseguiti con il numero e i tempi indicati sulla richiesta del medico. Eseguire il prelievo basale e contemporaneamente i prelievi eventualmente richiesti per altri esami, poi fare bere al paziente la soluzione di glucosio. Il paziente deve bere tutto entro 5 min. Quando la glicemia basale è inferiore a 125 mg/dl, vanno somministrati 75 g/150ml di glucosio in soluzione. Per i bambini la quantità di glucosio da somministrare è di 1,75 g per ogni Kg di peso corporeo	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.27.1	700570	005	Glucosio siero (Glicemia) Metodo: U V enzimatico esochinasi	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.26.5	700568	1250	Glucosio TRIORARIO Metodo: U V enzimatico esochinasi	SIERO	Provetta tappo GRIGIO	I prelievi per la determinazione glucosio vengono eseguiti con il numero e i tempi indicati sulla richiesta del medico. Eseguire il prelievo basale e contemporaneamente i prelievi eventualmente richiesti per altri esami, poi fare bere al paziente la soluzione di glucosio. Il paziente deve bere tutto entro 5 min. Quando la glicemia basale è inferiore a 125 mg/dl, vanno somministrati 75 g/150ml di glucosio in soluzione. Per i bambini la quantità di glucosio da somministrare è di 1,75 g per ogni Kg di peso corporeo.	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.27.5	700808	414	Gonadotropina corionica /S (Beta HCG) Metodo: Immunoenzimatico ChLIA	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2

			GONOCOCCO			VEDI SECRETO URETRALE NEISSERIA GONORRHOEAE ESAME COLTURALE.			
90.65.3	701342	9070	GRUPPO SANGUIGNO ABO e Rh (D)	PLASMA	Provetta tappo VIOLA GRANDE		CENTRO TRASFUSIONALE URBINO lu ma me gi ve sa	lu ma me gi ve sa	2
90.65.3	701342	9072	GRUPPO SANGUIGNO ABO e Rh (D)	PLASMA	Provetta tappo VIOLA GRANDE	CODICE UTILIZZATO PER I DONATORI	CENTRO TRASFUSIONALE FANO	lu ma me gi ve sa	2
90.28.1	700673	430	Hb - EMOGLOBINA GLICATA (HbA1C) Metodo: Elettroforesi Capillare	SANGUE INTERO	Provetta tappo ROSA		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	4
90.66.7	505222	9033	Hb - EMOGLOBINE dosaggio frazioni (HbA2, HbF, Hb Anomale) Metodo: Elettroforesi Capillare	SANGUE INTERO	Provetta tappo ROSA		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	4
			HbA1C			VEDI Hb - EMOGLOBINA GLICATA			
9129233	509810	94212	HCV Resistenze NS 5a	SANGUE INTERO	Provetta tappo VIOLA GRANDE	Prelevare il giorno prima della partenza Conservazione: 4-8 °C Allegare sempre al foglio di lavoro referto HCV-RNA quantitativo richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma VIROLOGIA		15
9129233	509812	94211	HCV Resistenze NS 5b	SANGUE INTERO	Provetta tappo VIOLA GRANDE	Prelevare il giorno prima della partenza Conservazione: 4-8 °C Allegare sempre al foglio di lavoro referto HCV-RNA quantitativo richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma VIROLOGIA		15
9129233		94213	HCV Resistenze NS 3	SANGUE INTERO	Provetta tappo VIOLA GRANDE	Prelevare il giorno prima della partenza Conservazione: 4-8 °C Allegare sempre al foglio di lavoro referto HCV-RNA quantitativo richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma VIROLOGIA		15
			HDV			VEDI VIRUS EPATITE DELTA			

90.56.A	700740	159	HE4 (Human epididymis protein 4) (COMPRESIVO DI ALGORITMO) Metodo: Chemiluminescenza	SIERO	Provetta tappo GIALLO		Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma IMMUNOMETRIA		15
90.95.1	701125	441	HELIkobACTER PYLORI ANTICORPI (E. I. A.) IgG	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Pergola	lu	15
90.84.8	700998	442	HELIkobACTER PYLORI antigene feci Metodo: Chemiluminescenza (CLIA)	FECI	Contenitore per Coprocoltura	Emettere le feci su una superficie asciutta e ben pulita. Raccogliere una modesta quantità con il cucchiaino dell'apposito contenitore.	AST PESARO URBINO Sede Urbino		15
91.12.2	701410	603418	HPV DNA (screening) Tampone anale	CELLULE	Provetta DEDICATA	Esame eseguito previo appuntamento CUP per VIROLOGIA ANCONA	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona VIROLOGIA		10
91.12.2	701407	603419	HPV DNA (screening) Tampone Balano-prepuziale	CELLULE	Provetta DEDICATA	Esame eseguito previo appuntamento CUP per VIROLOGIA ANCONA	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona VIROLOGIA		10
91.12.2	701409	603417	HPV DNA (screening) Tampone cervicale	CELLULE	Provetta DEDICATA	Esame eseguito dall'ostetrica previo appuntamento CUP	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona VIROLOGIA		10
91.12.5	701412	603414	HPV DNA (screening) Tampone cutaneo	CELLULE	Provetta DEDICATA	Esame eseguito previo appuntamento CUP per VIROLOGIA ANCONA	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona VIROLOGIA		10
91.12.5	701404	603413	HPV DNA (screening) Tampone orale	CELLULE	Provetta DEDICATA	Esame eseguito previo appuntamento CUP per VIROLOGIA ANCONA	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona VIROLOGIA		10

91.12.5	701420	603416	HPV DNA (screening) Tampone vulvare	CELLULE	Provetta DEDICATA	Esame eseguito dall'ostetrica previo appuntamento CUP	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona VIROLOGIA		10
			HSV			VEDI VIRUS HERPES SIMPLEX			
90.68.3	700001	428	IgE Totali (PRIST)	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		30
90.68.4	701285	90411	IgG sottoclassi Ig G1 Metodo: Nefelometrico	SIERO	Provetta tappo GIALLO		Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma LAB. ANALISI PROTEINE		15
90.68.4	701286	90412	IgG sottoclassi Ig G2 Metodo: Nefelometrico	SIERO	Provetta tappo GIALLO		Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma LAB. ANALISI PROTEINE		15
90.68.4	701287	90413	IgG sottoclassi Ig G3 Metodo: Nefelometrico	SIERO	Provetta tappo GIALLO		Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma LAB. ANALISI PROTEINE		15
90.68.4	701288	90414	IgG sottoclassi Ig G4 Metodo: Nefelometrico	SIERO	Provetta tappo GIALLO		Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma LAB. ANALISI PROTEINE		15

90.68.5	700002	448	IMMUNOGLOBULINE IgG SPECIFICHE ALLERGOLOGICHE (PRECIPITINE) Metodo: Elisa	SIERO	Provetta tappo NOCCIOLA o GIALLO PAGLIERINO	<u>Prelevare il giorno della partenza</u> Ritirare provetta dedicata al punto prelievi e scrivere codice fiscale sull'etichetta ESAME MOMENTANEAMENTE SOSPESO DAL 01/02/24	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma MEDICINA DEL LAVORO		20
9004114	504760	892	IL-6 INTERLEUCHINA-6 (IL-6)	SIERO	Provetta tappo GIALLO	richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	AST PESARO URBINO Sede Pesaro ma ve da Pergola lu me ve		15
90.69.2	701291	122	Immunofissazione /S Metodo: Immunofis. su gel d'agarosio	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu me ve	15
90.69.2	701290	9020	Immunofissazione /U (Bence Jones) Metodo: Immunofis. su gel d'agarosio	URINE	Provetta Urine	Urine del mattino.	AST PESARO URBINO Sede Urbino	gi	15
90.69.4	701292	492	Immunoglobuline IgA Metodo: immuno-turbidimetrico	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		3
90.69.4	701295	493	Immunoglobuline IgG Metodo: immuno-turbidimetrico	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		3
90.69.4	701298	494	Immunoglobuline IgM Metodo: immuno-turbidimetrico	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		3
90.28.7	701260	2651	IMMUNOGLOBULINE: CATENE K E LAMBDA LIBERE	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		15
90.28.4	701259	261	IMMUNOGLOBULINE CATENE LEGGERE LAMBDA E KAPPA Dosaggio quantitativo urine	URINE	Provetta urine	Urine del mattino	AST PESARO URBINO Sede Urbino		15
			IMMUNOGLOBULINE SPECIFICHE ↓				↓		
90.68.1	700278	4003	d70 - Acarus siro Metodo: Feia	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		30

9068105	505555	4031	f1 – Albume Metodo: Feia	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		30
90.68.1	700102	4051	f76 - nBos d4; alfa lattoalbumina Metodo: Feia	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		30
90.68.1	700253	4082	m6 - Alternaria alternata (Alternaria tenuis) Metodo: Feia	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		30
90.68.1	700328	4064	c6 – Amoxicilloyl Metodo: Feia	SIERO	Provetta tappo GIALLO	Allegare modulo Antibiotici da compilare dal MMG	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma	ma ve	16
90.68.1	700329	4063	c5 – Ampicilloyl Metodo: Feia	SIERO	Provetta tappo GIALLO	Allegare modulo Antibiotici da compilare dal MMG	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma SIEROLOGIA	ma ve	16
90.68.1	700234	4910	p4 – Anisakis Metodo: Feia	SIERO	Provetta tappo GIALLO		Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma SIEROLOGIA		16
90.68.1	700066	4090	i1 – Ape Metodo: Feia	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		30
90.68.1	700315	4038	f13 – Arachide Metodo: Feia	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		30
			f33 - Arancia			Prestazione eseguita presso il Lab. Analisi di Fano su prenotazione al CUP			
90.68.1	700250	4081	m3 - Aspergillus fumigatus Metodo: Feia	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		30

90.68.1	700263	4112	w6 - Assenzio selvatico Metodo: Feia	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		30
90.68.1	700025	4076	g13 – Bambagiona Metodo: Feia	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		30
			f92 - Banana			Prestazione eseguita presso il Lab. Analisi di Fano su prenotazione al CUP			
90.68.1	700103	4052	f77 - nBos d5; beta lattoglobulina Metodo: Feia	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		30
90.68.1	700184	4096	t3 – Betulla Metodo: Feia	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		30
90.68.1	700033	4029	f93 – Cacao Metodo: Feia	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		30
90.68.1	700046	4093	i75 - Calabrone europeo Metodo: Feia	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		30
90.68.1	700408	4045	f27 - Carne di bue Metodo: Feia	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		30
90.68.1	700417	4044	f26 - Carne di maiale Metodo: Feia	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		30
90.68.A	700101	4059	f83 - Carne di pollo Metodo: Feia	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		30
			f31 - Carota			Prestazione eseguita presso il Lab. Analisi di Fano su prenotazione al CUP			
90.68.1	700104	4053	f78 – Caseina Metodo: Feia	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		30
90.68.1	700327	4065	c7 – Cefaclor Metodo: Feia	SIERO	Provetta tappo GIALLO	Allegare modulo Antibiotici da compilare dal MMG	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma SIEROLOGIA	ma ve	16

90.68.1	700181	4102	t23 - Cipresso mediterraneo Metodo: Feia	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		30
90.68.1	700210	4080	m2 - Cladosporium herbarum Metodo: Feia	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		30
90.68.A	700065	4073	g6 - Coda di topo Metodo: Feia	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		30
90.68.1	700216	4113	w8 - Dente di leone Metodo: Feia	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		30
90.68.1	700281	4002	d2 - Dermatophagoides farinae Metodo: Feia	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		30
90.68.1	700369	4001	d1 - Dermatophagoides pteronyssinus Metodo: Feia	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		30
90.68.1	700298	4012	e5 - Forfora di cane Metodo: Feia	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		30
90.68.1	700016	4070	g2 - Erba canina Metodo: feia	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		30
90.68.1	506465	4071	g3 - Erba mazzolina mazzolina Metodo: Feia	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		30
90.68.1	700283	4010	e1 - Forfora di gatto Metodo: Feia	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		30
90.68.1	700117	4067	f81 - Formaggio a pasta dura Metodo: Feia	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		30
90.68.1	700109	4068	f82 - Formaggio a pasta molle (Camembert, Brie, Gorgonzola) Metodo: Feia	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		30
90.68.1	700155	4101	t15 – Frassino Metodo: Feia	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		30

90.68.1	700388	4042	f24 – Gambero Metodo: Feia	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		30
90.68.1	700064	4091	i3 – Giallone Metodo: Feia	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		30
90.68.1	700105	4054	f79 – Glutine Metodo: Feia	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		30
90.68.1	700265	4005	d73 - Glycyphagus domesticus Metodo: Feia	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		30
90.68.1	700050	4074	g8 - Gramigna dei prati Metodo: Feia	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		30
			f23 - Granchio comune			Prestazione eseguita presso il Lab. Analisi di Fano su prenotazione al CUP			
90.68.1	700097	4034	f4 – Grano Metodo: Feia	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		30
90.68.A	700106	4036	f8 – Granoturco Metodo: Feia	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		30
90.68.1	700111	4069	f84 – Kiwi Metodo: Feia	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		30
90.68.1	700218	4114	w9 – Lanciuola Metodo: feia	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		30
90.68.1	700297	4032	f2 – Latte Metodo: Feia	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		30
90.68.1	700201	4120	k82 – Lattice Metodo: Feia	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		30
90.68.1	700024	4072	g5 – Loglierella Metodo: Feia	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		30
90.68.A	700118	4049	f49 – Mela Metodo: Feia	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		30

			IMMUNOGLOBULINE IgE SPECIFICHE f37 - Mitile			Prestazione eseguita presso il Lab. Analisi di Fano su prenotazione al CUP			
90.68.1	700318	4040	f17 – Nocciola Metodo: Feia	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		30
			t4 - Nocciolo			Prestazione eseguita presso il Lab. Analisi di Fano su prenotazione al CUP			
90.68.1	700190	4099	t9 – Olivo Metodo: Feia	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		30
90.68.11	700139	4095	t2 – Ontano bianco Metodo: Feia	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		30
90.68.A	700132	4057	f6 - Orzo Metodo: Feia	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		30
90.68.1	700171	4116	w21 - Parietaria o erba dei muri Metodo: Feia	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		30
90.68.1	700166	4115	w19 - Erba vetriola Metodo: Feia	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		30
			f35 - Patata			Prestazione eseguita presso il Lab. Analisi di Fano su prenotazione al CUP			
90.68.1	700323	4061	c1 - Penicilloyl G Metodo: Feia	SIERO	Provetta tappo GIALLO	Allegare modulo Antibiotici da compilare dal MMG	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma SIEROLOGIA	ma ve	16
90.68.1	700332	4062	c2 - Penicilloyl V Metodo: Feia	SIERO	Provetta tappo GIALLO	Allegare modulo Antibiotici da compilare dal MMG	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma SIEROLOGIA	ma ve	16
90.68.1	700031	4056	f95 - Pesca Metodo: Feia	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		30

90.68.1	700347	4033	f3 - Pesce (merluzzo) Metodo: feia	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		30
90.68.A	700145	4100	t14 - Pioppo	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		30
			f12 - Piselli			Prestazione eseguita presso il Lab. Analisi di Fano su prenotazione al CUP			
90.68.1	700384	4043	f25 – Pomodoro Metodo: Feia	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		30
90.68.1	700188	4098	t7 - Quercia bianca Metodo: Feia	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		30
			f9 - Riso integrale			Prestazione eseguita presso il Lab. Analisi di Fano su prenotazione al CUP			
90.68.1	700057	4092	i6 – Scarafaggio Metodo: Feia	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		30
90.68.A	700018	4035	g12 – Segale Metodo: Feia	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		30
90.68.1	700316	4039	f14 - Semi di soia Metodo: Feia	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		30
90.68.1	700051	4094	i204 – Tafano Metodo: Feia	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		30
90.68.1	700125	4050	f75 - Tuorlo Metodo: Feia	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		30
90.68.1	700276	4004	d72 - Tyrophagus putrescentiae Metodo: feia	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		30
90.68.1	700048	4089	i71 - Zanzara comune Metodo: Feia	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		30
90.16.6	700857	9371	INFLIXIMAB Metodo: Elisa	SIERO	Provetta tappo GIALLO		Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma IMMUNOME TRIA		20

90.28.C	700858	229	Inibina B Metodo: Elisa	SIERO	Provetta tappo GIALLO		Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma IMMUNOME TRIA		15
			Inibitore dell'attivatore del Plasminogeno			VEDI PAI-1			
90.29.1	700813	185	Insulina/S Metodo: Immunoenzimatico ChLIA	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.28.5	700811	1850	Insulina (Curva da carico) Metodo: Immunoenzimatico ChLIA	SIERO	Provetta tappo GIALLO	LA CURVA VIENE ESEGUITA IN CONTEMPORANEA CON IL PROFILO GLICEMICO I prelievi per la determinazione dell'insulina vengono eseguiti con il numero e i tempi indicati sulla richiesta del medico. Eseguire il prelievo basale e contemporaneamente i prelievi eventualmente richiesti per altri esami, poi fare bere al paziente la soluzione di glucosio. Il paziente deve bere tutto entro 5 min. Quando la glicemia basale è inferiore a 125 mg/dl, vanno somministrati 75 g/150ml di glucosio in soluzione. Per i bambini la quantità di glucosio da somministrare è di 1,75 g per ogni Kg di peso corporeo	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.70.3	700450	1910	INTRADERMOREA ZIONE ALLA TUBERCOLINA (Mantoux)			Esame da effettuare presso il laboratorio di Urbino. Lettura del risultato dopo 48-72 ore.	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me ve sa	3
			ISOAMILASI			VEDI AMILASI PANCREATICA			
90.17.C	700704	9356	LACOSAMIDE Metodo: EMIT	PLASMA	Provetta tappo VERDE	CENTRIFUGARE E SEPARARE. Conservare a 4° - 8°C PRELEVARE IL LUN e GIOV se non inviati nei giorni dedicati CONGELARE	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma BIOCHIMICA CLINICA		10

90.17.C	700763	461	Lamotrigina Metodo: Turbidimetrico	PLASMA	Provetta tappo VERDE	CENTRIFUGARE E SEPARARE. Conservare a 4°- 8°C PRELEVARE IL LUN e GIOV se non inviati nei giorni dedicati CONGELARE	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma BIOCHIMICA CLINICA		20
			Lattato			VEDI ACIDO LATTICO			
90.29.2	700576	052	LATTATO DEIDROGENASI (LDH) /S Metodo: uv cinetico	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.84.8	700993	4841	Legionella (Antigene)	URINE	Provetta urine		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	4
91.23.9	702134	9737	LEISHMANIA ANTICORPI (Titolazione mediante I. F.) Metodo: Elisa+WB	SIERO	Provetta tappo GIALLO		Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma SIEROLOGIA		15
9120104	509620	97371	LEISHMANIA ANTICORPI WESTERN BLOT	SIERO	Provetta tappo GIALLO	richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma SIEROLOGIA		15
90.96.6	504011	535	LEPTOSPIRE ANTICORPI	SIERO	Provetta tappo GIALLO		Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma SIEROLOGIA		15
90.17.C	700764	504	Levetiracetam Metodo: Eia	PLASMA	Provetta tappo VERDE	CENTRIFUGARE E SEPARARE. Conservare a 4°- 8°C PRELEVARE IL LUN e GIOV se non inviati nei giorni dedicati CONGELARE	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma BIOCHIMICA CLINICA		15

90.30.2	700577	028	Lipasi/S Metodo: Colorimetrico Cinetico	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
---------	--------	-----	---	-------	---------------------------------	--	--	----------------------	---

90.30.3	701261	203	LIPOPROTEINA-a /P Metodo: Turbidimetrico	SIERO	Provetta tappo GIALLO		Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma CHIMICA CLINICA		15
90.30.4	701194	374	Liquido Ascitico (chimico-fisico)	Liquido ascitico	2 Provette tappo ROSA		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.30.4	701196	375	Liquido Pericardico (chimico-fisico)	Liquido pericardico	2 Provette tappo ROSA		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	6
90.30.4	701193	371	Liquido Peritoneale (chimico-fisico)	Liquido peritoneale	2 Provette tappo ROSA		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.34.4	701195	372	Liquido Pleurico (chimico-fisico)	Liquido pleurico	2 Provette tappo ROSA		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.32.1	701200	373	Liquido Sinoviale (chimico-fisico)	Liquido sinoviale	2 Provette tappo ROSA		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2

90.93.5	503830	344	LIQUOR CEFALORACHI DIANO o CEREBROSPINALE	Liquor	4 Provette sterili dedicate	<p>Il liquor deve essere prelevato in 4 PROVETTE STERILI dedicate (da ritirare in Laboratorio), senza additivi e numerate secondo l'ordine di raccolta (il volume totale del liquor deve essere di almeno 5 mL.</p> <p>PROVETTA n.1: utilizzata per esame chimico-fisico PROVETTA n. 2: utilizzata per esame microbiologico colturale (sedimento) PROVETTA n. 3: utilizzata per esame morfologico cellulare PROVETTA n. 4: utilizzata per diagnostica molecolare virologica Ancona (segue il paziente)</p> <p>IL CAMPIONE DEVE ESSERE INVIATO IMMEDIATAMENTE IN LABORATORIO A TEMPERATURA AMBIENTE Dopo una prima valutazione dell'esito dei campioni, il reparto che decide di inviare a Virologia Ancona la quarta provetta, dovrà provvedere all'accettazione dei virus compresi all'interno dei due pannelli:</p> <p>PANNELLO ESTIVO (1° maggio-30 novembre) HSV1 DNA (5021) HSV2 DNA (5022) VZ DNA (5023) ENTERO RNA (5024) TOSCANA RNA (5025) PANFLAVI RNA (5026) + 2 provette da siero per TOSCANA IgG (9536) TOSCANA IgM (5027) WEST-NILE IgG (5028) WEST-NILE IgM (5029)</p> <p>PANNELLO INVERNALE (1° dicembre- 30 aprile) HSV1 DNA (5021) HSV2 DNA (5022) VZ DNA (5023) ENTERO RNA (5024)</p> <p>USO REPARTI</p>	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	CHIMICO FISICO e MORFO LOGICO	1gg
90.93.3	701079	9614							COLTU RALE	4 gg
9087467	507900	515	LISTERIA ANTICORPI IMMUNOFLUORESCENZ A INDIRETTA IgG Metodo: IFI	SIERO	Provetta tappo GIALLO	Dal 01/01/2023 non verrà più eseguite le IgM degli anticorpi della listeria	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma SIEROLOGIA		15	
90.32.2	501020	086	Litio/S Metodo: Spettrofotometrico	SIERO	Provetta tappo GIALLO	Prelievo a digiuno, dopo 12 ore dalla dose serale.	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2	

90.17.C	700711	29851	LORAZEPAM Metodo: HPLC	PLASMA	Provetta tappo VERDE	CENTRIFUGARE E SEPARARE. Conservare a 4° - 8°C PRELEVARE IL LUN e GIOV	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma TOSSICOLOGIA		15
90.46.5	700671	20561	LUPUS ANTICOAGULANTE (LAC) CONFERMA / P	PLASMA	2 Provette tappo CELESTE	Portare subito in laboratorio le provette. Conservazione: eseguire <u>doppia centrifugazione, aliquotare in due provette dedicate e congelare.</u> Esame da non eseguire nei pz. in terapia anticoagulante.	AST PESARO URBINO Sede Fano ma ve da Pergola lu ma me gi ve sa		15
90.46.5	700639	2056	LUPUS ANTICOAGULANTE (LAC) screening	PLASMA	2 Provette tappo CELESTE	Portare subito in laboratorio le provette. Conservazione: eseguire <u>doppia centrifugazione, aliquotare in due provette dedicate e congelare.</u> Esame da non eseguire nei pz. in terapia anticoagulante.	AST PESARO URBINO Sede Fano ma ve da Pergola lu ma me gi ve sa		15
90.32.4	700814	179	LUTEOTROPINA (LH) /S Metodo: Immunoenzimatico ChLIA	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
			LKM			VEDI Anticorpi Anti Microsomi epatici e Renali			
			Luminale			VEDI FENOBARBITAL			
			LH			VEDI LUTEOTROPINA			
90.32.5	700581	083	Magnesio/dU Metodo: Colorimetrico	URINE 24 h	Contenitore per raccolta URINE 24 h	Raccolta urine 24 ore secondo modalità standard. Ad inizio raccolta versare nel contenitore 10 ml di Acido Cloridrico 6N..	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	5
90.32.5	700582	082	Magnesio/S Metodo: Colorimetrico	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.32.5	700580	0831	Magnesio/U Metodo: Colorimetrico	URINE	Provetta Urine		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
			Metadone	URINE	Provetta Urine	Test di screening qualitativo. Per i fini medico legali l'utente è sottoposto al controllo della minzione e in caso di positività è necessario il test di conferma di II livello in GS/MS o Liquido massa.	AST PESARO URBINO Tossicologico Pesaro		2

90.03.6	504320	4341	METANEFRIE URINARI /dU Metodo: HPLC	URINE 24 h	Provetta Urine	Raccolta urine 24 ore secondo modalità standard. A inizio raccolta versare nel contenitore 10ml HCL 6N. La raccolta va eseguita entro due giorni dalla partenza del campione Stesse indicazioni alimentari delle catecolamine (adrenalina noradrenalina/dU)	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma TOSSICOLOGIA		20
90.98.4	701133	3491	MICETI ESAME COLTURALE UNGHIE Metodo: Colturale	UNGHIE	Contenitore Sterile	CAMPIONE PRELEVATO DALLO SPECIALISTA	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	15
91.01.9	700966	9610	MICOBATTERI MICROSCOPICO SUCCO GASTRICO (BK)	ASPIRATO GASTRICO	CONTENITORE URINOCOLTURA	Il lavaggio gastrico va eseguito al mattino a digiuno da almeno 8 ore utilizzando 245-50 ml di acqua distillata sterile. Il pH del campione deve essere neutralizzato con carbonato di sodio entro 1 ora. Il campione deve essere di 5/10 ml. Conservare a 4° - 8° per massimo 4 giorni. <u>TUTTI I BK VANNO ATTENZIONATI ALLA DOTT.SSA POCOGNOLI</u>	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma MICROBIOLOGIA		MICROSCOPICO 2 GG COLTURALE 50 GG
91.01.9	700971	9611	MICOBATTERI MICROSCOPICO BRONCOASPIRATO (BK)	Broncoaspirato Lavaggio broncoalveolare, Aspirato transtracheale, Spazzolatura bronchiale	CONTENITORE URINOCOLTURA	>5 ml Conservare a 4° - 8° per massimo 4 giorni <u>TUTTI I BK VANNO ATTENZIONATI ALLA DOTT.SSA POCOGNOLI</u>	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma MICROBIOLOGIA		MICROSCOPICO 2 GG COLTURALE 50 GG
91.01.9	700963	9612	MICOBATTERI MICROSCOPICO ESPETTORATO (BK)	ESPETTORATO, Espettorato Indotto	CONTENITORE URINOCOLTURA	5/10 ml raccolte al mattino. Prima rimuovere protesi dentarie e pulire il cavo orale con acqua. Inserire cilindri assorbenti tra le guance e gengive per bloccare la secrezione salivare. L'espettorato deve provenire dalle BASSE vie aeree con colpi di tosse, il prelievo NON deve essere costituito da saliva. Ripetere per 3 giorni consecutivi. Per l' Espettorato INDOTTO fare aerosol con soluzione salina ipertonica per 15' (segnalare sulla richiesta perché sicuramente ricco di saliva). Conservare a 4°- 8° per massimo 4 gg. <u>TUTTI I BK VANNO ATTENZIONATI ALLA DOTT.SSA POCOGNOLI</u>	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma MICROBIOLOGIA		MICROSCOPICO 2 GG COLTURALE 50 GG
91.01.9	700959	9617	MICOBATTERI MICROSCOPICO FECI (BK)	FECI	CONTENITORE PER COPROCOLTURA	La ricerca di BK nelle feci è consigliabile solo nei pazienti HIV positivi. Raccogliere una quantità di feci(circa 1 g) e metterle in un contenitore sterile prestando attenzione a non contaminarlo esternamente. Conservare a 4°- 8° per massimo 4 giorni <u>TUTTI I BK VANNO ATTENZIONATI ALLA DOTT.SSA POCOGNOLI</u>	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma MICROBIOLOGIA		MICROSCOPICO 2 GG COLTURALE 50 GG

91.01.9	700977	9630	MICOBATTERI MICROSCOPICO materiali necrotico- puroolenti (BK)	MATERIALE DA LESIONI CUTANEE, PUS	CONTENITORE URINOCOLTU RA	Utilizzare un tampone sterile stemperato poi il materiale della lesione in 2-3 ml di soluzione fisiologica sterile. Ripetere l'operazione più volte fino ad ottenere un campione piuttosto denso. Conservare a 4°- 8° per massimo 4 giorni <u>TUTTI I BK VANNO ATTENZIONATI ALLA DOTT.SSA POCOGNOLI</u>	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma MICROBIOLO GIA	MICRO SCOPICO 2 GG CULTURAL E 50 GG
91.01.9	700973	9631	MICOBATTERI MICROSCOPICO BIOPSIA SU PRELIEVI BIOPTICI (BK)	FRAMMENTI DI TESSUTO DI VOLUME NON INFRIORE A 2-3 CMQ	CONTENITORE URINOCOLTU RA	I tessuti devono essere messi in contenitori sterili SENZA conservanti o fissativi, senza essere avvolti in garze. Aggiungere 1-2 ml di soluzione fisiologica sterile per evitare l'essiccamento. Conservare a 4°- 8° per massimo 4 giorni. <u>TUTTI I BK VANNO ATTENZIONATI ALLA DOTT.SSA POCOGNOLI</u>	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma MICROBIOLO GIA	MICRO SCOPICO 2 GG CULTURAL E 50 GG
91.01.9	700967	9632	MICOBATTERI MICROSCOPICO LIQUIDI CAVITARI (BK)	LIQUIDO ASCITICO, PERICARDICO, PERITONEA LE, PLEURICOSI NOVIALE	2 PROVETTE TAPPO CELESTE	5 -10 ml. Conservare a 4°- 8° per massimo 4 giorni <u>TUTTI I BK VANNO ATTENZIONATI ALLA DOTT.SSA POCOGNOLI</u>	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma MICROBIOLO GIA	MICRO SCOPICO 2 GG CULTURAL E 50 GG
91.01.9	700955	9633	MICOBATTERI MICROSCOPICO LIQUOR (BK)	LIQUOR	Provetta DEDICATA	Almeno 2 – 3 ml. Conservare a 4° - 8° per massimo 4 giorni <u>TUTTI I BK VANNO ATTENZIONATI ALLA DOTT.SSA POCOGNOLI</u>	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma MICROBIOLO GIA	MICRO SCOPICO 2 GG CULTURAL E 50 GG
91.01.9	700975	9634	MICOBATTERI MICROSCOPICO /U	URINE	CONTENITORE URINOCOLTU RA	Dopo pulizia genitali raccogliere, al mattino, almeno 50 ml includendo anche il primo mitto; in alternativa cateterizzare o puntura sovrapubica. Ripetere il campione per 3 giorni consecutivi. Conservare a 4° - 8° per massimo 4 giorni. <u>TUTTI I BK VANNO ATTENZIONATI ALLA DOTT.SSA POCOGNOLI</u>	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma MICROBIOLO GIA	MICRO SCOPICO 2 GG CULTURAL E 50 GG

91.01.9	700977	9635	MICOBATTERI MICROSCOPICO (MIDOLLO E SANGUE)	ASPIRATO MIDOLLARE O SANGUE	PROVETTA DEDICATA	Per MIDOLLO OSSEO raccogliere la maggior quantità possibile su provetta ISOLATOR. Per il SANGUE procedere come per le Emocolture. Sgrassare la cute con alcool etilico 70%. Disinfettare la cute con Clorexina in soluzione alcolica per 2/4 min. Rimuovere l'eccesso di disinfettante con alcool. Di 30' l'uno dall'altro. Conservare a T° AMBIENTE FINO ALLA SPEZIONE <u>TUTTI I BK VANNO ATTENZIONATI ALLA DOTT.SSA POCGNOLI</u>	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma MICROBIOLOGIA		MICROSCOPICO 2 GG CULTURALE 50 GG
			MICOFEN			VEDI ACIDO MICOFENOLICO			
			MICROALBUMINURIA			VEDI ALBUMINA/U CREATININA/U			
90.33.5	700585	017	Mioglobina Metodo: Immunoenzimatico ChLIA	SIERO PLASMA	Provetta tappo GIALLO / VERDE		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
91.12.B	711029	60293	Monkeypox Virus DNA vescicola (Monkey Pox Virus DNA-MPX)	TAMPONE	KIT con TAMPONE DEDICATO	RITIRARE IL KIT DEDICATO IN LABORATORIO Per l'esecuzione dell'esame attenersi all'informativa del Ministero della Salute e al Protocollo emanato dall'ASUR	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona VIROLOGIA		1
			MUCOPROTEINE			VEDI Alfa 1 Glicoproteina Acida			
91.02.A	508226	168	MYCOPLASMA/UREAPL ASMA UROGENITALI ESAME COLTURALE (vaginale/uretrale/cervicale/urine/liq. seminale) Metodo: Colturale con identificazione antibiogramma	SECRETO VAGINALE	FLACONE con terreno liquido fornito dal Laboratorio.	Il tampone va introdotto nell'apposito flacone. INSERIRE NELLA NOTA DI SEGRETERIA SEDE DI PRELIEVO	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	4
91.02.5	508210	5821	Mycoplasma Pneumoniae IgG Metodo: Chemiluminescenza CLIA	SIERO	Provetta tappo GIALLO	richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	AST PESARO URBINO Sede Urbino		15
91.02.5	508215	5822	Mycoplasma Pneumoniae IgM Metodo: Chemiluminescenza CLIA	SIERO	Provetta tappo GIALLO	richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	AST PESARO URBINO Sede Urbino		15
91.02.D	508227	58210	MICOPLASMA PNEUMONIAE ANTICORPI IgG IgM	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		15
			MTHFR C677T			VEDI FATTORE MTHFR ANALISI MUTAZIONE DNA C677T CON PCR			
			MTHFR A 1298 C			VEDI FATTORE MTHFR ANALISI MUTAZIONE DNA A1298C CON PCR			

			MUTAZIONE FATTORE V LEIDEN			VEDI FATTORE V DI (LEIDEN) ANALISI PER MUTAZIONE DNA CON PCR			
			MUTAZIONE FATTORE II			VEDI FATTORE II ANALISI MUTAZIONE DNA CON PCR			
90.17.B	700734	509	NORTRIPTILINA	PLASMA	Provetta tappo VERDE	CENTRIFUGARE E SEPARARE. Conservare a 4° - 8°C PRELEVARE IL LUN e GIOV	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma TOSSICOLOGIA		15
90.36.3	700881	0210	NT-proBNP (Pept.Natr.Ventr.) Metodo: immunoenzimatico in fluorescenza FEIA)	SANGUE INTERO	Provetta tappo ROSA		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.34.6	700862	194	Omocisteina Metodo: Enzimatico	PLASMA	Provetta tappo ROSA per gli utenti di Urbino, provetta dedicata KABE per tutti gli altri	I campioni di sangue prelevati dai Reparti (provetta da emocromo) devono essere portati subito in laboratorio. Le provette KABE (prelevate nei punti prelievo dei distretti) hanno una stabilità di 12 ore e non necessitano di conservazione in ghiaccio.	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
			Ormone antidiuretico Vasopressina			VEDI ADIURETINA (ADH)			
90.17.G	700859	243	ORMONE ANTI-MULLERIANO (AMH). DOSAGGIO Metodo: Eclia	SIERO	Provetta tappo GIALLO		Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma IMMUNOMETRIA		15
90.35.1	700816	218	ORMONE SOMATOTROPO (GH) /S Metodo: Immunoenzimatico ChLIA	SIERO	Provetta tappo GIALLO	Il paziente deve essere a riposo disteso da almeno 30'.	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.34.7	700629	095	Osmolarità /P	SIERO/ PLASMA	Provetta tappo VERDE/GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2

90.34.7	700630	099	Osmolarità /U	URINE	Provetta Urine	Urine del mattino.	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.35.3	700588	9165	Ossalati/dU Metodo: HPLC	URINE 24 h	Contenitore per raccolta URINE 24 h	Raccolta urine 24 ore secondo le modalità standard. Ad inizio raccolta versare nel contenitore 10 ML di HCL 6N. Consegnare il campione il Lunedì o il Giovedì Conservazione: 4-8 °C	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma TOSSICOLOGIA		60
90.35.4	700817	215	Osteocalcina	SIERO	Provetta tappo GIALLO	Centrifugare, separare e congelare	AST PESARO URBINO Sede Pesaro ma ve da Pergola lu me ve		15
90.17.C	700700	4261	Oxacarbazepina Metodo: Eia	PLASMA	Provetta tappo VERDE	Centrifugare e separare Conservare a 4°- 8°C PRELEVARE IL LUN e GIOV se non inviati nei giorni dedicati CONGELARE	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma BIOCHIMICA CLINICA		15
G1.91	721841	20672	PAI ANALISI MUTAZIONE DNA 4G/5G CON PCR	SANGUE INTERO	Provetta tappo CELESTE	Effettuare il prelievo il Lunedì e il Giovedì (per Pergola nei giorni di spedizione). + foglio CONSENSO INFORMATO MOD.24 Conservazione 4°- 8°C	AST PESARO URBINO Sede Pesaro ma ve da Pergola lu me ve		35
			Papilloma virus			Rivolgersi all'ostetrica del Distretto Sanitario			
90.17.C	700727	9362	PARACETAMOLO Metodo: Chemiluminescenza	PLASMA	Provetta tappo VERDE	Prelevare il giorno prima della partenza. Nel caso vengano richiesti due prelievi, il secondo va eseguito 2 ore dopo la somministrazione del farmaco. Centrifugare, separare, conservazione 4°- 8°C	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma LAB. ANALISI FARMACI		10
90.35.5	700718	213	PARATORMONE (PTH) /S Metodo: Immunoenzimatico ChLIA	SIERO	Provetta tappo GIALLO	Tassativamente è richiesto il DIGIUNO da 12 ORE. Sospendere terapia calcio-fosfonati dietro indicazione del medico. Effettuato il prelievo portare subito in Laboratorio. Sierare ed effettuare l'analisi o congelare il siero. TRASPORTO IN GHIACCIO	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2

91.05.C	701230	336	PARASSITI INTESTINALI [ELMINTI, PROTOZOI] RICERCA MICROSCOPICA Metodo: microscopico dopo concentrazione	FECI	Contenitore per Coprocotura	Emettere le feci su una superficie asciutta e ben pulita. Raccoglierne una modesta quantità con il cucchiaino dell'apposito contenitore.	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	4
91.09.B	701618	3973	Parvovirus DNA sangue intero (quantitativo) Metodo: real time PCR	SANGUE INTERO	Provetta tappo ROSA	Prelevare il giorno prima della partenza. Conservazione: 4-8 °C.	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma VIROLOGIA		7
9021201	504920	021	PEPTIDE NATRIURETICO CEREBRALE BNP IMMUNOMETRICO	PLASMA	Provetta VIOLA GRANDE	Esame sospeso a partire dal 30/06/2024 sostituito con il NT-proBNP (Pept.Natr.Ventr.)	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.17.B	710770	9354	PERAMPANEL Metodo: HPLC	PLASMA	Provetta Tappo VERDE	CENTRIFUGARE, SEPARARE E CONGELARE	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma TOSSICOLOGIA		7
			PERTOSSE			VEDI BORDETELLA ANTICORPI			
			P1NP			VEDI PROPEPTIDE N-TERMINALE DE PRO COLLAGENE DI TIPO 1			
90.71.5	700659	9276	Plasminogeno	PLASMA	2 Provette tappo CELESTE	Portare subito in laboratorio le provette. Conservazione: eseguire <u>doppia centrifugazione, aliquotare in due provette dedicate e congelare.</u> Esame da non eseguire nei pz. in terapia anticoagulante.	AST PESARO URBINO Sede Fano ma ve da Pergola lu ma me gi ve sa		12
91.05.C	508313	400	PLASMODI DELLA MALARIA NEL SANGUE RICERCA MICROSCOPICA	SANGUE INTERO	Provetta tappo ROSA		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	4
91.06.1	508315	799	PLASMODIO FALCIPARUM ANTICORPI (Titolazione mediante I. F.) IgG Metodo: EIA	SIERO	Provetta tappo GIALLO	richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma SIEROLOGIA		12

91.12.2	701421	3980	PNEUMOCYSTIS CARINII (PCR) Metodo: mediante amplificazione genica	BAL	Contenitore per Urinocoltura		Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma MICROBIOLOGIA		8
			PORFIRINE/dU			VEDI UROPORFIRINE			
90.37.4	700596	072	Potassio/dU Metodo: ISE indiretta	URINE 24 h	Contenitore per raccolta URINE 24 h	Raccolta urine 24 ore secondo modalità standard.	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.37.4	700597	066	Potassio/S Metodo: ISE indiretta	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.37.4	700593	0721	Potassio/U Metodo: ISE indiretta	URINE	Provetta Urine		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.37.6	501206	222	Prealbumina Metodo: Nefelometrico	SIERO	Provetta tappo GIALLO		Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma BIOCHIMICA CLINICA		15
90.17.C	700735	419	Primidone/S Metodo: Emit	SIERO	Provetta tappo VERDE	CENTRIFUGARE E SEPARARE. Conservare a 4°- 8°C PRELEVARE IL LUN e GIOV se non inviati nei giorni dedicati CONGELARE	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma BIOCHIMICA CLINICA		12
90.21.2	700742	337	Procalcitonina Metodo: Chemiluminescenza CLIA	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	1
90.47.7	700498	33337	PROFILO ANTI-NUCLEO+DSF70 12 Ag	SIERO	Provetta tappo GIALLO		Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma IMMUNOLOGIA		15

91.47.C	27723	9011	Profilo fenotipico linfocitario standard (sottopopolazioni T, B, NK) [screening per sospetta immunodeficienza; linfopenia di n.d.d.]	SANGUE INTERO	Provetta tappo ROSA	Eeguire il prelievo il Lunedì e il Giovedì (per Pergola nei giorni di spedizione) Conservazione: 4°C	AST PESARO URBINO Sede Pesaro ma ve da Pergola lu me ve		30
90.01.2	700770	806860	17 OH-PROGESTERONE Metodo: Chemiluminescenza	SIERO	Provetta tappo GIALLO		Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma IMMUNOMERIA		15
90.38.1	700820	199	Progesterone (PRG) Metodo: Immunoenzimatico ChLIA	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
			PRL			VEDI PROLATINA			
90.38.2	501215	1760	Prolattina (Pool) Metodo: Immunoenzimatico ChLIA	SIERO	Provetta tappo GIALLO	Tre prelievi a distanza di 20 minuti l'uno dall'altro. Far stare il paziente disteso a riposo. richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.38.2	700821	176	Prolattina (PRL) Metodo: Immunoenzimatico ChLIA	SIERO	Provetta tappo GIALLO	Evitare stress prima del prelievo, far stare il paziente disteso 20 minuti prima di eseguire il prelievo.	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.35.2	700822	259	PROLATTINA CURVA Metodo: Immunoenzimatico ChLIA	SIERO	Provetta tappo GIALLO	Prelievi a distanza di 20 minuti l'uno dall'altro o secondo prescrizione dello specialista. Far stare il paziente disteso a riposo.	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.17.B	700762	9983	Propafenone Metodo: HPLC	SIERO	Provetta tappo GIALLO		Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma TOSSICOLOGIA		15
90.41.6	700783	455	Propeptide N-terminale del collagene di tipo 1 (P1NP) Metodo: Immunometrico	SIERO	Provetta tappo GIALLO		Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma IMMUNOMETRIA		15

90.72.2	700661	2141	PROTEINA C ANTICOAGULANTE FUNZIONALE [P]	PLASMA	2 Provette tappo CELESTE	Portare subito in Laboratorio in bagno di ghiaccio. Conservazione: <u>centrifugare e aliquotare</u> Esame da non eseguire nei pz. in terapia anticoagulante.	AST PESARO URBINO Sede Urbino		15
90.72.3	700848	204	Proteina C Reattiva Metodo: Immunoturbidimetrico	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.72.4	700672	1601	PROTEINA S FUNZIONALE METODO COAGULATIVO / P	PLASMA	2 Provette tappo CELESTE	Portare subito in Laboratorio in bagno di ghiaccio. Conservazione: <u>centrifugare e aliquotare</u> Esame da non eseguire nei pz. in terapia anticoagulante.	AST PESARO URBINO Sede Urbino		15
90.38.4	701265	121	PROTEINE (ELETTROFORESI DELLE) [S]. Incluso: Dosaggio Proteine totali Metodo: Elettroforesi capillare	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	15
90.38.5	700600	120	Proteine Totali /dU Metodo: Colorimetrico	URINE 24 h	Contenitore per raccolta URINE 24 h	Raccolta urine 24 ore secondo modalità standard. Ad inizio raccolta versare nel contenitore sodio azide . Durante la raccolta le urine devono essere conservate in frigo .	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.38.5	700598	006	Proteine Totali /S Metodo: Colorimetrico fotometrico	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.38.5	700599	1300	Proteine/U Metodo: Colorimetrico	URINE	Provetta Urine		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.39.1	701266	460	PROTEINE URINARIE ELETTROFORESI/ dU Elettroforesi delle proteine urinarie	URINE 24 h	Contenitore per raccolta URINE 24 h	Raccolta urine 24 ore con modalità standard. Ad inizio raccolta versare nel contenitore sodio azide . Durante la raccolta le urine devono essere conservate in frigo . Conservazione: 4° - 8°C	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma LAB. ANALISI PROTEINE		15

90.73.2	701346	922	PROVA CROCIATA COMPATIBILITA' TRASFUSIONALE	PLASMA	Provetta tappo VIOLA GRANDE		CENTRO TRASFUSIONALE URBINO		2
			PTH			VEDI PARATORMONE			
90.99.1	700508	93101	Quantiferon-TB GOLD	SANGUE	4 Provette dedicate da prendere in segreteria laboratorio	Effettuare il prelievo il Martedì Per effettuare l'esame sono necessari il risultato della Mantoux , la motivazione clinica . Compilare l'apposito modulo.	AST PESARO URBINO Sede di Fano ma da Pergola ma		15
90.39.4	700603	7911	Rame/S Metodo: Colorimetrico	SIERO	Provetta tappo GIALLO		Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma IMMUNOME TRIA		8
90.40.2	501276	224	RENINA CLINOSTATICA /S	PLASMA	Provetta tappo ROSA	Si esegue il prelievo dopo aver tenuto il paziente a riposo a letto per due ore. Le provette, devono essere portate in laboratorio il più velocemente possibile. Eseguire il prelievo a temperatura ambiente. <u>In laboratorio centrifugare separare e congelare</u>	AST PESARO URBINO Sede Pesaro ma ve da Pergola lu me ve		30
90.40.2	501277	225	RENINA ORTOSTATICA /P	PLASMA	Provetta tappo ROSA	Si esegue il prelievo al paziente in ortostatismo da almeno 20 min. Le provette, in ghiaccio, devono essere portate in laboratorio il più velocemente possibile. Eseguire il prelievo a temperatura ambiente. <u>In laboratorio centrifugare separare e congelare</u>	AST PESARO URBINO Sede Pesaro ma ve da Pergola lu me ve		30
90.74.5	700681	276	RETICOCITITI (Conteggio)	SANGUE INTERO	Provetta tappo ROSA		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
			REUMA TEST			VEDI FATTORE REUMATOIDE			

9116 COV2	507859	60821	RICERCA ANTIGENE SPECIFICO SARS-COV-2 IN TAMPONE NASO/FARINGEO (Indagine strumentale con metodo immunometrico, semi-quantitativo o quantitativo) Metodo: Immunometrico	TAMPONE NASALE	PROVETTA DEDICATA	Per l'esecuzione del test attenersi al PROTOCOLLO TEST ANTIGENICO STRUMENTALE (Diasorin) ESAME MOMENTANEAMENTE SOSPESO	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
9140106	509905	71090	RICERCA DI RIARRANGIAMENTO DEI TRATTI VJ e VJP GENE CATENA BETA T-CELL RECEPTOR (INCLUSA ESTRAZIONE, AMPLIFICAZIONE E RILEVAZIONE) (PER PROCESSO LINFOPROLIFERATIVO)	SANGUE INTERO	Provetta tappo ROSA	Eeguire il prelievo il Lunedì . Conservazione: 4 °C Allegare sempre copia dell'impegnativa + modello 26 richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	AST PESARO URBINO Sede Pesaro ma ve da Pergola lu me ve		15
9140106	29690	71007	RICERCA DI RIARRANGIAMENTO DEI TRATTI VJ e VJP GENE CATENA GAMMA T-CELL RECEPTOR (INCLUSA ESTRAZIONE, AMPLIFICAZIONE E RILEVAZIONE) (PER PROCESSO LINFOPROLIFERATIVO)	SANGUE INTERO	Provetta tappo ROSA	Eeguire il prelievo il Lunedì . Conservazione: 4 °C richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	AST PESARO URBINO Sede Pesaro ma ve da Pergola lu me ve		15
90.67.2	24680	1944	RICERCA MUTAZIONE GENE BETA GLOBINA	SANGUE INTERO	Provetta tappo ROSA	Effettuare il prelievo il Lunedì e il Giovedì (per Pergola nei giorni di spedizione). + foglio CONSENSO INFORMATO MOD.26 e copia dell'impegnativa Conservazione 4°- 8°C richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	AST PESARO URBINO Sede Pesaro ma ve da Pergola lu me ve		30
9115 COV2	507858	60822	RICERCA ANTIGENE SPECIFICO SARS-COV-2 IN TAMPONE NASO/FARINGEO (Test rapido - Metodo immunocromatografico) Metodo: Immunocromatografico	TAMPONE NASALE	KIT DEDICATO	L'accettazione e refertazione del tampone rapido è effettuata da chi esegue il tampone. SOLO PER PAZIENTI INTERNI	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa do	

9114 COV2	509649	60811	Ricerca RNA SARS-CoV-2 (COVID-19) Metodo: Real Time PCR	TAMPONE NASO-FARINGEO	KIT con TAMPONE DEDICATO	<p>Procedura di raccolta del campione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fare inclinare la testa indietro. - Inserire il tampone nella narice e strofinare con cura contro i turbinati (per essere sicuri che il tampone porti via solo muco e cellule). - Inserire il tampone nella provetta e stemperare. - Richiudere la provetta. - Prendere un secondo tampone - Chiedere di aprire la bocca, abbassare la lingua con un abbassalingua. - Strofinare la parte posteriore della faringe e l'area tonsillare senza toccare la mucosa laterale o la base della lingua. - Stemperare il tampone nella stessa provetta di raccolta utilizzata per il tampone nasale e richiudere. <p>I CAMPIONI VANNO CONSEGNA TI IMMEDIATAMENTE AL LABORATORIO, SE IL TRAGITTO E' BREVE A TEMPERATURA AMBIENTE, ALTRIMENTI REFRIGERATI.</p> <p>Conservazione a 4°C per massimo 48 ore, oltre a -80°C</p> <p>SOLO PER PAZIENTI INTERNI</p>	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	3
9114 COV2	509649	608119	Ricerca RNA SARS-CoV-2 (COVID-19) Test 2 Metodo: Real Time PCR MENARINI	TAMPONE NASO-FARINGEO	KIT con TAMPONE DEDICATO	<p>Procedura di raccolta del campione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fare inclinare la testa indietro. - Inserire il tampone nella narice e strofinare con cura contro i turbinati (per essere sicuri che il tampone porti via solo muco e cellule). - Inserire il tampone nella provetta e stemperare. - Richiudere la provetta <p>I CAMPIONI VANNO CONSEGNA TI IMMEDIATAMENTE AL LABORATORIO, SE IL TRAGITTO E' BREVE A TEMPERATURA AMBIENTE, ALTRIMENTI REFRIGERATI.</p> <p>ESAME MOMENTANEAMENTE SOSPESO</p>	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	1

91.12.B	711021	608159	Ricerca RNA SARS-CoV-2 /Influenza A e B Metodo: Real Time PCR MENARINI	TAMPONE NASO-FARINGEO	KIT con TAMPONE DEDICATO	Procedura di raccolta del campione: - Fare inclinare la testa indietro. - Inserire il tampone nella narice e strofinare con cura contro i turbinati (per essere sicuri che il tampone porti via solo muco e cellule). - Inserire il tampone nella provetta e stemperare. - Richiudere la provetta I CAMPIONI VANNO CONSEGNA TI IMMEDIATAMENTE AL LABORATORIO, SE IL TRAGITTO E' BREVE A TEMPERATURA AMBIENTE, ALTRIMENTI REFRIGERATI. Esame ad uso esclusivo solo dei reparti	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	1
91.12.B	711022	60812	VIRUS SARS-CoV-2 RNA BAL Metodo: Real Time PCR	BAL	CONTENITORE STERILE	CONSERVAZIONE 4°C Esame ad uso esclusivo solo dei reparti	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	3
91.06.6	508338	730	RICKETTSIA CONORII ANTICORPI IgM + IgG (Metodo: CLIA)	SIERO	Provetta tappo GIALLO		Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma SIEROLOGIA		15
9129212	509770	4017	RNA ANALISI PER TRASLOCAZIONE 9;22 BCR/ABL (INCLUSA ESTRAZIONE, RETROTRASCRIZIONE, AMPLIFICAZIONE E RILEVAZIONE) PER STUDIO P190 (Leucemia mieloide cronica e Leucemia acuta linfoblastica)	SANGUE INTERO	5 Provette Tappo ROSA	Eeguire il prelievo il Lunedì. Conservazione 4° - 8°C Allegare sempre copia dell'impegnativa + modello 26 richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	AST PESARO URBINO Sede Pesaro ma ve da Pergola lu me ve		40
9129213	509775	4019	RNA ANALISI PER TRASLOCAZIONE 9;22 BCR/ABL (INCLUSA ESTRAZIONE, RETROTRASCRIZIONE, AMPLIFICAZIONE E RILEVAZIONE) PER STUDIO P210 (Leucemia mieloide cronica)	SANGUE INTERO	5 Provette Tappo ROSA	Eeguire il prelievo il Lunedì. Conservazione 4° - 8°C Allegare sempre copia dell'impegnativa + modello 26 richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	AST PESARO URBINO Sede Pesaro ma ve da Pergola lu me ve		40

9129215	509785	94020	RNA ANALISI PER TRASLOCAZIONE 9;22 BCR-ABL (INCLUSA ESTRAZIONE, RETROTRASCRIZIONE, AMPLIFICAZIONE E RILEVAZIONE) PER STUDIO P230 (Leucemia acuta mieloide)	SANGUE INTERO	5 Provette Tappo ROSA	Eeguire il prelievo il Lunedì . Conservazione 4° - 8°C Allegare sempre copia dell'impegnativa + modello 26 richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	AST PESARO URBINO Sede Pesaro ma ve da Pergola lu me ve		40
91.26.9	701614	305	ROTAVIRUS ANTIGENI Metodo: Immunocromatografico	FECI	Contenitore per Coprocoltura	Emettere le feci su una superficie asciutta e ben pulita. Raccoglierne una modesta quantità con il cucchiaino dell'apposito contenitore.	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	3
90.10.1		3224	SAA SIERO AMILOIDE A Metodo: Nefelometrico	SIERO	Provetta tappo GIALLO	Centrifugare. Conservare a 4° - 8°C richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma LAB. ANALISI PROTEINE		4

91.08.2	701237	4912	ROTAVIRUS ANTIGENI Metodo: WB	SIERO	Provetta tappo GIALLO		Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma SIEROLOGIA		15
90.21.4	700798	2661	SANGUE OCCULTO /F (Routine) Metodo: immunoturbidimetrico	FECI	Contenitori specifici	Emettere le feci su una superficie asciutta e ben pulita. Immergere la parte zigrinata dell'asticella del contenitore in 4-5 punti diversi della massa fecale e reinserirla nel contenitore senza caricarla di materiale. Conservare il campione in frigorifero	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	6
90.21.4	700798	9663	SANGUE OCCULTO /F (Screening) Metodo: immunoturbidimetrico	FECI	Contenitori specifici	Emettere le feci su una superficie asciutta e ben pulita. Immergere la parte zigrinata dell'asticella del contenitore in 4-5 punti diversi della massa fecale e reinserirla nel contenitore senza caricarla di materiale. Conservare il campione in frigorifero	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	6
			Scotch Test (per ricerca ossiuri)			VEDI ENTEROBIUS VERMICULARIS (OSSIURI) ricerca microscopica su materiale perianale (SCOTCH TEST)			
91.03.5	701167	170	SECRETO URETRALE NEISSERIA GONORRHOEAE ESAME COLTURALE. (gonococco) Metodo: colturale	Secreto Vaginale, Secreto Uretrale	TAMPONE con terreno di trasporto	Evitare shock termici. Portare subito in Laboratorio	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	4
90.03.6	700453	561	Serotonine/dU (5HIA) Metodo: HPLC	URINE 24 h	Contenitore per raccolta URINE 24 h	. Raccolta urine 24 ore secondo modalità standard. Ad inizio raccolta versare nel contenitore 10 ml di Acido Cloridrico 6N. Conservazione: 4-8 °C	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma TOSSICOLO GIA		15
9004124	504815	559	Serotonine/S Metodo: HPLC	SIERO	Provetta tappo NOCCIOLA	Per le provette contattare la segreteria del laboratorio analisi. CENTRIFUGARE, SEPARA- RE E CONGELARE ESAME NON Più ESEGUIBILE DAL 01/02/025	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma TOSSICOLO GIA		15
			SEX HORMON BINDING GLOBULIN			VEDI SHBG			

90.25.7	700489	852	SHBG (Sex hormon binding globulin) Metodo: Immunoenzimatico ChLIA	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
9087421	507665	5720	SHIGELLA ANTICORPI MEDIANTE FISSAZIONE DEL COMPLEMENTO Metodo: RFC	SIERO	Provetta tappo GIALLO	richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma SIEROLOGIA		15
			Sideremia			VEDI FERRO			
90.17.C	700767	4902	SIROLIMUS Metodo: CMIA	SANGUE INTERO	Provetta tappo ROSA	Conservazione 4°- 8°C	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma LAB. ANALISI FARMACI		15
90.40.4	700606	074	Sodio/dU Metodo: ISE indiretta	URINE 24 h	Contenitore per raccolta URINE 24 h	Raccolta urine 24 ore secondo modalità standard.	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.40.4	700607	064	Sodio/S Metodo: ISE indiretta	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.40.4	700605	0741	Sodio/U Metodo: ISE indiretta	URINE	Provetta URINE		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.47.7	700871	2190	SOMATOMEDINA IGFBP S Metodo: Chemiluminescenza	SIERO	Provetta tappo GIALLO		Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma IMMUNOME TRIA		15
90.40.7	700870	219	SOMATOMEDINA (IG F1) S Metodo: Chemiluminescenza	SIERO	Provetta tappo GIALLO		Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma IMMUNOME TRIA		15

90.17.C	700720	4901	SOTALOLO Metodo: HPLC	PLASMA	Provetta tappo VERDE	CENTRIFUGARE, SEPARARE E CONGELARE	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma TOSSICOLO GIA		15
90.98.4	701132	339	SQUAME CUTANEE. MICETI RICERCA IN MATERIALI BIOLOGICI DIVERSI. Incluso: esame microscopico ed esame colturale. Metodo: colturale	SQUAME CUTANEE	PIASTRA SABOURAUD	Il campione, eseguito dallo Specialista, viene portato direttamente dal paziente	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	15
			SPERMIOGRAMMA (Liquido seminale esame morfologico e funzionale)	SPERMA		Prendere appuntamento tramite il CUP			
91.08.4	701180	390	STREPTOCOCCO AGALACTIAE NEL TAMPONE VAGINO- RETTALE ESAME COLTURALE. Incluso: Identificazione Metodo: Colturale		TAMPONE con terreno di trasporto		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	4
91.08.5	508390	202	STREPTOCOCCO ANTICORPI ANTI ANTISTREPTOLISINA-O [T A S] Metodo: Immunoturbidimetrico	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.84.8	700995	4900	Streptococcus Pneumoniae Antigene/U	URINE	Contenitore per Urinocoltura	Urine del mattino.	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	4
90.17.C	700768	899	TACROLIMUS (FK-506) /Sg Metodo: Chemiluminescenza	SANGUE INTERO	Provetta tappo ROSA	Prelevare il giorno prima della partenza. Conservare a 4° - 8°C	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma LAB. ANALIS FARMACI		15
90.17.C	700684	605	TEICOPLANINA	PLASMA	Provetta tappo VERDE	CENTRIFUGARE E SEPARARE. Conservare a 4° - 8°C PRELEVARE IL LUN e GIOV se non inviati nei giorni dedicati CONGELARE	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma BIOCHIMICA CLINICA		15
			TEGRETOL			VEDI CARBAMAZEPINA			

90.41.6	700874	359	TELOPEPTIDE C-TERMINALE METODO IMMUNOMETRICO (CTx) /S Metodo: Eclia	SIERO	Provetta tappo GIALLO	(BETA CROSS-LAPS)	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma IMMUNOMETRIA		15
90.75.4	710664	252	Tempo di Protrombina (PT) Metodo: Test coagulativo	PLASMA	Provetta tappo CELESTE		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.76.1	700665	254	Tempo di Tromboplastina Parziale (PTT) Metodo: Test coagulativo	PLASMA	Provetta tappo CELESTE		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2

90.17.C	700736	424	Teofillina Metodo: Cmia	PLASMA	Provetta tappo VERDE	Eeguire il prelievo due ore dopo l'assunzione del farmaco. Centrifugare e separare. Conservazione: 4-8 °C PRELEVARE IL LUN e GIOV	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma LAB. ANALISI FARMACI		15
90.27.3	700807	258	Test di gravidanza /U Metodo: rapido immunocromatografico	URINE	Provetta Urine	Urine del mattino.	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.77.2	700667	2261	TEST DI RESISTENZA ALLA PROTEINA C ATTIVATA	PLASMA	2 Provette tappo CELESTE	Portare subito in Laboratorio in bagno di ghiaccio. Conservazione: <u>centrifugare aliquotare in due provette, congelare.</u> Esame da non eseguire nei pz. in terapia anticoagulante.	AST PESARO URBINO Sede Urbino		15
90.41.3	501330	184	Testosterone Metodo: Immunoenzimatico ChLIA	SIERO	Provetta tappo GIALLO	Eeguire il prelievo al mattino a digiuno.	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.41.4	501335	183	Testosterone Libero Metodo: Chemiluminescenza	SIERO	Provetta tappo GIALLO		Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma IMMUNOMETRIA		15
90.78.2	502505	771032	Tipizzazione HLA A	SANGUE INTERO	Provetta tappo ROSA	Eeguire il prelievo il Lunedì e il Giovedì (per Pergola nei giorni di spedizione). Conservazione: 4 °C richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	AST PESARO URBINO Sede Pesaro ma ve da Pergola lu me ve		50
90.78.2	721756	771032	TIPIZZAZIONE GENOMICA LOCUS A. Bassa risoluzione	SANGUE INTERO	Provetta tappo ROSA	Eeguire il prelievo il Lunedì e il Giovedì (per Pergola nei giorni di spedizione). Conservazione: 4 °C	AST PESARO URBINO Sede Pesaro ma ve da Pergola lu me ve		50
90.78.4	721757	771034	TIPIZZAZIONE GENOMICA LOCUS B Bassa risoluzione	SANGUE INTERO	Provetta tappo ROSA	Eeguire il prelievo il Lunedì e il Giovedì (per Pergola nei giorni di spedizione). Conservazione: 4 °C	AST PESARO URBINO Sede Pesaro ma ve da Pergola lu me ve		50

90.79.1	712760	771036	TIPIZZAZIONE GENOMICA LOCUS C Bassa risoluzione	SANGUE INTERO	Provetta tappo ROSA	Eeguire il prelievo il Lunedì e il Giovedì (per Pergola nei giorni di spedizione). Conservazione: 4 °C	AST PESARO URBINO Sede Pesaro ma ve da Pergola lu me ve		50
90.80.2	721760	771041	TIPIZZAZIONE GENOMICA LOCUS DQA1 Alta risoluzione	SANGUE INTERO	Provetta tappo ROSA	Eeguire il prelievo il Lunedì e il Giovedì (per Pergola nei giorni di spedizione). Conservazione: 4 °C	AST PESARO URBINO Sede Pesaro ma ve da Pergola lu me ve		50
90.80.3	721766	771042	TIPIZZAZIONE GENOMICA LOCUS DQ. Bassa risoluzione	SANGUE INTERO	Provetta tappo ROSA	Eeguire il prelievo il Lunedì e il Giovedì (per Pergola nei giorni di spedizione). Conservazione: 4 °C	AST PESARO URBINO Sede Pesaro ma ve da Pergola lu me ve		50
90.81.1	721768	771038	TIPIZZAZIONE GENOMICA LOCUS DR. Bassa risoluzione	SANGUE INTERO	Provetta tappo ROSA	Eeguire il prelievo il Lunedì e il Giovedì (per Pergola nei giorni di spedizione). Conservazione: 4 °C	AST PESARO URBINO Sede Pesaro ma ve da Pergola lu me ve		50
90.57.3	501850	903	TIPIZZAZIONE HLA-B27	SANGUE INTERO	Provetta tappo ROSA	Eeguire il prelievo il Lunedì e il Giovedì (per Pergola nei giorni di spedizione). Conservazione: 4 °C richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	AST PESARO URBINO Sede Pesaro ma ve da Pergola lu me ve		50
90.78.4	502515	771034	Tipizz. Genomica HLA- B51	SANGUE INTERO	Provetta tappo ROSA	Eeguire il prelievo il Lunedì e il Giovedì (per Pergola nei giorni di spedizione). Conservazione: 4 °C richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	AST PESARO URBINO Sede Pesaro ma ve da Pergola lu me ve		50
90.79.1	502525	771036	Tipizzazione HLA C	SANGUE INTERO	Provetta tappo ROSA	Eeguire il prelievo il Lunedì e il Giovedì (per Pergola nei giorni di spedizione). Conservazione: 4 °C richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	AST PESARO URBINO Sede Pesaro ma ve da Pergola lu me ve		50
90.81.5	502935	901	TIPIZZAZIONE SOTTOPOPOLAZIO NI DI CELLULE DEL SANGUE. (CD3 CD4 CD8 CD45 CD19 CD16 CD56)	SANGUE INTERO	Provetta tappo ROSA	In fase di accettazione, oltre al codice della Tipizzazione Linfocitaria accettare anche tutti i CD (CD3, CD4, CD8, CD45, CD19, CD16, CD56). Eeguire il prelievo il Lunedì e il Giovedì (per Pergola nei giorni di spedizione). Conservazione: 4 °C richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	AST PESARO URBINO Sede Pesaro ma ve da Pergola lu me ve		30

90.81.5	502715	71502	TIPIZZAZIONE SOTTOPOPOLAZIONI DI CELLULE DEL SANGUE. CD3	SANGUE INTERO	Provetta tappo ROSA	Eeguire il prelievo il Lunedì e il Giovedì (per Pergola nei giorni di spedizione) Conservazione: 4°C richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	AST PESARO URBINO Sede Pesaro ma ve da Pergola lu me ve		30
90.81.5	502750	71503	TIPIZZAZIONE SOTTOPOPOLAZIONI DI CELLULE DEL SANGUE. CD4	SANGUE INTERO	Provetta tappo ROSA	Eeguire il prelievo il Lunedì e il Giovedì (per Pergola nei giorni di spedizione) Conservazione: 4°C richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	AST PESARO URBINO Sede Pesaro ma ve da Pergola lu me ve		30
90.81.5	502870	71506	TIPIZZAZIONE SOTTOPOPOLAZIONI DI CELLULE DEL SANGUE. CD8	SANGUE INTERO	Provetta tappo ROSA	Eeguire il prelievo il Lunedì e il Giovedì (per Pergola nei giorni di spedizione) Conservazione: 4°C richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	AST PESARO URBINO Sede Pesaro ma ve da Pergola lu me ve		30
90.81.5	502770	71530	TIPIZZAZIONE SOTTOPOPOLAZIONI DI CELLULE DEL SANGUE. CD45	SANGUE INTERO	Provetta tappo ROSA	Eeguire il prelievo il Lunedì e il Giovedì (per Pergola nei giorni di spedizione) Conservazione: 4°C richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	AST PESARO URBINO Sede Pesaro ma ve da Pergola lu me ve		30
90.81.5	502670	71515	TIPIZZAZIONE SOTTOPOPOLAZIONI DI CELLULE DEL SANGUE. CD19	SANGUE INTERO	Provetta tappo ROSA	Eeguire il prelievo il Lunedì e il Giovedì (per Pergola nei giorni di spedizione) Conservazione: 4°C richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	AST PESARO URBINO Sede Pesaro ma ve da Pergola lu me ve		30
90.81.5	502665	71514	TIPIZZAZIONE SOTTOPOPOLAZIONI DI CELLULE DEL SANGUE. CD16	SANGUE INTERO	Provetta tappo ROSA	Eeguire il prelievo il Lunedì e il Giovedì (per Pergola nei giorni di spedizione) Conservazione: 4°C richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	AST PESARO URBINO Sede Pesaro ma ve da Pergola lu me ve		30
90.81.5	502805	71557	TIPIZZAZIONE SOTTOPOPOLAZIONI DI CELLULE DEL SANGUE. CD56	SANGUE INTERO	Provetta tappo ROSA	Eeguire il prelievo il Lunedì e il Giovedì (per Pergola nei giorni di spedizione) Conservazione: 4°C richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	AST PESARO URBINO Sede Pesaro ma ve da Pergola lu me ve		30
90.81.5	502680	71558	TIPIZZAZIONE SOTTOPOPOLAZIONI DI CELLULE DEL SANGUE. CD20	SANGUE INTERO	Provetta tappo ROSA	Eeguire il prelievo il Lunedì e il Giovedì (per Pergola nei giorni di spedizione) Conservazione: 4°C ALLEGARE SEMPRE COPIA DELL'IMPEGNATIVA richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	AST PESARO URBINO Sede Pesaro ma ve da Pergola lu me ve		30

90.41.5	501340	160	Tireoglobulina (TG) Metodo: Immunoenzimatico ChLIA	SIERO	Provetta tappo GIALLO	Il monitoraggio va iniziato dopo almeno 6 settimane da tiroidectomia o trattamento con Iodio 131.	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.42.1	700824	173	TIREOTROPINA (TSH) Metodo: Immunoenzimatico ChLIA	SIERO	Provetta tappo GIALLO	Eeguire il prelievo al mattino a digiuno.	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.41.8	700890	1730	TIREOTROPINA - TSH - Test riflesso Metodo: Immunoenzimatico ChLIA	SIERO	Provetta tappo GIALLO	Eeguire il prelievo al mattino a digiuno.	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.42.3	710827	175	TIROXINA LIBERA (FT4) Metodo: Immunoenzimatico ChLIA	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.42.6	501386	2900	TRF % DEFICITARIA CARBOIDRATI (CD TECT) /S	SIERO	Provetta tappo GIALLO	Usare disinfettanti a base non alcolica per la zona del prelievo. Il prelievo va effettuato a digiuno. D75 CENTRIFUGARE, CONSERVARE IN FRIGO. LA PROVETTA VA INVIATA CON VERBALE DI ACCOMPAGNO (dati paziente ed indirizzo mail a cui inviare il risultato)	AST PESARO URBINO Tossicologico Pesaro		10
90.43.3	700828	174	TRIODOTIRONINA LIBERA (FT3) Metodo: Immunoenzimatico ChLIA	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.40.9	700746	91018	Topiramato Metodo: Eia	PLASMA	Provetta tappo VERDE	CENTRIFUGARE E SEPARARE. Conservare a 4° - 8°C PRELEVARE IL LUN e GIOV	azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma LAB. ANALISI FARMACI		15
91.12.B	701393	3667	Toxoplasma DNA sangue intero (qualitativo)	SANGUE INTERO	Provetta tappo ROSA		Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma VIROLOGIA		7

91.12.B	701392	3666	Toxoplasma DNA urine (qualitativo)	URINE	Contenitore per Urinocoltura	Eeguire il prelievo il Lunedì e il Giovedì (per Pergola nei giorni di spedizione) Conservazione: 4°C	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma VIROLOGIA		7
9087425	507680	415	TOXOPLASMA ANTICORPI IgA IMMUNOMETRICO	SIERO	Provetta tappo GIALLO	richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma VIROLOGIA		12
91.09.4	508430	40101	TOXOPLASMA ANTICORPI (E. I. A.) IgG Metodo: Chemiluminescenza CLIA	SIERO	Provetta tappo GIALLO	richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	AST PESARO URBINO Sede Urbino		10
9087426	507685	439	TOXOPLASMA ANTICORPI IgG TEST DI AVIDITA'y	SIERO	Provetta tappo GIALLO	L'esame può essere richiesto solo per le pazienti in gravidanza richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma VIROLOGIA		15
91.09.4	508440	40102	Toxoplasmosi TOXOPLASMA ANTICORPI (E. I. A.) IgM Metodo: Chemiluminescenza CLIA	SIERO	Provetta tappo GIALLO	richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	AST PESARO URBINO Sede Urbino		10
91.09.D	508443	40100	TOXOPLASMA ANTICORPI IgG e IgM. Incluso: Test di Avidità delle IgG se IgG positive e IgM positive o dubbie. Incluso: event Metodo: Chemiluminescenza CLIA	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino 10		
90.42.5	700611	019	Transferrina/S Metodo: Immunoturbidimetrico	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.42.4	700610	1819	Transferrina Capacità ferrolegante	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2

91.10.5	508480	406	TREPONEMA ANTICORPI TPHA/TPPA Metodo: Agglutinazione	SIERO	Provetta tappo GIALLO	Esame inviato dal Laboratorio Analisi se l'esame del TREPONEMA SCREENING risulta positivo	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma SIEROLOGIA		10
91.11.1	508495	405	TREPONEMA ANTICORPI VDRL/RPR Metodo: Agglutinazione	SIERO	Provetta tappo GIALLO	Esame inviato dal Laboratorio Analisi se l'esame del TREPONEMA SCREENING risulta positivo richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma SIEROLOGIA		10
91.10.B	508491	4450	TREPONEMA PALLIDUM sierologia della sifilide. Anticorpi EIA/CLIA e/o TPHA [TPPA] pi \diamond VDRL [RPR]. Incluso: eventuale tito) Metodo: Chemiluminescenza	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		3
91.10.7	701227	456	Trichinella Spiralis Anticorpi IgG Metodo: elisa	SIERO	Provetta tappo GIALLO		Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma SIEROLOGIA		15
91.10A	508489	1670	TRICHOMONAS VAGINALIS, ESAME COLTURALE E/O RICERCA DIRETTA ANTIGENI. Non associabile a 90.93.BE Metodo: test rapido immunocromatografico	Secreto VAGINALE	TAMPONE dedicato	E' necessario evitare il bagno in vasca e l'introduzione in vagina di prodotti per l'igiene intima. Non effettuare lavaggi esterni il mattino prima dell'esame.	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	4
90.43..2	700613	026	Trigliceridi Metodo: Colorimetrico enzimatico	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.42.B	501387	241	TRIPTASI	SIERO	Provetta tappo GIALLO		Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma SIEROLOGIA		15

90.82.3	700851	0240	Troponina HS Metodo: Immunoenzimatico ChLIA	SIERO PLASMA	Provetta tappo GIALLO (VERDE per le URGENZE)		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
			TSH			VEDI TIREOTROPINA			
90.43.5	700617	016	URATO /dU (Acido Urico /dU) Metodo: Enzimatico Trinder	URINE 24 h	Contenitore per raccolta URINE 24 h	Raccolta urine 24 ore secondo modalità standard.	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.43.5	700614	012	URATO /S (Acido Urico) Metodo: Enzimatico Trinder	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.44.1	700618	112	UREA/dU (azoto urine) Metodo: UV cinetico	URINE 24 h	Contenitore per raccolta URINE 24 h	Raccolta urine 24 ore secondo modalità standard.	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.44.1	710619	004	UREA/S (azoto) Metodo: Cinetico UV ureasi	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.44.3	701201	147	URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO	URINE	Provetta Urine	Preferibilmente la porzione intermedia della prima urina del mattino.	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
			URINOCOLTURA			VEDI ESAME CULTURALE DELLE URINE			
90.37.1	700592	432	UROPORFIRINE URINARIE (PORFIRINE /dU) Metodo: HPLC	URINE 24 h	Contenitore per raccolta URINE 24 h	Raccolta delle 24 ore secondo modalità standard. Tenere il contenitore al buio, refrigerato e protetto dalla luce. Consegnare la provetta, indicando la diuresi, coperta con carta stagnola. Conservazione: 4 - 8°C	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma TOSSICOLO GIA		15

90.17.C	700690	604	VANCOMICINA Metodo: Chemiluminescenza	PLASMA	Provetta tappo VERDE	Centrifugare, separare Conservare a 4°- 8° C PRELEVARE IL LUN e GIOV	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma LAB. ANALISI FARMACI		
90.82.5	700683	003	VELOCITA' DI SEDIMENTAZIONE DELLE EMAZIE (VES) Metodo: Microfotometria capillare	SANGUE INTERO	Provetta tappo ROSA		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	
90.17.C	700769	9981	VIGABATRIN Metodo: HPLC	PLASMA	Provetta tappo VERDE	CENTRIFUGARE, SEPARARE E CONGELARE	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma TOSSICOLO GIA		
91.12.8	558556	370	VIRUS ADENOVIRUS ANTIGENI RICERCA DIRETTA NELLE FECI Metodo: immunocromatogra- fico	FECI	Contenitore per Coprocoltura	Emettere le feci su una superficie asciutta e ben pulita. Raccoglierne una modesta quantità con il cucchiaino dell'apposito contenitore.	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	
91.14.1	508605	40301	VIRUS CITOMEGALOVIRUS ANTICORPI (E. I. A.) IgG (CMV) Metodo: Chemiluminescenza CLIA	SIERO	Provetta tappo GIALLO	richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	AST PESARO URBINO Sede Urbino		
91.14.1	508610	40302	VIRUS CITOMEGALOVIRUS ANTICORPI (E. I. A.) IgM (CMV) Metodo: Chemiluminescenza CLIA	SIERO	Provetta tappo GIALLO	richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	AST PESARO URBINO Sede Urbino		
9087430	507705	4441	VIRUS CITOMEGALOVIRUS ANTICORPI IgG TEST DI AVIDITA' IMMUNOMETRICO Metodo: Chemiluminescenza	SIERO	Provetta tappo GIALLO	L'esame può essere richiesto solo per le pazienti in gravidanza richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma VIROLOGIA		
41.15.F	701357	40300	VIRUS CITOMEGALOVIRUS ANTICORPI IgG e IgM	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		

91.15.C	701581	3982	VIRUS CITOMEGALOVIRUS DNA QUANTITATIVA (INCLUSA ESTRAZIONE, AMPLIFICAZIONE E RILEVAZIONE) BAL Metodo: Real Time PCR	BAL BRONCO ASPIRATO	Contenitore sterile URINOCOLTURA		Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma VIROLOGIA		
91.15.C	701587	4442	VIRUS CITOMEGALOVIRUS DNA QUANTITATIVA (INCLUSA ESTRAZIONE, AMPLIFICAZIONE E RILEVAZIONE) URINE Metodo: Real Time PCR	URINE	Contenitore sterile URINOCOLTURA	Conservare a 4°C per due giorni massimo.	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma VIROLOGIA		
91.15.C	701583	444	VIRUS CMV DNA quantitativa sangue intero	SANGUE INTERO	Provetta tappo ROSA	Prelevare il giorno prima della partenza. Conservazione 4° - 8°C	AST PESARO URBINO Sede Pesaro ma ve da Pergola lu me ve		
91.12.2	701462	602542	Virus dell'influenza e virus respiratorio sinciziale (RSV) Metodo: RT PCR	TAMPONE FARINGEO	TAMPONE DEDICATO	Compilare scheda richiesta per infezioni respiratorie di sospetta natura virale. Modalità di raccolta, conservazione e trasporto campioni	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma VIROLOGIA		
91.12.B	701466	60795	Virus Dengue RNA sangue intero	SANGUE INTERO	Provetta tappo ROSA	Prelevare il giorno prima della partenza. Conservazione 4° - 8°C ALLEGARE SCHEDA ANAGRAFICA E CLINICA PER I SOSPETTI CASI DI DENGUE	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma VIROLOGIA		
91.12.1	701480	602544	Virus dell'influenza e virus respiratorio sinciziale (RSV) Metodo: RT PCR	BAL	CONTENITORE STERILE	Compilare scheda richiesta per infezioni respiratorie di sospetta natura virale. Modalità di raccolta, conservazione e trasporto campioni	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma VIROLOGIA		

91.17.6	701516	93100	VIRUS EPATITE A [HAV] ANTICORPI IgG e IgM Metodo: cheminulescenza CMIA	SIERO	Provetta tappo GIALLO		Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma VIROLOGIA		
91.17.6	701516	3986	VIRUS EPATITE A [HAV] ANTICORPI IgG Metodo: cheminulescenza CMIA	SIERO	Provetta tappo GIALLO		Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma VIROLOGIA		
91.17.2	508630	931	VIRUS EPATITE A [HAV] ANTICORPI IgM Metodo: chemiluminescenza CLIA	SIERO	Provetta tappo BLU	richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	
91.18.6	508673	93200	VIRUS EPATITE B [HBV] REFLEX. ANTIGENE HBsAg + ANTICORPI anti HBsAg + ANTICORPI anti HBcAg]. Incluso: ANTICORPI anti HBc	SIERO	Provetta tappo BLU		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	
91.18.6	701519	904	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBcAb Metodo: Chemiluminescenza CLIA	SIERO	Provetta tappo BLU	richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	
91.18.1	508650	938	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBcAb IgM Metodo: Chemiluminescenza CLIA	SIERO	Provetta tappo BLU	richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	
91.18.2	508655	937	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBcAb Metodo: Chemiluminescenza CLIA	SIERO	Provetta tappo BLU	richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	
91.18.4	508665	902	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTIGENE HBcAg Metodo: Chemiluminescenza CLIA	SIERO	Provetta tappo BLU	richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	
91.18.3	508660	933	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBcAb Metodo: Chemiluminescenza CLIA	SIERO	Provetta tappo BLU	richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	

91.18.5	508671	932	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTIGENE HBsAg Metodo: Chemiluminescenza CLIA	SIERO	Provetta tappo BLU	richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	
91.12.B	701518	945	VIRUS EPATITE B - HBV DNA QUANTITATIVO	PLASMA	Provetta tappo BIANCO perlato	centrifugare e congelare (Per i punti prelievo del territorio il campione deve essere conservato in ghiaccio)	AST PESARO URBINO Sede Pesaro ma ve da Pergola lu me ve		
91.19.5	508680	939	VIRUS EPATITE C [HCV] ANTICORPI Metodo: Chemiluminescenza CLIA	SIERO	Provetta tappo BLU	richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	
91.19.5	701528	93900	VIRUS EPATITE C (HCV) anticorpi Metodo: Chemiluminescenza CLIA	SIERO	Provetta tappo BLU		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	
91.19.4	701527	943	VIRUS EPATITE C [HCV] ANALISI QUANTITATIVA DI HCV RNA	PLASMA	Provetta tappo BIANCO perlato	centrifugare e congelare (Per i punti prelievo del territorio il campione deve essere conservato in ghiaccio)	AST PESARO URBINO Sede Pesaro ma ve da Pergola lu me ve		
91.20.2	508687	946	VIRUS EPATITE C ANALISI DI MUTAZIONE (GENOTIPO) (INCLUSA ESTRAZIONE, RETROTRASCRIZIONE, AMPLIFICAZIONE, RILEVAZIONE MEDIANTE SEQUENZIAMENTO, IBRIDAZIONE INVERSA O ALTRO METODO)	PLASMA	Provetta tappo BIANCO perlato	centrifugare e congelare (Per i punti prelievo del territorio il campione deve essere conservato in ghiaccio)	AST PESARO URBINO Sede Pesaro ma ve da Pergola lu me ve		
91.20.7	701530	9908	VIRUS EPATITE DELTA [HDV] ANTICORPI Metodo: EIA competitiva	SIERO	Provetta tappo BLU/GIALLO	La Virologia di Ancona esegue l'esame solo se Hbsag risulta positivo	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma VIROLOGIA		
91.20.7	701531	9909	VIRUS EPATITE DELTA [HDV] ANTICORPI IgM	SIERO	Provetta tappo BLU/GIALLO	La Virologia di Ancona esegue l'esame solo se Hbsag risulta positivo	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma VIROLOGIA		

91.12.B	701466	60795	Virus Dengue RNA Metodo: PCR	SANGUE INTERO	Provetta tappo ROSA	ALLEGARE SCHEDA ANAGRAFICA E CLINICA PER I SOSPETTI CASI DI DENGUE	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma VIROLOGIA		
91.20.6	508702	9492	VIRUS EPATITE E ANTICORPI IMMUNOMETRICO IgG Metodo: EIA	SIERO	Provetta tappo GIALLO		Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma VIROLOGIA		
9087434	507726	9493	VIRUS EPATITE E ANTICORPI IMMUNOMETRICO IgM Metodo: EIA	SIERO	Provetta tappo GIALLO	richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma VIROLOGIA		
91.21.1	508740	232	VIRUS EPSTEIN BARR [EBV] ANTICORPI (VCA) (E. I. A.) IgG Metodo: Chemiluminescenza CLIA	SIERO	Provetta tappo GIALLO	richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	AST PESARO URBINO Sede Urbino		
91.21.1	508745	231	VIRUS EPSTEIN BARR [EBV] ANTICORPI (VCA) (E. I. A.) IgM Metodo: Chemiluminescenza CLIA	SIERO	Provetta tappo GIALLO	richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	AST PESARO URBINO Sede Urbino		
91.21.1	508705	233	VIRUS EPSTEIN BARR [EBV] ANTICORPI (EBNA o VCA) (E. I. A.) IgG Metodo: Chemiluminescenza (CLIA)	SIERO	Provetta tappo GIALLO	richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	AST PESARO URBINO Sede Urbino		

91.21.6	701533	2330	VIRUS EPSTEIN BARR (EBV) ANTICORPI	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		
91.21.D	701591	60157	VIRUS EPSTEIN BARR DNA RILEVAZIONE QUANTITATIVA (INCLUSA ESTRAZIONE, AMPLIFICAZIONE E RILEVAZIONE) sangue intero Metodo: Real Time PCR	SANGUE INTERO	Provetta tappo ROSA	Prelevare il giorno prima della partenza. Conservazione 4°- 8°C	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma VIROLOGIA		15
91.21.B	701542	398	VIRUS HERPES SIMPLEX 1 ANTICORPI IgG Metodo: Chemiluminescenza CLIA	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		15
91.21.B	701551	399	VIRUS HERPES SIMPLEX 2 ANTICORPI IgG Metodo: Chemiluminescenza CLIA	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		15
91.21.B	701541	397	VIRUS HERPES SIMPLEX 1-2 ANTICORPI IgM Metodo: Chemiluminescenza	SIERO	Provetta tappo GIALLO		Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma VIROLOGIA		12
91.21.B	701468	9494	VIRUS HEV RNA Feci	FECI	Contenitore per Coprocoltura		Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma VIROLOGIA		7
91.21.B	701467	9491	VIRUS HEV RNA Sangue intero Metodo: RT PCR	SANGUE INTERO	Provetta Tappo VIOLA GRANDE	Prelevare il giorno prima della partenza. Conservazione: 4-8 °C.	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma VIROLOGIA		7

91.22.1	507745	3975	Virus HHV6 ANTICORPI IgG Metodo: Immunofluorescenza indiretta	SIERO	Provetta tappo GIALLO	richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma VIROLOGIA		9
91.22.1	507750	3976	Virus HHV6 ANTICORPI IgM Metodo: Immunofluorescenza indiretta	SIERO	Provetta tappo GIALLO	richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma VIROLOGIA		9
91.09.B	701625	3972	VIRUS HHV6 DNA (HERPES) sangue intero Metodo: RT PCR	SANGUE INTERO	Provetta Tappo ROSA	Prelevare il giorno prima della partenza. Conservazione: 4-8 °C.	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma VIROLOGIA		15
91.09.B	701622	3971	VIRUS HHV8 DNA (HERPES) sangue intero Metodo: RT PCR	SANGUE INTERO	Provetta Tappo ROSA	Prelevare il giorno prima della partenza. Conservazione: 4-8 °C.	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma VIROLOGIA		15
9087447	507775	942	VIRUS HIV 1-2 ANTICORPI E ANTIGENE P24 Metodo: Chemiluminescenza CLIA	SIERO	Provetta tappo BLU	richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	3
91.23.F	508856	94200	VIRUS IMMUNODEFICIENZA ACQUISITA (HIV1-2)	SIERO	Provetta tappo BLU		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	3
91.22.2	701603	949	VIRUS HIV RNA DETERMINAZIONE QUANTITATIVA (INCLUSA ESTRAZIONE, RETROTRASCRIZIONE, AMPLIFICAZIONE, RILEVAZIONI)	PLASMA	Provetta tappo BIANCO perlato	CENTRIFUGARE E CONGELARE (Per i punti prelievo del territorio il campione deve essere conservato in ghiaccio) N.B. se il campione viene inviato a Virologia Ancona PROVETTA DA EMOCROMO (sangue intero)	AST PESARO URBINO Sede Pesaro ma ve da Pergola lu me ve		30

91.23.7	701600	9421	VIRUS HIV 1 Resistenze a farmaci: trascrittasi inversa plasma (RNA genomico) Metodo: Sequenziamento	SANGUE INTERO	Provetta tappo VIOLA GRANDE	Prelevare il giorno prima della partenza Conservazione: 4-8 °C. Compilare richiesta di Sequenziamento di gp120 V3 per TROPISMO CORECETTORIALE HIV1	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma VIROLOGIA		15
91.23.7	701595	9422	VIRUS HIV 1 Resistenze a farmaci: proteasi plasma (RNA genomico) Metodo: Sequenziamento	SANGUE INTERO	Provetta tappo VIOLA GRANDE	Prelevare il giorno prima della partenza Conservazione: 4-8 °C. Compilare richiesta di Sequenziamento di gp120 V3 per TROPISMO CORECETTORIALE HIV1	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma VIROLOGIA		15
91.23.7	701597	9423	VIRUS HIV 1 Resistenze a farmaci: integrasi (RNA genomico) plasma Metodo: Sequenziamento	SANGUE INTERO	Provetta tappo VIOLA GRANDE	Prelevare il giorno prima della partenza Conservazione: 4-8 °C. Compilare richiesta di Sequenziamento di gp120 V3 per TROPISMO CORECETTORIALE HIV1	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma VIROLOGIA		15
91.12.B	701423	3977	VIRUS HSV 1 DNA sangue intero (qualitativo) Metodo: Real Time PCR	SANGUE INTERO	Provetta tappo ROSA	Eeguire il prelievo il Lunedì e il Giovedì . Conservazione: 4-8° C	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma VIROLOGIA		7
91.12.B	701446	3978	VIRUS HSV 2 DNA sangue intero (qualitativo) Metodo: Real Time PCR	SANGUE INTERO	Provetta tappo ROSA	Eeguire il prelievo il Lunedì e il Giovedì . Conservazione: 4-8° C	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma VIROLOGIA		7
91.12.B	701450	39777	VIRUS HSV 1 DNA tampone oculare Metodo: Real Time PCR	TAMPONE	Contenitore sterile	L'esame va prelevato utilizzando un tampone fioccatto stemperato in 2 cc di fisiologica. Eeguire il prelievo il Lunedì e il Giovedì . Conservazione: 4-8° C	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma VIROLOGIA		7

91.12.B	701447	39776	VIRUS HSV 2 DNA tampone oculare Metodo: Real Time PCR	TAMPONE	Contenitore sterile	L'esame va prelevato utilizzando un tampone fioccatto stemperato in 2 cc di fisiologica. Eeguire il prelievo il Lunedì e il Giovedì . Conservazione: 4-8° C	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma VIROLOGIA		7
91.12.B	701449	39775	VIRUS HSV 1 DNA tampone orale Metodo: Real Time PCR	TAMPONE	Contenitore sterile	L'esame va prelevato utilizzando un tampone fioccatto stemperato in 2 cc di fisiologica. Eeguire il prelievo il Lunedì e il Giovedì . Conservazione: 4-8° C	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma VIROLOGIA		7
91.12.B	701405	39774	VIRUS HSV 2 DNA tampone orale Metodo: Real Time PCR	TAMPONE	Contenitore sterile	L'esame va prelevato utilizzando un tampone fioccatto stemperato in 2 cc di fisiologica. Eeguire il prelievo il Lunedì e il Giovedì . Conservazione: 4-8° C	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma VIROLOGIA		7
91.24.F	701599	03332	VIRUS MORBILLO ANTICORPI IgG Metodo: Chemiluminescenza CLIA	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		15
91.24.F	701558	03333	VIRUS MORBILLO ANTICORPI IgM Metodo: Chemiluminescenza CLIA	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		15
91.24.G	701562	033311	VIRUS PAROTITE ANTICORPI IgG Metodo: chemiluminescenza CLIA	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		15
91.24.G	701561	033312	VIRUS PAROTITE ANTICORPI IgM Metodo: chemiluminescenza CLIA	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		15

91.25.8	701564	6021	VIRUS PARVOVIRUS B19 ANTICORPI IgG Metodo: chemiluminescenza CLIA	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		15
91.25.8	701564	6022	VIRUS PARVOVIRUS B19 ANTICORPI IgM Metodo: Chemiluminescenza	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		15
9112616	28371	3983	VIRUS RESPIRATORI DIAGNOSI MOLECOLARE	TAMPONE	TAMPONE FARINGEO/ RINOFARINGE <u>Kit usato per il Covid-19</u>	SI RICERCANO: Influenza A virus, Human Rhinovirus, Influenza B virus, Influenza A H1N1 virus, Human Coronavirus 229E, Human Coronavirus NL63, Human Coronavirus HKU1, Human Coronavirus OC43, Human Parainfluenza virus 3, Human Parainfluenza virus 2, Human Parainfluenza virus 1, Human Parainfluenza virus 4, Human Metapneumovirus A/B, Human Bocavirus, RSV A/B, Human Parechovirus, Human Enterovirus, Adenovirus Compilare scheda richiesta per infezioni respiratorie di sospetta natura virale. Prelevare il giorno prima dell'invio. Conservare a 4°C L'ESAME È RICHIEDIBILE PREVIO ACCORDO CON LA VIROLOGIA DI ANCONA	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma VIROLOGIA	7	

9112616	28372	3984	VIRUS RESPIRATORI DIAGNOSI MOLECOLARE BAL	BAL BRONCO ASPIRATO	Contenitore per Urinocoltura	<p>SI RICERCANO:</p> <p>Influenza A virus, Human Rhinovirus, Influenza B virus, Influenza A H1N1 virus, Human Coronavirus 229E, Human Coronavirus NL63, Human Coronavirus HKU1, Human Coronavirus OC43, Human Parainfluenza virus 3, Human Parainfluenza virus 2, Human Parainfluenza virus 1, Human Parainfluenza virus 4, Human Metapneumovirus A/B, Human Bocavirus, RSV A/B, Human Parechovirus, Human Enterovirus, Adenovirus</p> <p>Compilare scheda richiesta per infezioni respiratorie di sospetta natura virale. Prelevare il giorno prima dell'invio. Conservare a 4°C</p> <p>L'ESAME E' RICHIEDIBILE PREVIO ACCORDO CON LA VIROLOGIA DI ANCONA</p>	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma VIROLOGIA		7
91.25.D	701513	489	VIRUS VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE (RSV) ANTIGENI TAMPONE NASOFARINGEO	SECRETO NASALE	TAMPONE	Ritirare il tampone dedicato in laboratorio Kit usato per il Covid-19	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
91.26.3	701569	952	VIRUS HTLV 1-2 ANTICORPI ANTI HTLV 1-2 Metodo: Chemiluminescenza CMIA	SIERO	Provetta tappo GIALLO		Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma VIROLOGIA		15
91.26.4	508940	4021	VIRUS ROSOLIA ANTICORPI IgG Metodo: Chemiluminescenza CLIA	SIERO	Provetta tappo GIALLO	richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	AST PESARO URBINO Sede Urbino		10
91.26.4	508945	4022	VIRUS ROSOLIA ANTICORPI IgM Metodo: Chemiluminescenza CLIA	SIERO	Provetta tappo GIALLO	richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	AST PESARO URBINO Sede Urbino		10
91.26.D	701370	40200	VIRUS ROSOLIA IgG e IgM Metodo: Chemiluminescenza CLIA	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		10
91.26.E	508959	40201	VIRUS ROSOLIA ANTICORPI IgG per controllo stato immunitario Metodo: Chemiluminescenza CLIA	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		10

91.26.D	701370	4440	VIRUS ROSOLIA ANTICORPI ANTICORPI IgG TEST DI AVIDITA'	SIERO	Provetta tappo GIALLO	L'esame può essere richiesto solo per le pazienti in gravidanza	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma VIROLOGIA		12
91.26.C	701573	03321	VIRUS VARICELLA ZOSTER ANTICORPI (E. I. A.) IgG Metodo: Chemiluminescenza CLIA	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		15
91.26.C	701574	03322	VIRUS VARICELLA ZOSTER ANTICORPI (E. I. A.) IgM Metodo: Chemiluminescenza CLIA	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino		15
91.13.1	701372	5027	VIRUS TOSCANA IgM	SIERO	Provetta tappo GIALLO		Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma VIROLOGIA		12
91.13.1	701371	9536	VIRUS TOSCANA IgG	SIERO	Provetta tappo GIALLO		Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma VIROLOGIA		12
91.13.1	701374	5028	VIRUS WEST-NILE IgM	SIERO	Provetta tappo GIALLO		Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma VIROLOGIA		12

91.13.1	701378	5029	VIRUS WEST-NILE IgM	SIERO	Provetta tappo GIALLO		Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma VIROLOGIA		12
90.45.2	700836	9957	VITAMINE IDROSOLUBILI: DOSAGGIO PLASMATICO A/P Metodo: HPCL	PLASMA	Provetta tappo VERDE	Inviare la provetta avvolta nella carta stagnola e in ghiaccio. Separare e congelare	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma TOSSICOLO GIA		25
90.45.1	700832	463	VITAMINE IDROSOLUBILI: DOSAGGIO PLASMATICO B1/P Metodo: HPLC	SANGUE INTERO	Provetta tappo ROSA	NON SEPARARE, NON CONGELARE. PRELEVARE IL GIORNO DELLA PARTENZA Conservare a 4°- 8°C * Se il campione non viene prelevato nei giorni indicati deve essere congelato (sangue intero) entro 15 min. dal prelievo SI PUO' PRELEVARE SOLO A URBINO, FOSSOMBRONE E PERGOLA	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma TOSSICOLO GIA		25
90.45.1	700834	91045	VITAMINE IDROSOLUBILI: DOSAGGIO PLASMATICO B2/P Metodo: HPLC	SANGUE INTERO	Provetta tappo ROSA	NON SEPARARE, NON CONGELARE. PRELEVARE IL GIORNO DELLA PARTENZA Conservare a 4°- 8°C * Se il campione non viene prelevato nei giorni indicati deve essere congelato (sangue intero) entro 15 min. dal prelievo. SI PUO' PRELEVARE SOLO A URBINO, FOSSOMBRONE E PERGOLA	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma TOSSICOLO GIA		25

90.45.1	700835	91046	VITAMINE IDROSOLUBILI: DOSAGGIO PLASMATICO B6/P Metodo: HPLC	SANGUE INTERO	Provetta tappo ROSA	NON SEPARARE, NON CONGELARE. PRELEVARE IL GIORNO DELLA PARTENZA Conservare a 4°- 8°C * Se il campione non viene prelevato nei giorni indicati deve essere congelato (sangue intero) entro 15 min. dal prelievo SI PUO' PRELEVARE SOLO A URBINO, FOSSOMBRONE E PERGOLA	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma TOSSICOLOGIA		25
90.44.6	700830	186	VITAMINA D3 (25-OH) Metodo: Chemiluminescenza	SIERO	Provetta tappo GIALLO		AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	2
90.45.2	700837	9958	VITAMINE IDROSOLUBILI: DOSAGGIO PLASMATICO E/P Metodo:HPLC	PLASMA	Provetta tappo VERDE	Inviare la provetta avvolta nella carta stagnola e in ghiaccio. Separare e congelare	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma TOSSICOLOGIA		25
90.61.4	501980	9270	X.D.P	PLASMA	Provetta tappo CELESTE	Esame eseguibile solo al Pronto Soccorso Di Pergola	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	1
9087464	507880	5721	YERSINIA ENTEROLITICA ANTICORPI IgA Metodo: Elisa	SIERO	Provetta tappo GIALLO	richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma SIEROLOGIA		15
9087464	507885	5722	YERSINIA ENTEROLITICA ANTICORPI IgG Metodo: Elisa	SIERO	Provetta tappo GIALLO	richiedibile solo con impegnative datate prima del 30/12/2024	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma SIEROLOGIA		15
91.27.5	701189	309	YERSINIA ESAME COLTURALE (FECI)	FECI	Contenitore per Coprocultura	Emettere le feci su una superficie asciutta e ben pulita, raccoglieme una modesta quantità con il	AST PESARO URBINO Sede Urbino	lu ma me gi ve sa	4

						cucchiaio dell'apposito contenitore.			
90.45.4	700620	7907	Zinco /S Metodo: Colorimetrico	SIERO	Provetta tappo GIALLO		Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma IMMUNOME TRIA		12
90.17.C	700765	9357	ZONISAMIDE Metodo: HPLC	SIERO	Provetta tappo GIALLO	CENTRIFUGARE, SEPARARE,CONGELARE	Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Ancona ma ve da Pergola ma TOSSICOLO GIA		15

	UOC PATOLOGIA CLINICA URBINO ELENCO PRESTAZIONI	ALL03GdSlaboU001_ORG	Pag. 109 di 112
		Verifica Dr. E. Berselli-RAQ	Rev 06 del 18/04/2025
		Approvazione Dr. S. Barocci- Direttore UOC	

ESAMI ESEGUIBILI A PAGAMENTO PRESSO IL LABORATORIO TOSSICOLOGICO

1°/2° Livello	DESCRIZIONE	CODICE LEA DM	CUP/LEA	LEA 2025	EXTRA-LEA 2025*
1°U	SOSTANZE D'ABUSO SCREENING URINARIO*	90.40.8	720000	27,75 €	55,50 €
1°U	KETAMINA UR Screen	90.40.9	720035	55,15 €	55,15 €
1°U	ETILGLUCURONIDE UR Screen (Nuova introduzione)	90.40.9	720036	55,15 €	55,15 €
2°U	OPPIACEI URINARI (Morfina , Codeina, Monoacetilmorfina, Diidrocodeina)	90.40.9	720002	55,15 €	103,20 €
2°U	COCAINA URINARIA (Benzoilecgonina , Cocaina, Cocaetilene)	90.40.9	720003	55,15 €	77,40 €
2°U	METADONE URINARIA (Metadone, EDDP)	90.40.9	720004	55,15 €	55,15 €
2°U	BUPRENORFINA URINARIA (Buprenorfina, Nobuprenorfina)	90.40.9	720005	55,15 €	55,15 €
2°U	AMFETAMINE URINARIE (Amfetamina , Metamamfetamina)	90.40.9	720006	55,15 €	55,15 €
2°U	ECSTASY URINARIA (MDMA , MDA, MDEA, MBDB)	90.40.9	720007	55,15 €	103,20 €
2°U	CANNABINOIDI URINARI (Acido 11-nor-9-carbossilico)	90.40.9	720009	55,15 €	55,15 €
2°U	DIAZEPAM U (Nordiazepam, Temazepam, Oxazepam, Diazepam)	90.40.9	720010	55,15 €	103,20 €
2°U	NORDIAZEPAM U (Nordiazepam , Oxazepam)	90.40.9	720011	55,15 €	55,15 €
2°U	TEMAZEPAM U (Temazepam , Oxazepam)	90.40.9	720012	55,15 €	55,15 €
2°U	OXAZEPAM U (Oxazepam)	90.40.9	720013	55,15 €	55,15 €
2°U	ALPRAZOLAM U (Alprazolam , Idrossialprazolam)	90.40.9	720014	55,15 €	55,15 €
2°U	LORMETAZEPAM U (Lormetazepam , Lorazepam)	90.40.9	720015	55,15 €	55,15 €
2°U	DELORAZEPAM U (Delorazepam , Lorazepam)	90.40.9	720016	55,15 €	55,15 €
2°U	LORAZEPAM U (Lorazepam)	90.40.9	720017	55,15 €	55,15 €
2°U	BROMAZEPAM U (Bromazepam, Idrossibromazepam)	90.40.9	720018	55,15 €	55,15 €
2°U	TRIAZOLAM U (Triazolam, Idrossitriazolam)	90.40.9	720019	55,15 €	55,15 €
2°U	MIDAZOLAM U (Midazolam, Idrossimidazolam)	90.40.9	720020	55,15 €	55,15 €
2°U	CLONAZEPAM U (Clonazepam, 7-Aminoclonazepam)	90.40.9	720021	55,15 €	55,15 €
2°U	FLURAZEPAM U (Flurazepam, Desalkilflurazepam, 2-Idrossietilflurazepam)	90.40.9	720023	55,15 €	77,40 €
2°U	FLUNITRAZEPAM U (Flunitrazepam, 7-Aminoflunitrazepam)	90.40.9	720028	55,15 €	55,15 €
2°U	NITRAZEPAM U (7-Aminonitrazepam)	90.40.9	770022	55,15 €	55,15 €
2°U	KETAMINA U (Ketamina , Norketamina)	90.40.9	720035	55,15 €	55,15 €
2°K	OPPIACEI CHERATINICI (Morfina, Codeina, 6-Monoacetilmorfina, Diidrocodeina)	90.40.9	720096	55,15 €	84,80 €
2°K	COCAINA CHERATINICI (Cocaina, Cocaetilene, Norcocaina, Benzoilecgonina)	90.40.9	720097	55,15 €	84,80 €
2°K	AMFETAMINE CHERATINICI (Amfetamina, Metamfetamina)	90.40.9	720100	55,15 €	55,15 €
2°K	ECSTASY CHERATINICI (MDMA, MDA, MDEA, MBDB)	90.40.9	720101	55,15 €	84,80 €
2°K	METADONE CHERATINICO (Metadone, EDDP)	90.40.9	720098	55,15 €	55,15 €
2°K	BUPRENORFINA CHERATINICO (Buprenorfina, Nobuprenorfina)	90.40.9	720099	55,15 €	55,15 €
2°K	CANNABINOIDI CHERATINICI (THC, CBD)	90.40.9	720103	55,15 €	55,15 €
2°K	KETAMINA CHERATINICO (Ketamina, Norketamina)	90.40.9	720129	55,15 €	55,15 €
2°S	OPPIACEI EMATICI (Morfina, Codeina, 6-Monoacetilmorfina, Diidrocodeina)	90.40.9	720049	55,15 €	103,20 €
2°S	COCAINA EMATICA (Cocaina, Cocaetilene, Benzoilecgonina)	90.40.9	720050	55,15 €	77,40 €
2°S	METADONE EMATICO (Metadone, Eddp)	90.40.9	720051	55,15 €	55,15 €
2°S	AMFETAMINE EMATICHE (Amfetamina, Metamfetamina)	90.40.9	720053	55,15 €	55,15 €
2°S	ECSTASY EMATICA (MDMA, MDA, MDE(A), MBDB)	90.40.9	720054	55,15 €	103,20 €
2°S	BUPRENORFINA EMATICA (Buprenorfina, Nobuprenorfina)	90.40.9	720052	55,15 €	55,15 €
2°S	KETAMINA EMATICA (Ketamina, Noketamina)	94.40.9	720082	55,15 €	55,15 €

	UOC PATOLOGIA CLINICA URBINO ELENCO PRESTAZIONI	ALL03GdSlaboU001_ORG	Pag. 110 di 112
		Verifica Dr. E. Berselli-RAQ	Rev 06 del 18/04/2025
		Approvazione Dr. S. Barocci- Direttore UOC	

2°S	CANNABINOIDI EMATICI (THC, THCOH, THCCOOH)	90.40.9	720056	55,15 €	77,40 €
2°S	DIAZEPAM S (Nordiazepam, Temazepam, Oxazepam, Diazepam)	90.40.9	720057	55,15 €	103,20 €
2°S	NORDIAZEPAM S (Nordiazepam, Oxazepam)	90.40.9	720058	55,15 €	55,15 €
2°S	TEMAZEPAM S (Nordiazepam, Oxazepam)	90.40.9	720059	55,15 €	55,15 €
2°S	OXAZEPAM S (Oxazepam)	90.40.9	720060	55,15 €	55,15 €
2°S	ALPRAZOLAM S (Alprazolam, Idrossialprazolam)	90.40.9	720061	55,15 €	55,15 €
2°S	LORMETAZEPAM S (Lormetazepam, Lorazepam)	90.40.9	720062	55,15 €	55,15 €
2°S	DELORAZEPAM S (Delorazepam, Lorazepam)	90.40.9	720063	55,15 €	55,15 €
2°S	LORAZEPAM S (Lorazepam)	94.40.9	720064	55,15 €	55,15 €
2°S	BROMAZEPAM S (Bromazepam, Idrossibromazepam)	90.40.9	720065	55,15 €	55,15 €
2°S	TRIAZOLAM S (Triazolam, Idrossitriazolam)	90.40.9	720066	55,15 €	55,15 €
2°S	MIDAZOLAM S (Midazolam, Idrossimidazolam)	90.40.9	720067	55,15 €	55,15 €
2°S	CLONAZEPAM S (Clonazepam, 7-Aminoclonazepam)	90.40.9	720068	55,15 €	55,15 €
2°S	FLURAZEPAM S (Flurazepam, Desalkilflurazepam)	90.40.9	720070	55,15 €	55,15 €
2°S	FLUNITRAZEPAM S (Flunitrazepam, 7-Aminoflunitrazepam)	90.40.9	720075	55,15 €	55,15 €
2°	CDT	90.42.6	501386	20,90 €	31,00 €
2°	ETANOLO	90.40.9	700745	55,15 €	55,15 €
CC	AST	90.09.2	700529	1,05 €	2,00 €
CC	ALT	90.04.5	700519	1,00 €	2,00 €
CC	GGT	90.25.5	700565	1,15 €	2,00 €
CC	CREATININURIA	90.16.3	700548	1,10 €	1,50 €
EMO	EMOCROMO	90.62.2	711521	3,15 €	4,00 €
PRL	Prelievo	91.49.2	700456	3,80 €	4,80 €

	UOC PATOLOGIA CLINICA URBINO ELENCO PRESTAZIONI	ALL03GdSlaboU001_ORG	Pag. 111 di 112
		Verifica Dr. E. Berselli-RAQ	Rev 06 del 18/04/2025
		Approvazione Dr. S. Barocci- Direttore UOC	

LABORATORIO DELLE ACQUE DI URBANIA

Parametro ricercato	Metodo
Coliformi a 37°C	Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 59 Met ISS A 006A
Escherichia coli	Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 22 Met ISS A 001A
Enterococchi intestinali	UNI EN ISO 7899-2:2003
*Staphylococcus aureus	Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 192 Met ISS A 018B
Pseudomonas aeruginosa	UNI EN ISO 16266:2008
Funghi	Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 164 Met ISS A 016B (esclusa conferma par 2.2.5.2)
Microorganismi vitali a 22°C	UNI EN ISO 6222: 2001
Carica batterica a 22°C	MP-C22-01 2022 rev. 5 Trattasi di metodo interno che utilizza il terreno TGEA previsto nelle Linee guida SIN 2005
Endotossine batteriche (LAL TEST)	MP-LAL-02 2019 rev. 5 Trattasi di metodo interno che segue le direttive previste dalla Farmacopea Statunitense (USP Bacterial Endotoxins Test)
NB: *I parametri asteriscati non rientrano nell'accreditamento ACCREDIA	

ESAMI CHIMICI IN MATRICE ACQUA DI RETE

Controlli chimici C1/C2	
*Ammonio	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 36 Met ISS BHE 019
*Calcio	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 51 Met ISS BEC 041
*Cloro residuo libero	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS BHD 033
*Cloro combinato	
*Cloro totale	
*Cloruro	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037
*Colore	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJA 021
*Conduttività elettrica	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022
*Durezza totale	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 60 Met ISS BEC 031
*Fluoruro	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037
*Magnesio	
*Nitrato	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037
*Nitrito	
*Odore	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAA 026
*Ossidabilità	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 97 Met ISS BEB 027
*pH	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023
*Residuo calcolato	
*Solfato	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037
*Torbidità	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030
NB: *I parametri asteriscati non rientrano nell'accreditamento ACCREDIA	

	UOC PATOLOGIA CLINICA URBINO ELENCO PRESTAZIONI	ALL03GdSlaboU001_ORG	Pag. 112 di 112
		Verifica Dr. E. Berselli-RAQ	Rev 06 del 18/04/2025
		Approvazione Dr. S. Barocci- Direttore UOC	

PROFILI RICHIEDIBILI

B1 (acqua rete)	135 euro	Costo singolo
Coliformi a 37°C		31 euro
Escherichia coli		31euro
Enterococchi intestinali		18 euro
Staphylococcus aureus		18 euro
Pseudomonas aeruginosa		17 euro
Funghi		9 euro
Microorganismi vitali a 22°C		11euro
B2 (acqua di diluizione: liquido di dialisi standard)	62 euro	
Carica batterica a 22°C		1 euro
Funghi		9 euro
Endotossine batteriche (LAL TEST)		42 euro
B3 (acqua di diluizione: inizio-fine anello)	53 euro	
Carica batterica a 22°C		1 euro
Endotossine batteriche (LAL TEST)		42 euro
B4 (acqua di diluizione: punto rene)	20 euro	
Carica batterica a 22°C		11euro
Funghi		9 euro
B5 (liquido di dialisi ultrapuro)	62 euro	
Carica batterica a 22°C		11euro
Funghi		9 euro
Endotossine batteriche (LAL TEST)		42 euro
B6 (acqua di diluizione: inizio-fine anello-osmosi portatile)	17 euro	
Pseudomonas aeruginosa		17 euro
C₁ (Acqua rete) C₂ (Fine anello)	189 euro	
Ammonio		15 euro
Calcio		12 euro
Cloro residuo libero		13 euro
Cloro totale		13 euro
Cloro combinato		0 euro
Cloruro		19 euro
Colore		3 euro
Conduttività elettrica		9 euro
Durezza totale		12 euro
Fluoruro		19 euro
Magnesio		0 euro
Nitrato		12 euro
Nitrito		15 euro
Odore		3 euro
Ossidabilità		10 euro
pH		7 euro
Residuo calcolato		0 euro
Solfato		17 euro
Torbidità		10 euro